

AT03018

NÁVOD NA POUŽITIE, ORTOPEDICKÝ SEPARAČNÝ VANKÚŠ



SK

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Výrobok nesmie byť používaný, kým si neprečítate a nepochopíte tento návod. Ak nerozumiete varovaniam, upozorneniam a odporúčaniam, kontaktujte odborníka v oblasti zdravotnej starostlivosti alebo predajcu, aby ste predišli poškodeniu výrobku alebo zraneniam.

UPOZORNENIE:

Skontrolujte všetky časti výrobku, či nie sú poškodené pri preprave. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, NESMIE sa výrobok používať. Viac informácií vám poskytne predajca.

CIELOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace ochoreniami, dysfunkciami alebo úrazmi, na ktorých liečbu, rehabilitáciu alebo kompenzáciu je tento výrobok určený (pozri časť o určení výrobku v tomto návode na použitie).

Výrobok si môže užívateľ zakúpiť samostatne alebo na základe odporúčania lekára, terapeuta alebo iného odborníka.

Bez ohľadu na spôsob zakúpenia výrobku je potrebné zvážiť dostupné veľkosti, potrebné funkcie a varianty výrobku, indikácie a kontraindikácie na použitie, ako aj informácie poskytnuté výrobcom.

POUŽITIE/INDIKÁCIE

Výrobok je vyrobený z inovatívnej termoformovanej pamäťovej peny, ktorá sa dokonale prispôsobuje anatomickým tvarom tela. Inovatívna pena zabraňuje množeniu mikroorganizmov, alergénov a absorpcii prachových častíc.

Vankúš sa používa na prevenciu a zmiernenie priebehu ochorení a na zmiernenie alebo kompenzáciu následkov poranenia kolien tým, že ich udržiava oddelené v ležiacej polohe.

V rozloženom stave poskytuje vynikajúcu oporu dolným končatinám, čím zabezpečuje správne polohovanie pacienta (napr. po endoprotéze bedrového kĺbu) a tiež pomáha pri prevencii preležanín – zabraňuje vzniku dekubitov v oblasti päty.

VLASTNOSTI PRODUKTU/URČENIE

Pomáha zabezpečiť správne anatomické usporiadanie panvy a bedier pri ležaní na boku po operáciách alebo počas rehabilitácie.

Efektívne znižuje bolesť spôsobenú nesprávnym usporiadaním bedier pri ležaní na boku.

Znižuje napätie v bedrách a kolenných kĺboch.

Poskytuje ideálnu oporu pre kolená a znižuje bolesť spôsobenú nepríjemným tlakom.

Separátor je vyrobený z pamäťovej peny, ktorá sa dokonale prispôsobuje anatomickým tvarom tela.

Prijemný na dotyk poťah so zipsom uľahčuje udržiavanie separátora v čistote.

Rozmery: 25x20x15 cm

Obsah balenia: Vankúš, poťah

Poťah: Velúr, tmavomodrý

Vankúš: Termoformovaná pena

KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo duševné obmedzenia (napr. zrakové postihnutie), ktoré znemožňujú bezpečné používanie výrobku. Výrobok nie je vhodný pre deti do 3 rokov.



OBSAH BALENIA

Ortopedický separačný vankúš

Návod na použitie

POUŽITIE

1. Umiestnite vankúš medzi stehná (pri ležaní na boku).
2. Umiestnite vankúš pod nohu (pri ležaní na chrbte).



UPOZORNENIE:

Ak dôjde k „závažnej udalosti“ spojenej s výrobkom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla viesť alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich situácií:

- a) úmrtie pacienta, používateľa alebo inej osoby, alebo
 - b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo inej osoby, alebo
 - c) závažné ohrozenie verejného zdravia,
- musí byť táto „závažná udalosť“ nahlásená výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko.

Na Slovensku je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných znepokojujúcich, nejasných symptómov počas používania zdravotníckeho prostriedku sa poraďte so zdravotníckym pracovníkom.

UPOZORNENIE:

Používanie výrobku iným spôsobom, než na aký je určený, je zakázané.

ČISTENIE

Potáh sa môže prať šetrne pri teplote do 40 °C.

JE ZAKÁZANÉ:

žehliť

sušiť v bubnovej sušičke

sušiť zavesením

bieliť

chemicky čistiť

používať silné čistiace prostriedky

Čistenie viskoelastickej peny (známej aj ako pamäťová pena) vyžaduje jemný prístup, aby nedošlo k jej poškodeniu.

Potrebuje:

Jemný čistiaci prostriedok alebo prostriedok na umývanie riadu

Teplú vodu

Jedlú sódu (voliteľne na odstránenie zápachu)

Vysávač (najlepšie s mäkkým kefkovým nadstavcom)

Rozprašovač

Mäkkú handričku alebo špongiu

Enzymatický čistiaci prostriedok (voliteľne na škvrny)

Postup čistenia:**Vysatie peny:**

Použite vysávač s mäkkým kefkovým nadstavcom na odstránenie prachu a nečistôt.

Čistenie škvŕn jemným čistiacim prostriedkom:

Zmiešajte čistiaci prostriedok s teplou vodou v rozprašovači.

Jemne nastriekajte znečistené miesto.

Jemne zotrite mäkkou handričkou alebo špongiou.

Ak je to potrebné, jemne nastriekajte čistou vodou na odstránenie zvyškov čistiaceho prostriedku.

Odstránenie odolných škvŕn:

Biologické škvrny alebo moč: Použite enzymatický čistiaci prostriedok, nechajte pôsobiť a utrite čistou handričkou.

Mastné škvrny: Použite malé množstvo prostriedku na umývanie riadu.

Sušenie peny:

Nechajte ju úplne vyschnúť na vzduchu.

Nepoužívajte priame teplo, ako napríklad fén.

SKLADOVANIE

Výrobok skladujte na suchom mieste, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

LIKVIDÁCIA

Po ukončení používania by mal byť výrobok likvidovaný ako bežný komunálny odpad. Dodržujte pravidlá separácie odpadu a chráňte životné prostredie.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

 ANMED PLUS, s.r.o.,
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

PRVÝ KONTAKT: Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 04.02.2025

v1-04.02.2025