

**AT03028**

**NÁVOD NA POUŽITIE, OCHRANNÁ PODLOŽKA POD PÄTU**



Ďakujeme za zakúpenie nášho produktu

Prosíme, dôkladne si prečítajte návod na použitie. Výrobok by sa nemal používať pred prečítaním a porozumením tohto návodu. Ak nerozumiete varovaniam, upozorneniam alebo odporúčaniam, kontaktujte odborníka v oblasti zdravotnej starostlivosti alebo predajcu, aby ste predišli poškodeniu produktu alebo zraneniam.

#### UPOZORNENIE:

Skontrolujte všetky časti výrobku, či nie sú poškodené počas prepravy. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, NEPOUŽÍVAJTE výrobok. Viac informácií získate u predajcu.

#### CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace ochoreniami, dysfunkciami alebo zraneniami, na ktorých liečbu, rehabilitáciu alebo kompenzáciu je tento výrobok určený (pozri časť o účele výrobku v tomto návode na použitie).

Výrobok môže byť zakúpený používateľom samostatne alebo na odporúčanie lekára, terapeuta alebo iného špecialistu. Či už ide o samostatný nákup, alebo odporúčanie odborníka, je potrebné zohľadniť dostupné veľkosti, potrebné funkcie a varianty výrobku, indikácie a kontraindikácie jeho používania, ako aj informácie poskytnuté výrobcom.

#### POUŽITIE / INDIKÁCIE

Ochranná podložka pod pätu je vyrobená z mäkkej polyuretánovej peny a je určená pre osoby s rizikom vzniku preležanín na pätách. Podložka má profilovaný vnútorný povrch, ktorý zabezpečuje dobrú cirkuláciu vzduchu a znižuje tlak na mäkké tkanivá. Je vybavená suchými zipsami pre lepšiu stabilizáciu.

Podložka chráni chodidlo pred odreninami v oblasti päty a členkov. Okrem toho podporuje prevenciu preležanín a umožňuje voľnú cirkuláciu vzduchu.

Používanie produktu znižuje riziko preležanín, ale úplne ho neodstraňuje. Na minimalizáciu rizika preležanín je nevyhnutná primeraná starostlivosť o pacienta, bez ohľadu na použitie produktu – najmä pravidelné menenie polohy pacienta.

#### KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo duševné obmedzenia (napr. zrakové postihnutie), ktoré znemožňujú bezpečné používanie výrobku.

Poškodenie kože: Výrobok nie je určený na použitie pri otvorených ranách, vredoch, kožných infekciách, popáleninách alebo inom poškodení kože v oblasti päty a členkov.

Cievne problémy: Osoby s vážnymi problémami s krvným obehom, ako je trombóza alebo žilová nedostatočnosť, by sa mali pred použitím podložky poradiť s lekárom, aby sa predišlo zhoršeniu ich stavu.

Kožné ochorenia: Osoby trpiace kožnými chorobami, ako sú ekzémy, psoriáza alebo iné chronické kožné problémy, by sa mali pred použitím podložky poradiť s dermatológom.

Poruchy citlivosti: Osoby s poruchami citlivosti v nohách (napr. neuropatia) by sa mali pred použitím výrobku poradiť s lekárom, aby sa predišlo riziku nesprávneho prispôsobenia, ktoré by mohlo viesť k ďalším zraneniam.

#### ZOZNAM SÚČASTÍ

Dve ochranné podložky pod pätu, Návod na použitie

#### VLASTNOSTI

Vyrobené z polyuretánovej peny

Upevnenie na suchý zips

Univerzálna veľkosť: 20 x 17,5 cm

#### NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím sa uistite, že podložka je čistá a suchá. Ak je to potrebné, jemne ju utrite vlhkou handričkou.

Umiestnite podložku na pätu tak, aby profilovaný vnútorný povrch dobre priliehal k pokožke v oblasti päty a členka. Uistite sa, že podložka nie je príliš voľná ani príliš tesná, aby sa zabezpečilo pohodlie a účinnosť.

Po nasadení podložky na pätu upevnite suché zipsy na zaistenie správnej stabilizácie. Skontrolujte, či podložka dobre drží na nohe, ale nie je príliš tesná, aby nespôsobovala tlak. Suché zipsy nastavte tak, aby sa podložka pri chôdzi neposúvala.

Prestavky v používaní:

Ak pocítite akékoľvek nepohodlie alebo podráždenie pokožky, podložku ihneď odstráňte. Prerušte jej používanie v prípade akýchkoľvek abnormalít a poraďte sa s lekárom, najmä ak pocítite bolesť alebo začervenanie v oblasti päty.

#### UPOZORNENIE:

V prípade závažného incidentu súvisiaceho s výrobkom, ktorý priamo alebo nepriamo viedol, mohol viesť alebo môže viesť k akejkoľvek z nasledujúcich situácií:

- a) úmrtie pacienta, používateľa alebo inej osoby;
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo inej osoby;
- c) závažné ohrozenie verejného zdravia,

musí byť tento závažný incident oznámený výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient trvalé bydlisko. Na Slovensku je týmto orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

#### UPOZORNENIE:

Ak sa objaví bolesť, alergická reakcia alebo akékoľvek iné znepokojujúce, nejasné príznaky súvisiace s používaním zdravotníckej pomôcky, poraďte sa so zdravotníckym pracovníkom.

UPOZORNENIE: Použitie výrobku iným spôsobom, ako je uvedené v návode, je zakázané.

#### ČISTENIE

UPOZORNENIE: NEPRAŤ V PRÁČKE!

Čistenie peny vyžaduje jemný prístup, aby sa predišlo jej poškodeniu. Tu je návod, ako ju správne čistiť:

Čo budete potrebovať:

Jemný čistiaci prostriedok alebo prostriedok na umývanie riadu

Teplá voda

Jedlá sóda (voliteľné na odstránenie zápachu)

Vysávač (najlepšie s mäkkou kefou)

Rozprašovacia fľaša

Mäkká handrička alebo špongia

Enzymatický čistiaci prostriedok (voliteľné na odstraňovanie škvŕn)

Postup čistenia:

Vysávanie peny:

Odstránenie prachu a nečistôt: Použite vysávač s mäkkou kefou na jemné vysatie povrchu peny. Tento krok pomôže odstrániť prach, nečistoty a usadeniny pred mokrým čistením.

Čistenie jemným čistiacim prostriedkom:

Pripravte čistiaci roztok: Zmiešajte niekoľko kvapiek jemného čistiaceho prostriedku s teplou vodou v rozprašovacej fľaši.

Jemne nastriekajte na penu: Vyhnite sa nadmernému navlhčeniu peny. Postriekajte len znečistené miesto.

Jemne osušte škvŕny: Použite mäkkú handričku alebo špongiu na jemné osušenie oblasti. Nedrite, aby ste nepoškodili štruktúru peny.

Opláchnite miesto: Ak je to potrebné, mierne postriekajte čistou vodou, aby ste odstránili zvyšky čistiaceho prostriedku.

Odstraňovanie odolných škvŕn:

Biologické škvŕny alebo moč: Použite enzymatický čistič. Naneste malé množstvo na škvŕnu, nechajte chvíľu pôsobiť (podľa pokynov výrobcu) a potom jemne osušte čistou handričkou.

Mastné škvŕny: Použite malé množstvo prostriedku na umývanie riadu alebo špeciálneho čistiaceho prostriedku na čalúnenie určeného pre penové materiály.

Dezodorácia (voliteľné):

Použitie jedlej sódy: Posypte penu vrstvou jedlej sódy a nechajte niekoľko hodín alebo cez noc, aby absorbovala pachy.

Vysajte jedlú sódu po uplynutí dostatočného času.

Sušenie peny:

Nechajte úplne vyschnúť na vzduchu: Pórovitá štruktúra peny ju robí veľmi savou, takže môže trvať dlhšie, kým vyschne. Umiestnite ju na dobre vetrané miesto.

Použite ventilátor na urýchlenie procesu sušenia: Nikdy nepoužívajte priamy zdroj tepla, ako je fén, pretože môže poškodiť penu. Najlepšie je použiť ventilátor so studeným vzduchom.

Uistite sa, že pena je pred opätovným použitím úplne suchá, aby sa predišlo vzniku plesní a húb.

Čomu sa vyhnúť:

Nikdy penu úplne neponárajte do vody, pretože môže byť ťažké ju vysušiť a môže sa poškodiť.

Vyhnite sa používaniu agresívnych chemikálií, ako sú bielidlá alebo čistiace prostriedky na báze alkoholu, ktoré môžu oslabiť štruktúru peny.

Nevystavujte priamemu teplu: Teploto môže poškodiť štruktúru peny, preto sa vyhnite sušeniu v sušičke alebo používaniu horúceho vzduchu.

#### **SKLADOVANIE**

Produkt skladujte na suchom mieste a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.

#### **LIKVIDÁCIA**

Po ukončení používania výrobok zlikvidujte ako bežný komunálny odpad. Dodržiavajte predpisy o triedení odpadu. Chráňte životné prostredie.

## ZÁRUČNÝ LIST

Model: .....

Sériové číslo: .....

Dátum predaja: .....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho: .....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

 ANTAR Sp. J.  
ul. Zawiańska 43  
03-068 Warszawa, Poľsko

**PRVÝ KONTAKT: Distribútor:**

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,  
E-mail: [anmedplus@anmedplus.sk](mailto:anmedplus@anmedplus.sk); [www.anmedplus.sk](http://www.anmedplus.sk)  
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 04.02.2025  
v1-04.02.2025