

Návod na použitie

AT04606

FUSAK PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH POUŽÍVATEĽOV INVALIDNÝCH VOZÍKOV

AT04607

RUKÁVNIKY PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH POUŽÍVATEĽOV INVALIDNÝCH VOZÍKOV



Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Nesprávne používanie výrobku môže viesť k zraneniu, poškodeniu alebo nehode. Preto si v záujme bezpečného a úspešného používania výrobku pozorne prečítajte tento návod.

Výrobok je vhodný na každodenné používanie, či už na krátke prechádzky alebo na dlhodobé používanie v exteriéri. Výrobok je vyrobený z vysokokvalitných materiálov. Vrchná časť produktu je potiahnutá polyesterovou tkaninou odolnou proti dažďu a vnútro je ušité z veľmi hrejivej a na dotyk príjemnej tkaniny.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIE

Výrobok nepoužívajte, kým si neprečítate návod na použitie a neporozumiete všetkým pokynom. Ak nerozumiete výstrahám, upozorneniam alebo pokynom v tomto návode, obráťte sa na zdravotníckeho pracovníka alebo predajcu, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo výrobku.

UPOZORNENIE: Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedbalou údržbou/čistením, nesprávnym používaním alebo nedodržiavaním pokynov v tomto návode.

UPOZORNENIE: VÝROBOK JE HORLAVÝ A PRETO JE POTREBNÉ HO CHRÁNIŤ PRED VZNIETENÍM. Uchovávajte mimo dosahu malých detí.

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, okamžite prestaňte výrobok používať a obráťte sa na svojho lekára.

CIELOVÁ SKUPINA PACIENTOV:

Osoby trpiace ochoreniami, dysfunkciami alebo úrazmi, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je táto pomôcka určená (pozrite časť o určenom použití pomôcky v tomto návode na použitie). Výrobok si môže používateľ zakúpiť samostatne alebo na odporúčanie lekára, terapeuta alebo iného odborníka, a to buď v prípade samostatného nákupu výrobku, alebo na základe odporúčania lekára/terapeuta/iného odborníka. Vždy je potrebné zohľadniť dostupné veľkosti/potrebné funkcie a varianty výrobku, indikácie a kontraindikácie použitia, ako aj informácie poskytnuté výrobcom.

OBSAH BALENIA: fusak alebo rukávniky, návod na použitie

NÁVOD NA ČISTENIE/ÚDRŽBU VÝROBKU:

- produkt je možné prať v práčke (do 40 °C).
- nežehlite
- nečistite chemicky
- nepoužívajte bieliadlá
- chráňte pred vlhkosťou
- nevystavujte vysokým teplotám
- nesušte v bubnovej sušičke
- sušte rozložené, pred sušením jemne vyžmýkajte.

SKLADOVANIE VÝROBKU:

Výrobok skladujte v suchej chladnej miestnosti, mimo dosahu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

UPOZORNENIE:

- Pred každým použitím sa uistite, že na poťahu nie sú žiadne odreniny švov, roztrhnutia látky atď.
- Používanie výrobku v rozpore s pokynmi môže mať za následok komplikácie.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania zdravotníckej pomôcky môže byť zlikvidovaná ako bežný komunálny odpad s výnimkou elektrických výrobkov (v tom prípade postupujte podľa spôsobu likvidácie elektrických a elektronických zariadení). Pre správnu likvidáciu odpadu sa obráťte na miestny úrad alebo na najbližšie zberné miesto odpadu, kde sa dozviete, ako výrobok správne zlikvidovať. Konaním v súlade s miestnymi predpismi pomôhate chrániť životné prostredie.

AT04606

POUŽITIE PRODUKTU: Fusak je určený na použitie na invalidných vozíkoch

VLASTNOSTI PRODUKTU:

- poskytuje primeranú ochranu pred stratou tepla
- poskytuje ochranu pred dažďom/snehom
- ľahko sa nasadzuje
- priedušný materiál podporuje prúdenie vzduchu

NÁVOD NA POUŽITIE:

1. fusak umiestnite na invalidný vozík pomocou suchých zipsov
2. zips by mal byť otvorený čo najviac je to možné
3. umiestnite osobu do invalidného vozíka (na vnútornú stranu fusaku)
4. zapnite zips
5. odstráňte v opačnom poradí

UPOZORNENIA: fusak vždy nasadzujte s pomocou ďalšej osoby.

TECHNICKÉ PARAMETRE A ROZMERY PRODUKTU: 130 cm – dĺžka, 50 cm – šírka, 35 cm - hĺbka

AT04607

POUŽITIE PRODUKTU A JEHO VLASTNOSTI: Rukávniky sú určené na ochranu rúk pred nízkymi teplotami. Ich tvar neobmedzuje možnosť zabrzdenia chodítka.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Rukávniky nasadte na ruky, upevnite suchým zipsom a zaveste gumičky na rukoväť chodítka.

VEĽKOSŤ: univerzálna

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



Antar Medical Sp. z o.o.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 15.01.2023

v1-15.01.2023