

**AT51005**

**NÁVOD NA POUŽITIE ROLLÁTOR**



**MD**



## ÚVOD

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu zdravia, zraneniu alebo nehodám. Preto, aby ste chodec používali bezpečne a úspešne, prečítajte si prosím pozorne tento návod.

**POZNÁMKA:** Skontrolujte všetky diely, či nie sú poškodené pri preprave. Ak zistíte akékoľvek takéto poškodenie, výrobok NEPOUŽÍVAJTE. Viac informácií od výrobcu.

## VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

NEMONTUJTE a NEPOUŽÍVAJTE výrobok, kým si neprečítate a nepochopíte tento návod. Ak nerozumiete akýmkoľvek varovaniam, upozorneniam alebo pokynom, kontaktujte svojho zdravotníckeho pracovníka, distribútora alebo servisného technika pred pokusom o montáž produktu, aby ste predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu produktu. Každý užívateľ by mal požiadať svojho lekára alebo terapeuta o určenie vhodného variantu regulácie a spôsobu použitia.

Chodítko nie je určené na to, aby ho používateľ viedol, keď na ňom sedí.

Pri nastavovaní výšky chodítka by mal byť prítomný lekár / terapeut, aby poskytol užívateľovi oporu a správne utiahol skrutky.

Keď je chodítko rozložené, vždy sa uistite, že je trubica pod sedadlom zaistená a správne pripevnená k rámu. Uistite sa, že sú gombíky nastavenia výšky zaistené, aby sa hlavná nosná konštrukcia nepohybovala pod tlakom. Nedodržanie vyššie uvedených odporúčaní môže viesť k zraneniam.

Pred použitím sa uistite, že VŠETKY nastavovacie prvky rukovätí a sedadla sú zaistené a že kolesá a pohyblivé časti výrobku sú v dobrom stave.

Počas používania musia byť VŠETKY kolesá VŽDY v kontakte so zemou, aby bola zaistená stabilita chodca.

Ak tak neurobíte, chodítko sa môže prevrátiť a zraníť používateľa.

**UPOZORNENIE:** Pri používaní a manipulácii s chodítkom a pri jeho skladaní a nastavovaní mechanizmov môže hroziť riziko zachytenia a/alebo privretia častí tela užívateľa/sprevádzajúcej osoby v otvoroch/medzerách medzi komponentmi. Tieto kroky sa musia vykonávať s mimoriadnou opatrnosťou. Po dokončení nastavenia stabilizujte polohu opatrným utiahnutím matíc / skrutiek.

## UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

## UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov spojených v súvislosti s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

**UPOZORNENIE:** Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním údržby, nedostatočným servisom alebo nedodržaním odporúčaní obsiahnutých v tomto návode.

**UPOZORNENIE:** Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením

**POZNÁMKA:** Pri nesprávnom používaní môže hroziť riziko prevrátenia. Prosím, dodržujte pokyny pre nastupovanie/vystupovanie/premiestňovanie.

## UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA SKLADANIA A MONTÁŽE

Po zložení chodítka sa uistite, že je sedadlo zaistené a obe predné kolesá sú zaistené maticami. Tiež sa uistite, že obe rukoväte sú v rovnakej výške a nehýbu sa. PRED použitím vždy skontrolujte, či sú chodítko a jeho súčasti bezpečne zaistené na svojom mieste.

## POUŽITIE:

Výrobok je určený na podporu pohybu osôb so zníženou schopnosťou chôdze. Chodítko je určené pre jednu osobu.

## KONTRAINDIKÁCIE

fyzické alebo psychické obmedzenia (napr. zhoršenie zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s výrobkom.

## VLASTNOSTI PRODUKTU:

- Sklopné opierky nôh, sedadlo s operadlom.
- Dodáva sa s plastovou nákupnou taškou s popruhom cez rameno alebo pripevnením na prednú časť chodítka.
- Držiak na barle / palice.
- Celé kolesá z materiálu imitujúceho gumu (šírka 40 mm), predné otočné kolesá, zadné kolesá s brzdou.
- Brzdy s možnosťou blokovania.

**ROZSAH DODÁVKY:** chodítko, taška, návod

## ROZKLADANIE

Odstráňte kryty otvorov predného kolesa, namontujte kolesá a dotiahnite maticami. Potom namontujte zadné kolesá a uistite sa, že medené kolíky sú v správnych otvoroch. Potom umiestnite chodítko a zaistite rúrku pod sedadlom. Vložte do nej tašku a potom stlačte sedadlo. Umiestnite rukoväť do vhodnej výšky (6 stupňov nastavenia výšky - pre správne nastavenie výšky sa odporúča poradiť sa so zdravotníckym pracovníkom, dotiahnuť gombíky. Potom namontujte opierku chrbta tak, aby medené kolíky sú na vonkajšej strane. koniec na montáž stupačiek.

## SKLADANIE


Všetky demontážne operácie by sa mali vykonávať v opačnom poradí, ako je popísané v časti „DEMONTÁŽ“.

### APLIKÁCIA RUČNÝCH BRZD

Potiahnite brzdú smerom k rukovätiam.

Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:


1. STÁLE - držte rukoväť brzdy hore (obr. 2)
2. POHYB - uvoľnite rukoväť brzdy (obr.1)
3. ZAMKNUTIE - Stlačte brzdú nadol.

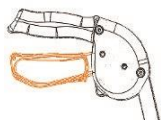

Obr.1 Voľný pohyb



Obr.2 Brzdenie

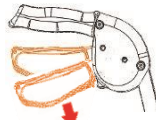

Obr.3 Zámok

**UPOZORNENIE:** Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením

### SKLADOVANIE:

Výrobok by sa mal skladovať na suchom mieste, nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

### ÚDRŽBA

1. Uistite sa, že všetky prílohy sú vždy zaistené.
2. Skontrolujte všetky upevňovacie skrutky, v prípade potreby ich dotiahnite.
3. Všetky poškodené alebo poškodené diely ihneď vymeňte.
4. Výrobok by sa mal pravidelne čistiť vodou a čistiacimi prostriedkami. Sedadlo by sa malo čistiť jemným čistiacim prostriedkom.
5. Nepoužitý produkt skladujte v suchej miestnosti. Vyhnite sa dlhodobému vystaveniu priamemu slnečnému žiareniu.

### ÚDRŽBA KOLIES

1. Kolesá by sa mali čistiť teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Vysušte suchou handričkou.
2. Ak kolesá začnú škripať, pravidelne ich namažte tukom 3 v 1.

### TECHNICKÉ PARAMETRE

Skladacie, štvorkolesové, hliníkové chodítko.

Veľkosť kolies: 8"

Celková výška: od 78 cm do 98 cm

Celková dĺžka: 81 cm

Šírka v hornej časti: 55 cm

Celková šírka: 60 cm

Šírka sedadla: 43 cm

Výška od zeme po sedadlo: 56 cm

Hĺbka sedadla: 29 cm

Vzdialenosť medzi rukoväťami: 49 cm

Hmotnosť: 9,7 kg.

Maximálna hmotnosť užívateľa: 136 kg



Tento symbol označuje maximálnu hmotnosť užívateľa.

### SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania medicínskeho výrobku, môže byť zlikvidovaný ako bežný domový odpad s výnimkou elektrických výrobkov – postupujte podľa spôsobu likvidácie elektrických a elektronických zariadení.

## ZÁRUČNÝ LIST

Model: .....

Sériové číslo: .....

Dátum predaja: .....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho: .....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

 ANMED PLUS, s.r.o.,  
ul. Zawiańska 43  
03-068 Warszawa, Poľsko

### Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,  
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk  
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 19.08.2022  
v1-1 19.08.2022