

AT51011/AT51012

NÁVOD NA POUŽITIE, STOLIČKA DO SPRCHY



Ďakujeme za zakúpenie nášho produktu. Prosíme vás, aby ste si dôkladne prečítali tento návod na použitie. Výrobok nepoužívajte, kým si tento návod neprečítate a neporozumiete mu. Ak nerozumiete upozorneniam, poznámkam a odporúčaniam, obráťte sa na zdravotníckeho špecialistu alebo predajcu, aby ste predišli poškodeniu výrobku alebo zraneniu.

UPOZORNENIE: Skontrolujte všetky časti z hľadiska poškodenia počas prepravy. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, NESMIETE výrobok používať. Viac informácií vám poskytne predajca.

CIELOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo úrazmi, na ktorých liečbu, rehabilitáciu alebo kompenzáciu je tento výrobok určený (pozri časť „Účel použitia“ tohto návodu). Výrobok môže byť zakúpený používateľom samostatne alebo na odporúčanie lekára, terapeuta či iného odborníka. V oboch prípadoch je potrebné zohľadniť dostupné veľkosti, potrebné funkcie a varianty výrobku, indikácie a kontraindikácie jeho použitia, ako aj informácie poskytnuté výrobcom.

POUŽITIE

Sprchové stoličky pre osoby so zdravotným postihnutím sú určené pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Umožňujú alebo uľahčujú bezpečné a pohodlné používanie sprchy. Výrobok uľahčuje hygienu osobám, ktoré: majú obmedzenú pohyblivosť, majú problémy s rovnováhou alebo stabilitou, majú ťažkosti s dlhým státím, sú v rekonvalescencii po úrazoch alebo operáciách, sú vo vyššom veku a potrebujú dodatočnú oporu počas kúpania. Stolička môže byť použitá v domácnosti, opatrovateľských zariadeniach, nemocniciach aj v domovoch sociálnych služieb.

INDIKÁCIE

Použitie sprchovej stoličky sa odporúča v prípadoch: svalovej alebo kĺbovej slabosti, neurologických alebo ortopedických ochorení ovplyvňujúcich mobilitu, závratov alebo sklonu k mdlobám, porúch rovnováhy (napr. Parkinsonova choroba, skleróza multiplex), pooperačného obdobia, keď pacient nemôže dlho stáť, osôb s nadváhou (s ohľadom na maximálne zaťaženie 136 kg).

KONTRAINDIKÁCIE

Použitie sprchovej stoličky sa neodporúča: u osôb presahujúcich maximálnu nosnosť (136 kg), v sprchových kútoch alebo vaniach, kde nie je možné zaistiť stabilné postavenie všetkých nôh stoličky, pri poškodení konštrukčných prvkov (praskliny, deformácie, chýbajúce montážne časti), u osôb s vážnymi poruchami vedomia alebo správania, ktoré znemožňujú bezpečné použitie, u detí bez trvalého dozoru dospelých, pri fyzických alebo duševných obmedzeniach (napr. zrakové postihnutie), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s výrobkom.

ZOZNAM SÚČASTÍ: Sedadlo – 1 ks Nohy s nastaviteľnou výškou a gumovou protišmykovou koncovkou – 4 ks Návod na použitie

Produkt AT51012 navyše obsahuje: Operadlo – 1 ks Područky – 2 ks

VLASTNOSTI PRODUKTU

Ergonomický tvar prispôsobený používateľovi

Dvojité sedadlo v tvare „U“ s odtokovými otvormi pre lepšiu hygienu

Výškové nastavenie v piatich úrovniach

Protišmykové gumové koncovky zabezpečujúce stabilitu na mokrom povrchu

Jednoduchá montáž a demontáž bez použitia náradia

Výrez na sprchovú hadicu

AT51012: s operadlom a područkami

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál: PP plast, hliník, guma

Max. nosnosť: 136 kg

Nastavenie výšky: 5 úrovní

ROZMERY AT51011

Celková šírka: 55 cm

Celková výška: 42–55 cm (nastaviteľná)

Šírka sedadla: 55 cm

Hĺbka sedadla: 41 cm

Hĺbka výrezu v tvare „U“: 17 cm

Hmotnosť: 2 kg

ROZMERY AT51012

Celková šírka: 55 cm

Celková výška: 80–91 cm (nastaviteľná)

Výška sedadla od podlahy: 42–55 cm (nastaviteľná)

Šírka sedadla: 55 cm

Hĺbka sedadla: 41 cm

Hĺbka výrezu v tvare „U“: 17 cm

Výška operadla: 19 cm

Hmotnosť: 3 kg

UPOZORNENIE: Rozmery sa môžu líšiť o ± 2 cm.




Tento symbol označuje maximálnu hmotnosť používateľa.

MONTÁŽ

Vyberte sedadlo a otočte ho hore dnom. Vložte štyri nohy do príslušných otvorov a otočte, aby sa zaistili.



Nastavte všetky nohy na rovnakú výšku (5 úrovní).

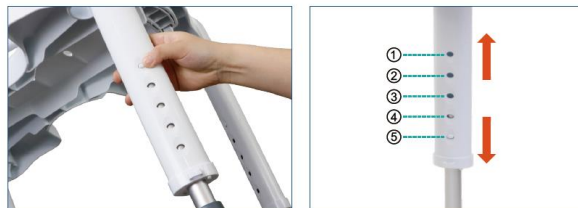

Vložte operadlo do zadných otvorov sedadla.



UPOZORNENIA A BEZPEČNOSŤ

Ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s výrobkom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla viesť alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich situácií:

- a) úmrtiu pacienta, používateľa alebo inej osoby,
- b) dočasnému alebo trvalému zhoršeniu zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo inej osoby,
- c) vážnemu ohrozeniu verejného zdravia,

túto „závažnú udalosť“ je potrebné nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, kde má používateľ alebo pacient bydlisko.

V prípade Slovenskej republiky je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). V prípade bolesti, alergických reakcií alebo iných nejasných príznakov je potrebné poradiť sa so zdravotníkom. Výrobok sa smie používať len v súlade s jeho určením.

UPOZORNENIA

Používajte len podľa určenia – stolička je určená výhradne na sedenie počas sprchovania. Neprekračujte maximálne zaťaženie – povolená hmotnosť používateľa je 136 kg. Umiestnite na stabilný a rovný povrch – pred použitím sa uistite, že všetky nohy stoja rovnomerne a pevne na podlahe. Skontrolujte stabilitu pred sadnutím – vždy overte, že je stolička správne zmontovaná a všetky časti sú dotiahnuté. Buďte opatrní pri sadaní a vstávaní – pridržujte sa stabilných úchytov alebo kúpeľňových madiel. Nepoužívajte poškodenú stoličku – praskliny, deformácie alebo opotrebované časti môžu viesť k pádu. Nemeňte konštrukciu – akékoľvek úpravy môžu znížiť bezpečnosť používania. Používajte v prítomnosti opatrovateľa, ak hrozí riziko straty rovnováhy, porúch vedomia alebo mdlôb. Pravidelne kontrolujte nastavovacie prvky – uistite sa, že výška nôh je rovnaká a mechanizmus funguje správne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Po každom použití opláchnite stoličku čistou vodou, aby ste odstránili zvyšky mydla alebo šampónu. Používajte mäkkú handričku alebo hubku a jemný čistiaci prostriedok. Nepoužívajte agresívne chemikálie, rozpúšťadlá ani abrazíva. Po vyčistení utrite dosucha alebo nechajte vyschnúť na vzduchu. Pravidelne kontrolujte všetky časti – najmä gumové koncovky, upevnenie nôh, područiek a operadla. Uvoľnené skrutky alebo upevnenia dotiahnite. Pri prasklinách, deformáciách alebo inom poškodení konštrukcie výrobok nepoužívajte, kým nebude opravený alebo vymenený.

SKLADOVANIE: Skladujte na suchom mieste, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

LIKVIDÁCIA: Po vyradení z prevádzky likvidujte ako bežný komunálny odpad. Dodržiavajte pravidlá triedenia odpadu. Chráňte životné prostredie.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

PRVÝ KONTAKT: Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 04.02.2025

v1-04.02.2025