

AT51013

NÁVOD NA POUŽITIE CHODÍTKO



Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pred vykonaním akýchkoľvek činností skontrolujte stav produktu. Ak produkt funguje alebo vyzerá nezvyčajne, okamžite kontaktujte predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili. Výrobok nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte tento návod. Ak nerozumiete akýmkoľvek varovaniam, upozorneniam alebo pokynom, obráťte sa na svojho lekára alebo predajcu, aby ste predišli poškodeniu produktu.

CHARAKTERISTIKA

Chodítko je vyrobené z kvalitnej ocele. Skladací rám uľahčuje prepravu. Chodítko je vybavené otočnými prednými kolesami a zadnými neriadenými kolesami s brzdou a parkovacou svorkou. Výrobok je obohatený o sedadlo, ktoré umožňuje odpočinok v sede. Chodítko má tiež pohodlný košík na potrebné veci alebo drobné nákupy, stojan a podnos, ktorý je možné namontovať na sedadlo.

INDIKÁCIE

Chodítko je navrhnuté tak, aby poskytovalo podporu a oporu ľuďom, ktorí nemôžu alebo sa necítia dostatočne sebavedomí na to, aby mohli chodiť bez podpory. Slúži ako pomôcka pri pohybe.

KONTRAINDIKÁCIE:

Fyzické alebo duševné obmedzenia (napr. zhoršenie zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s výrobkom

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

1. Neprekračujte maximálnu hmotnosť užívateľa 120 kg.
2. Chodítko sa nesmie používať na tradičných schodoch a eskalátoroch.
3. Nepokúšajte sa tlačiť chodítko, kým osoba sedí na sedadle.
4. Sedačka sa nesmie používať na prepravu osôb alebo tovaru.
5. Nesadajte si na sedadlo, keď je chodítko na naklonenom povrchu.
6. Chodítko slúži len na podporu chôdze.
7. Chodítko sa môže používať len s originálnym príslušenstvom a náhradnými dielmi.
8. Veci je možné prepravovať iba v košíku. Na rukoväť chodítka nevešajte ťažké predmety, pretože to môže zhoršiť stabilitu chodítka.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Pred použitím sa uistite, že je chodítko správne rozložené.
2. Pred použitím skontrolujte brzdy.
3. Skontrolujte, či sú všetky časti v dobrom stave a či sú pohyblivé časti funkčné.
4. Nesprávne používanie chodítka môže používateľovi spôsobiť vážne zranenie a/alebo poškodiť rám alebo kolesá chodítka.
5. Chodítko nepoužívajte na chôdzu dozadu.
6. Buďte opatrní pri prechádzaní cez obrubníky a iné prekážky a pri používaní chodítka na naklonených, nerovných alebo klzkých povrchoch. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu zraneniu používateľa.
7. Počas používania chodítka nevykonávajte žiadne úpravy.
8. Buďte opatrní, ak sú v koši ťažké predmety (max. hmotnosť 5 kg).
9. Všetky kolesá musia byť vždy v kontakte so zemou.
10. Pred použitím sedačky zabrzďte.
11. Keď používate chodítko v nehybnej polohe, zabrzďte.

Zloženie produktu

- oceľový rám
- PVC kolieska
- plastové rukoväte
- plastové sedadlo

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia,

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

POZOR:

V prípade bolesti, alergických reakcií alebo iných rušivých, pre používateľa nejasných symptómov súvisiacich s používaním zdravotníckej pomôcky, sa poraďte so zdravotníckym pracovníkom.

POZNÁMKA: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním údržby, nesprávnym servisom alebo nedodržaním odporúčaní obsiahnutých v tomto návode.

UPOZORNENIE: je zakázané používať výrobok iným spôsobom, než na aký je určený!

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA POČAS POUŽÍVANIA

Pred použitím sa vždy uistite, že sú rukoväte v správnej výške a bezpečne upevnené. Aby sa predišlo riziku pádu, chodítko sa nesmie používať na nerovnom alebo naklonenom povrchu. Skontrolujte stav kolies a brzd. Nakoniec skontrolujte celkovú stabilitu rámu.

POUŽITIE

Výber typu pomocného zariadenia a jeho vhodnej konfigurácie musí vykonať kvalifikovaný zdravotnícky a technický personál na základe chorôb a podmienok používania zariadenia používateľom.

1. Položte chodítko na zem a rozložte rám, kým sa úplne neroztiahne.
2. Umiestnite rukoväť do otvorov a potom nastavte ich výšku pomocou gombíka. (obr.1)
3. Nainštalujte kôš, stojan a podnosy. (obr. 2, 3 a 4)



1.



2.



3.



4.




5.

SKLADANIE

Chodítko je možné zložiť vykonaním všetkých vyššie popísaných krokov v opačnom poradí. Ak chcete rám zložiť, stlačte červené tlačidlo. (obr.5)

BRZDY

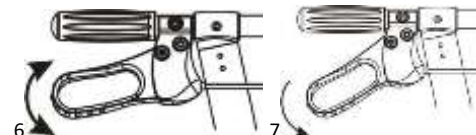

1. Ak chcete chodítko spomaliť alebo zastaviť, potiahnite brzdovú páku. Uvoľnite brzdovú páku na uvoľnenie brzdy. (obr. 6).
2. Ak chcete aktivovať parkovaciu brzdu, zatlačte brzdovú páku nadol, kým sa nezablokuje (obr. 7).

ŠPECIFIKÁCIA

celková šírka: 62 cm
 šírka medzi rúčkami: 48 cm
 hrúbka sedadla: 2 cm
 šírka sedadla: 38 cm
 hĺbka sedadla: 18 cm
 výška sedadla: 61 cm
 rozsah nastavenia výšky rukoväte: 80-92 cm
 hmotnosť: 10,85 kg
 hmotnosť užívateľa: 120 kg



TENTO SYMBOL OZNAČUJE MAXIMÁLNU HMOTNOSŤ UŽÍVATEĽA

OBSAH BALENIA

Chodítko, košík, stojan, tácka, návod na použitie

SKLADOVANIE A LIKVIDÁCIA

Udržujte chodítko mimo zdrojov svetla, vysokej teploty a vlhkosti. Nevystavujte chodítko priamemu slnečnému žiareniu. Chodítko zlikvidujte v súlade s platnými predpismi o ochrane životného prostredia a recyklácii.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Po každom použití odstráňte nahromadenú špinu jemným čistiacim prostriedkom, najlepšie vlhkou handričkou s jemným mydlom, potom chodítko utrite dosucha. Nepoužívajte ostré abrazívne špongie. Pravidelne kontrolujte činnosť brzd, stav tesnení upevňovacích prvkov a stav zvarov.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je táto pomôcka určená (pozri časť o určenom použití pomôcky v tomto návode na použitie). Zariadenie si môže používateľ zakúpiť samostatne alebo na odporúčanie lekára, terapeuta alebo iného odborníka. Bez ohľadu na to, či si pomôcku zakúpite sami alebo na odporúčanie lekára/terapeuta/iného odborníka, musíte vziať do úvahy dostupné veľkosti/potrebné funkcie a varianty pomôcky, indikácie a kontraindikácie používania a informácie poskytnuté výrobcom.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

 ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 20.09.2023
v1-20.09.2023