

Návod na použitie

AT51025

Toaletné kreslo



Poznámky a upozornenia:

PRED POUŽITÍM VÝROBKU JE POTREBNÉ SI PREČITAŤ TENTO NÁVOD.

NEPOUŽÍVAJTE, AK HMOTNOSŤ POUŽÍVATEĽA PRESAHUJE 120 KG

SKLADUJTE MIMO DOSAHU PRIAMEHO SLNEČNÉHO SVETLA A ZDROJA TEPLA.

TOALETNÁ STOLIČKA JE URČENÁ NA POUŽÍVANIE NA ROVNOM POVRCHU.

NIE JE DOVOLENÉ STAŤ NA TOALETNEJ STOLIČKE. PRAVIDELNE KONTROLUJTE, ČI ZARIADENIE NIE JE POŠKODENÉ A OPOTREBOVANÉ.

V PRÍPADO AKÉHOKOL'VEK POŠKODENIA OKAMŽITE PRESTAŇTE VÝROBOK POUŽÍVAŤ.

POZNÁMKA: Skontrolujte všetky diely, či sa nepoškodili počas prepravy. Ak takéto poškodenie zistíte, výrobok NEPOUŽÍVAJTE. Ďalšie informácie získate od výrobcu.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIE

Výrobok NEMONTUJTE ani nepoužívajte, kým si neprečítate a neporozumiete týmto pokynom. Ak nerozumiete výstrahám, upozorneniam alebo pokynom, pred pokusom o montáž výrobku sa obráťte na zdravotníckeho pracovníka, distribútora alebo technika, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu výrobku.

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia (je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

POZNÁMKA: Pri nesprávnom používaní výrobku môže hroziť riziko p r e v e n t n i a . Pri nastupovaní/vystupovaní/presúvaní postupujte podľa pokynov.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok iným spôsobom, než na aký je určený!

POZOR: Počas používania a manipulácie s výrobkom a pri montáži a nastavovaní mechanizmov môže dôjsť k zachyteniu a/alebo stlačeniu častí tela používateľa/spoločníka v otvoroch/priechodoch medzi komponentmi. Tieto operácie vykonávajte obzvlášť opatrne. Po dokončení nastavenia stabilizujte polohu pevným utiahnutím matíc/skrutiek.

POZNÁMKA: Ak sa u vás vyskytnú bolesti, alergické reakcie alebo iné neprijemné, nejasné príznaky súvisiace s používaním zdravotníckej pomôcky, poraďte sa so zdravotníckym pracovníkom.

Toaletná stolička

WC stolička je moderný výrobok určený pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou, ktorého montáž je rýchla, jednoduchá a nevyžaduje žiadne náradie.

Toaletná stolička je tiež prenosná a je vybavená kolieskami, odnímateľnými opierkami na nohy a podrúčkami. Sedadlo je vyrobené z mäkkej peny potiahnutej špeciálnym nepremokavým materiálom, ktorý sa ľahko udržiava v čistote.

Súčasťou balenia je vedro s vekom. S výrobkom sa ľahko manipuluje a dá sa pohodlne zložiť na prepravu alebo skladovanie.

Vlastnosti výrobku:

- oceľ,
- mäkké, pohodlné podrúčky a sedadlo,
- vedro s vekom,
- odnímateľné podnožky,
- prepravitelnosť
- brzdy kolies

Určené použitie/indikácie

Výrobok je určený pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou na uspokojenie ich fyziologických potrieb.

Kontraindikácie: fyzické alebo mentálne obmedzenia (napr. poruchy zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii.

Použitie

Toaletné kreslo umožňuje pacientom, ktorí sú nútení zostať na lôžku, vykonávanie fyziologických potrieb. Môže sa používať v tesnej blízkosti lôžka alebo v priestore, kde sa zdržiava pacient s obmedzenou pohyblivosťou. Okrem toho sa stolička dodáva v prenosnej verzii.

Použite

1. Vyberte výrobok z obalu. Vložte rám spolu s podrúčkami do správnych otvorov tak, aby kolíky na prednej strane podrúčky boli na správnom mieste.
2. Utiahnite gombíky na prednej strane opierky rúk a na zadnej strane operadla.
3. Opierky nôh by mali byť upevnené na svojom mieste. Odomknúť ich možno stlačením páčky západky a vyklopením opierky nôh smerom von.
4. Pred použitím sa uistite, že sú kolesá zaistené a stabilné.
5. Vedro umiestnite zospodu do priestoru, ktorý je preň špeciálne pripravený.
6. Ak chcete stoličku používať, je potrebné sedadlo odstrániť.
7. Ak chcete využiť možnosť prepravy osoby na stoličke, musí byť sedadlo namontované a všetky kolesá odblokované.
8. Všetky demontážne operácie vykonávajte v opačnom poradí ako pri montáži.

POZNÁMKA: Všetky činnosti, ako je nastupovanie, vystupovanie, zmena polohy pacienta, toaleta, si vyžadujú asistenciu opatrovateľa a zablokovanie brzd pojazdových kolies.

Údržba

1. Po každom použití vyprázdňte a vydezinfikujte nádobu a záchodové sedadlo, aby ste zabránili kontaminácii.
2. Rám stoličky čistite vodou a čistiacimi prostriedkami (vyhnite sa korozívnym látkam).
3. Podrúčky, sedadlo a operadlo čistite jemnými čistiacimi prostriedkami.
4. Pri čistení nedrhnite.
5. Ak sa výrobok nepoužíva, mal by sa skladovať na suchom mieste.
6. Na zachovanie výkonu je mimoriadne dôležité udržiavať všetky jeho komponenty v čistote a spôsob jeho skladovania.

SPÔSOB LIKVIDÁCIE VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Po vyradení pomôcky z prevádzky možno zdravotnícku pomôcku zlikvidovať ako bežný komunálny odpad.

UPOZORNENIE: Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedbalou údržbou, nedostatočným servisom alebo v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.

Obsah balenia: Stolička, podnožky, vedro, návod.

Zloženie:

Opierky rúk: PVC
Opierky na nohy: PP + PVC
oceľový rám
Predné kolesá: PP+PVC
Vedro: PE

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je tento výrobok určený (pozri časť o určenom použití výrobku v tomto návode na použitie). Výrobok si môže používateľ zakúpiť samostatne alebo na základe odporúčania lekára, terapeuta alebo iného odborníka. Bez ohľadu na to, či si výrobok zakúpite sami alebo na odporúčanie lekára/terapeuta/iného odborníka, musíte vziať do úvahy dostupné veľkosti/potrebné funkcie a varianty výrobku, indikácie a kontraindikácie použitia, ako aj informácie poskytnuté výrobcom.

Technické údaje:

Rozmery otvorov	22x26 cm
Výška od sedadla po rám	40 cm
Celková výška	92 cm
Výška od sedadla po opierky rúk	23 cm
Vzdialenosť medzi opierkami nôh a sedadlom	44 cm
Šírka opierky nôh	15 cm
Výška sedadla od podlahy	48 cm
Celková šírka	55 cm
Šírka sedadla	44 cm
Hĺbka sedadla	43 cm
Priemer kolesa	12 cm
Celková hmotnosť	12 kg
Maximálna hmotnosť používateľa	120 kg



TENTO SYMBOL OZNAČUJE MAXIMÁLNU HMOTNOSŤ POUŽÍVATEĽA

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.
ul. Zawisłańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

PRVÝ KONTAKT: Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 15.01.2025

v1-15.01.2025