

## **Vaňa na umývanie vlasov pre osoby so zdravotným postihnutím AT51033**



PRED POUŽITÍM VÝROBKU JE NUTNÉ PREČITAŤ SI TENTO NÁVOD NA POUŽITIE.

UCHOVÁVAJTE MIMO VPLYVU PRIAMEHO SLNEČNÉHO ŽIARENIA A ZDROJOV TEPLA.

PRAVIDELNE KONTROLUJTE VÝROBOK, ČI NIE JE POŠKODENÝ ALEBO NADMERNE OPOTREBOVANÝ.

V PRÍPADE AKÉHOKOL'VEK POŠKODENIA VÝROBKU OKAMŽITE PRERUŠTE POUŽÍVANIE.

**UPOZORNENIE:** Skontrolujte všetky časti, či nedošlo k poškodeniu výrobku pri preprave. Ak sa takéto poškodenie zistí, výrobok NEPOUŽÍVAJTE. Ďalšie informácie získate od výrobcu.

#### **UPOZORNENIE:**

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia (je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

#### **UPOZORNENIE:**

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, okamžite prestaňte výrobok používať a obráťte sa na svojho lekára.

**UPOZORNENIE:** Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedbalou údržbou, nedostatočným servisom alebo v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.

**UPOZORNENIE:** Je zakázané používať výrobok na iný ako určený účel!

#### **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIE**

NEPOUŽÍVAJTE výrobok pred prečítaním a pochopením tohto návodu. Ak nerozumiete výstrahám, upozorneniam alebo pokynom, pred montážou výrobku sa obráťte na zdravotníckeho pracovníka, distribútora alebo technika, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu výrobku.

#### **POUŽITIE VÝROBKU**

Umývadlo je určené na umývanie vlasov osôb so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou.

#### **MONTÁŽ VÝROBKU**

1 Umývadlo nafúknite. Ventil je spätný a nevyprázdňuje sa, ani keď zostane otvorený. Ak ho chcete vyprázdniť, zatlačte na ventil a bočné steny, kým sa vzduch úplne nevypustí.

2 Umývadlo umiestnite na rovný povrch.

3. Umiestnite vypúšťaciu hadicu do umývadla alebo drezu, uistite sa, že je nižšie ako umývadlo, aby voda mohla pretekať.

4. Pri používaní umývadla na vypúšťanie vody otvorte vypúšťací ventil.

5. Naplňte vrečko na vodu, prítok vody v hadici sa reguluje odskrutkovaním/zaskrutkovaním trysky.

6. Umiestnite misku pod krk používateľa a nastavte ju, kým sa nebude cítiť pohodlne.

#### **VLASTNOSTI VÝROBKU**

21 cm hlboká misa, dvojnásobne vystužená pre odolnosť a pohodlie. Súčasťou je vypúšťací ventil a hadica na rýchle a jednoduché odstránenie vody. Okrem toho má výrobok vak na vodu s maximálnou kapacitou 10 l pre prípad, že nie je k dispozícii zdroj vody.

#### **OBSAH BALENIA**

Umývadlo s hadicou, čerpadlo, vak na vodu so sprchou. Materiál: PVC

#### **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

Na čistenie nepoužívajte ostré, drsné predmety ani korozívne čistiace prostriedky (napr. kyseliny, rozpúšťadlá).

Všetky časti sa najlepšie čistia vlhkou handričkou s použitím jemných čistiacich prostriedkov pre domácnosť.

Nesušte na radiátore alebo na priamom slnečnom svetle.

#### **SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA**

Po vyradení prístroja z prevádzky možno zdravotnícku pomôcku zlikvidovať ako bežný komunálny odpad.

#### **BEZPEČNOSŤ PRI POUŽÍVANÍ VÝROBKU**

Používajte len teplú vodu do 38 °C, aby ste sa neoparili! Nenechávajte pacienta bez dozoru v (naplnenom) umývadle.

Pravidelne kontrolujte, či umývadlo netečie, aby ste zabránili poškodeniu vodou. Umývadlo nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určené.

**TECHNICKÉ PARAMETRE VÝROBKU**

Délka: 60 cm

Šířka: 50 cm

Výška: 20 cm

Výška opierky hlavy: 10 cm

Délka odtokovej hadice: 70 cm

**UPOZORNENIE:** Akákoľvek činnosť pri používaní výrobku si vyžaduje pomoc opatrovateľa.

## ZÁRUČNÝ LIST

Model: .....

Sériové číslo: .....

Dátum predaja: .....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho: .....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky od dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného použitia tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRÍLOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudu akceptované.



ANTAR Sp. J.  
ul. Zawisłowska 43  
03-068 Warszawa, Poľsko

**PRVÝ KONTAKT: Distribútor:**  
ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,  
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk  
Tel./fax: 041/542 49 16

Dátum vydania návodu: 04.06.2024  
v1-04.06.2024

