

AT51115

NÁVOD NA POUŽITIE, VYCHÁDZKOVÁ PALICA



SK

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt. Prosíme, aby ste si dôkladne prečítali návod na použitie. Výrobok nepoužívajte, kým sa s týmto návodom neoznámíte a úplne ho nepochopíte. Ak nerozumiete upozorneniam, poznámkam alebo odporúčaniam, kontaktujte odborníka na zdravotnú starostlivosť alebo predajcu, aby ste predišli poškodeniu výrobku alebo zraneniu.

UPOZORNENIE: Skontrolujte všetky časti výrobku, či počas prepravy nedošlo k ich poškodeniu. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, výrobok **NEPOUŽÍVAJTE!** Ďalšie informácie vám poskytne predajca.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby, ktoré trpia chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, pre ktoré je tento produkt určený na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu (pozrite časť o účele použitia tohto návodu). Výrobok môže byť zakúpený používateľom samostatne alebo na základe odporúčania lekára, terapeuta alebo iného špecialistu. Bez ohľadu na spôsob zakúpenia je potrebné zohľadniť dostupné veľkosti/požadované funkcie a varianty výrobku, indikácie a kontraindikácie jeho používania a tiež informácie poskytnuté výrobcom.

PRED POUŽITÍM VÝROBKU SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD

Vychádzkové palice majú jednoduché nastavenie výšky, ktoré umožňuje upraviť vzdialenosť od rukoväte k bodu opory zakončenému gumovou náсадkou. Jednotlivé výrobky sa prispôbujú výške používateľa posunutím teleskopicky spojených rúrok na požadovanú výšku a ich následným zablokovaním.

Výška výrobku sa považuje za správne nastavenú, ak používateľ počas používania udržiava vzpriamenú polohu tela a palica funguje vertikálne, t. j. rovnobežne s osou tela. Správne nastavenie výšky a správne používanie našich výrobkov výrazne predlžuje ich životnosť a zabezpečuje pocit bezpečia a spokojnosti používateľa.

OBSAH BALENIA

Palica, návod na použitie

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia (je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, okamžite prestaňte výrobok používať a obráťte sa na svojho lekára.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením!

VLASTNOSTI A TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE AT51115(5)

Univerzálne použitie výrobku (možnosť použitia ako pravá alebo ľavá varianta).

Vyrobená z hliníka.

Rukoväť z polypropylénu.

Nastavenie výšky po 2 cm (maximálna výška 90 cm, minimálna výška 68 cm).

Maximálne zaťaženie: 120 kg.

Gumová násadka: pružná, čierna (nezanecháva stopy na podlahe alebo parketách).

Životnosť: 5 rokov od dátumu výroby.



Tento symbol označuje maximálnu hmotnosť používateľa.

POUŽITIE VÝROBKU/INDIKÁCIE:

Pre osoby, ktoré potrebujú podporu pri chôdzi, po úrazoch dolných končatín, na udržanie rovnováhy a prenášanie váhy pri úrazových alebo ortopedických ochoreniach. Vhodné taktiež pre starších ľudí ako pomôcka na udržanie rovnováhy pri chôdzi.

KONTRAINDIKÁCIE:

Poruchy koordinácie a rovnováhy, úrazy a dysfunkcie horných končatín, ktoré znemožňujú opieranie sa o palicu.

UPOZORNENIA

Palica je určená na použitie v interiéri aj exteriéri na rovnom povrchu.

Buďte mimoriadne opatrní pri použití palice na mokrom, zľadovatenej, masťnej alebo piesčitom povrchu, pretože to zvyšuje riziko pádu.

Pravidelne kontrolujte mechanizmus nastavenia výšky a stav gumovej násadky. Ak je niektorá časť palice poškodená, okamžite prestaňte výrobok používať, pretože hrozí riziko pádu!

Chráňte pred vlhkosťou!

Chráňte pred priamym slnečným žiarením!

Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie!

Pred a počas používania kontrolujte stav výrobku s prihliadnutím na škrabance, praskliny alebo iné poškodenia!

NÁVOD NA POUŽITIE

Uvoľnite (otočte proti smeru hodinových ručičiek maximálne o dve otáčky) zaistovaciu maticu.

Palcom stlačte nastavovací gombík.

Posuňte nastavovaciu rúrku na požadovanú výšku a uistite sa, že otvory v rúrke sa zhodujú s otvormi v tele palice.

Zabezpečte, aby nastavovací gombík zapadol do príslušného otvoru (počuteľné kliknutie).

Dotiahnite zaistovaciu maticu.

ÚDRŽBA A ČISTENIE VÝROBKU

Čistite rukoväť a telo palice vlhkou handričkou a jemnými čistiacimi prostriedkami.

Pravidelne odstraňujte nečistoty z pohyblivých častí palice.

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky!

Palicu nečistite pomocou tlakových alebo parných čističov!

UPOZORNENIE: Nepoužívajte čistiace prostriedky na báze benzínu, rozpúšťadiel, kyselín, chlóru a pod.

SKLADOVANIE

Skladujte výrobok na suchom mieste a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu. Skladovanie vo vlhkých priestoroch (kúpeľne, práčovne) alebo vo vonkajších priestoroch môže zhoršiť jeho funkčné a estetické vlastnosti.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania zdravotníckej pomôcky môže byť zlikvidovaná ako bežný komunálny odpad s výnimkou elektrických výrobkov (v tom prípade postupujte podľa spôsobu likvidácie elektrických a elektronických zariadení). Pre správnu likvidáciu odpadu sa obráťte na miestny úrad alebo na najbližšie zberné miesto odpadu, kde sa dozviete, ako výrobok správne zlikvidovať. Konaním v súlade s miestnymi predpismi pomáhate chrániť životné prostredie.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

PRVÝ KONTAKT: Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 02.12.2024

v1-02.12.2024