

AT51123

NÁVOD NA POUŽITIE – PODÁVAČ PREDMETOV



Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok, pozorne si prečítajte návod na použitie. Nepoužívajte výrobok pred prečítaním a pochopením tohto návodu. Ak nerozumiete výstrahám, upozorneniam a odporúčaniam, obráťte sa na svojho zdravotníckeho pracovníka alebo predajcu, aby ste predišli poškodeniu výrobku a zraneniu osôb.

UPOZORNENIE: Skontrolujte všetky diely, či neboli poškodené pri preprave. Ak takéto poškodenie zistíte, výrobok **NEPOUŽÍVAJTE**. Ďalšie informácie získate od výrobcu.

POUŽITIE/INDIKÁCIE


Mimoriadne pohodlný a ľahký podávač predmetov pre seniorov je dokonalým pomocníkom pri bežných činnostiach. Je ideálny ako pomôcka na zdvíhanie predmetov z podlahy, ako aj na vyberanie vecí z vysokých políc. Vďaka jeho dlhej a pevnej rukoväti sa nemusíte zohýbať ani namáhať ruky. Nekomplikované a veľmi jednoduché použitie. Podávač predmetov pre zdravotne postihnutých urobí ich každodenný život pohodlnejším. Obmedzený rozsah pohybu, podpora pri zdvíhaní predmetov z podlahy alebo ťažko prístupných miest.

KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo mentálne obmedzenia (napr. poruchy zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii.

- Osoby s obmedzeným citom v rukách alebo ramenách nemusia dostatočne cítiť hmotnosť alebo tvar predmetu uchopeného pomocou podávača, čo môže mať za následok jeho nesprávne použitie alebo pád predmetu.
- Osoby s poruchami koordinácie môžu mať problémy s presným ovládaním podávača, čo môže mať za následok neúmyselné pohyby alebo neschopnosť bezpečne uchopiť predmety.
- Ak má osoba obmedzenú silu v rukách alebo ramenách, nemusí byť schopná primerane používať podávač predmetov, najmä ak si jeho stlačenie alebo držanie vyžaduje väčšiu námahu.
- Používanie podávača predmetov, najmä u osôb s obmedzenou rovnováhou, môže zvýšiť riziko pádu, ak sa používateľ musí s podávačom naťahovať v nestabilnej polohe.
- Pri niektorých neurologických ochoreniach, ako je Parkinsonova choroba alebo skleróza multiplex, môžu svalový tras alebo kŕče sťažovať efektívne a bezpečné používanie podávača predmetov.

VLASTNOSTI A POUŽITIE VÝROBKU

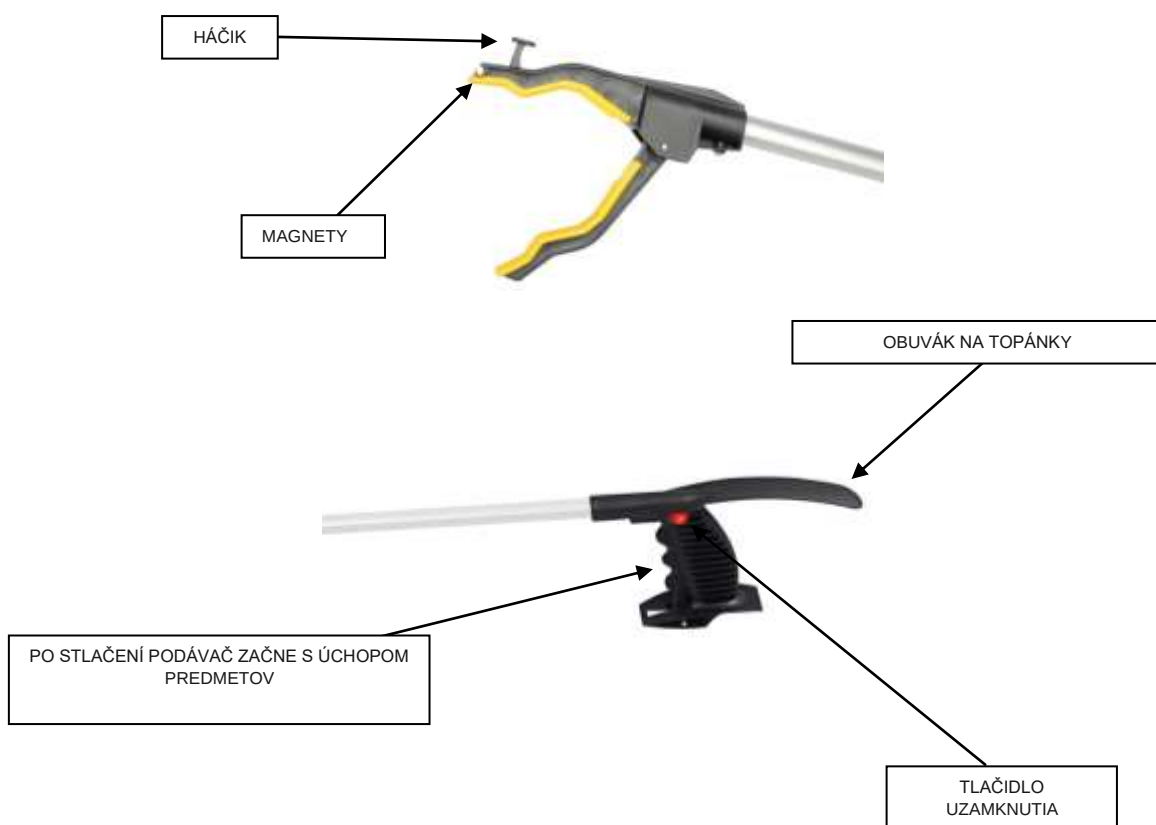

VLASTNOSTI VÝROBKU A JEHO FUNKCIE

- Horná hlava svorky je vybavená magnetmi a háčikom
- Môže priťahovať kovové predmety a zdvíhať okrúhle predmety
- Rukoväť je vybavená pružným a flexibilným samosvorným mechanizmom
- Podlhovastý horný koniec rukoväte má tvar oblúka, čo pomáha pri obúvaní

TECHNICKÉ PARAMETRE A ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

- Celková dĺžka: 82,2 cm
- Celková šírka: 12,5 cm
- Šírka otvoru svorky: 9,3 cm
- Celková výška: 4,5 cm
- Celková hmotnosť: 0,15 kg
- Maximálna hmotnosť uchopeného predmetu: 1 kg



Tento znak označuje maximálnu nosnosť podávača predmetov

OBSAH BALENIA:

Podávač predmetov, návod na použitie

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia (je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, okamžite prestaňte výrobok používať a obráťte sa na svojho lekára.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením!

UPOZORNENIE: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním údržby, nedostatočným servisom alebo nedodržaním odporúčaní obsiahnutých v tomto návode na použitie.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je táto pomôcka určená (pozrite časť o určenom použití pomôcky v tomto návode na použitie). Produkt si môže používateľ zakúpiť samostatne alebo na odporúčanie lekára, terapeuta alebo iného odborníka. Bez ohľadu na to, či si pomôcku zakúpite sami alebo na odporúčanie lekára/terapeuta/iného odborníka, musíte vziať do úvahy dostupné veľkosti/potrebné funkcie a varianty pomôcky, indikácie a kontraindikácie používania a informácie poskytnuté výrobcom.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ O VÝROBK

Výrobok by sa mal čistiť ručne pomocou handričky a vody. Môže sa použiť neutrálny čistiaci prostriedok. Nečistite hrubými predmetmi. Nepoužívajte silné čistiace prostriedky.

Pred každým použitím nezabudnite venovať pozornosť celkovému stavu výrobku, či nemá známky opotrebovania, nechýbajú žiadne súčasti alebo či sú všetky skrutky správne dotiahnuté.

SKLADOVANIE VÝROBKU

Výrobok skladujte v suchej a chladnej miestnosti, mimo vplyvu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania zdravotníckej pomôcky môže byť zlikvidovaná ako bežný komunálny odpad s výnimkou elektrických výrobkov (postupujte podľa spôsobu likvidácie elektrických a elektronických zariadení). Pre správnu likvidáciu odpadu sa obráťte na miestny úrad alebo na najbližšie zberné miesto odpadu, kde sa dozviete, ako výrobok správne zlikvidovať. Konaním v súlade s miestnymi predpismi pomáhate chrániť životné prostredie.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

PRVÝ KONTAKT: Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 15.05.2024

v1-15.05.2024