

AT51129

NÁVOD NA POUŽITIE

AT51129 OPIERKA CHRBTÁ



Ďakujeme za zakúpenie nášho produktu. Prosíme vás, aby ste si dôkladne prečítali návod na použitie. Výrobok nepoužívajte, kým si tento návod neprečítate a nepochopíte. Ak nerozumiete varovaniam, upozorneniam a odporúčaniam, obráťte sa na odborníka v oblasti zdravotnej starostlivosti alebo na predajcu, aby ste predišli poškodeniu produktu alebo zraneniu.

UPOZORNENIE: Skontrolujte všetky časti výrobku, či nedošlo k ich poškodeniu počas prepravy. V prípade zistenia takýchto poškodení výrobok NESMIETE používať. Viac informácií vám poskytne predajca.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je tento výrobok určený (pozri časť o určení výrobku v tomto návode na použitie). Výrobok si môže používateľ zakúpiť samostatne alebo na základe odporúčania lekára, terapeuta alebo iného odborníka. Pri samostatnom nákupe výrobku, ako aj pri odporúčaní od lekára/terapeuta/odborníka je potrebné zohľadniť dostupné veľkosti/požadované funkcie a varianty výrobku, indikácie a kontraindikácie na použitie, ako aj informácie poskytnuté výrobcom.

POUŽITIE/INDIKÁCIE

Podpera je navrhnutá tak, aby umožnila chorým ľuďom, ktorí sú trvalo pripútaní na lôžko, sedieť na posteli na účely užívania liekov a jedenia, ako aj na zmenu polohy z ležania do sedenia. Takáto zmena polohy pomáha zlepšiť krvný obeh u chorých ľudí, zvyšuje ich pohodlie a podporuje regeneračné procesy.

Osoby s obmedzenou pohyblivosťou: Pacienti, ktorí majú problémy so samostatným udrжанím sedacej polohy v dôsledku svalovej slabosti, paralýzy, neurologických ochorení alebo iných porúch, môžu potrebovať oporu chrbta.

Choroby dýchacieho ústrojenstva: U pacientov s respiračnými problémami, ako je CHOCHP, astma alebo srdcové zlyhanie, pomáha sedacia poloha s vhodnou oporou chrbta zlepšiť dýchanie, znižuje tlak na pľúca a uľahčuje ventiláciu.

Pacienti po operáciách: Pacienti po chirurgických zákrokoch, najmä v oblasti brucha alebo hrudníka, môžu potrebovať oporu, aby sa vyhlížili bolesti a nepohodliu pri sedení a jedení.

Prevencia preležanín: U osôb dlhodobo pripútaných na lôžko môže správna podpora chrbta zabrániť vzniku preležanín tým, že rovnomerne rozloží tlak na chrbát.

Neurologické ochorenia: U osôb s neurologickými ochoreniami, ako je mŕtvica, roztrúsená skleróza alebo Parkinsonova choroba, môže opora chrbta pomôcť udržať stabilnú a bezpečnú sedaciu polohu počas jedla.

Dysfágia (problémy s prehĺtaním)

Starší ľudia

KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo mentálne obmedzenia (napr. zrakové postihnutie), ktoré znemožňujú bezpečnú manipuláciu s výrobkom.

U pacientov so zraneniami chrbtice, najmä v oblasti krčnej alebo hrudnej chrbtice, môže byť zdvíhanie do sedacej polohy nebezpečné. V takýchto prípadoch sa musia dodržiavať odporúčania odborníka alebo používať špeciálne ortopedické vankúše.

Ak pacient trpí intenzívnou bolesťou chrbta, krku alebo bedier, zmena polohy môže zhoršiť príznaky. V takýchto prípadoch je potrebná konzultácia s lekárom alebo fyzioterapeutom, aby sa upravila poloha tak, aby sa minimalizovalo nepohodlie.

Osoby s vážnymi kardiologickými problémami, ako je ortostatická hypotenzia (náhle poklesy krvného tlaku pri zmene polohy), môžu pri zdvíhaní do sedacej polohy pociťovať závraty, slabosť alebo mdloby.

Pacienti s poraneniami hrudníka, ako sú zlomené rebrá alebo pneumotorax, môžu pri pokuse o zdvihnutie do sedacej polohy pociťovať nepohodlie alebo bolesť. V takýchto prípadoch je potrebné osobitné nastavenie opory.

V niektorých prípadoch pacienti s pokročilým respiračným zlyhaním nemusia tolerovať sedáciu polohu, ak vyvoláva dodatočný tlak na bránicu a zhoršuje dýchacie funkcie. Vtedy je potrebné upraviť výšku opory alebo sa vyhnúť úplnej sedacej polohe.

V niektorých prípadoch, najmä po operáciách brucha, môže príliš vysoká sedacia poloha vyvolať napätie v operovanej oblasti, čo môže spomaliť hojenie alebo spôsobiť bolesť.

U pacientov s neurologickými poruchami, ktoré ovplyvňujú kontrolu pohybov alebo rovnováhu (napr. ťažká mŕtvica, amyotrofická laterálna skleróza), môže nesprávna podpora chrbta v sedacej polohe zvýšiť riziko pádu alebo prevrátenia sa nabok.

VLASTNOSTI

Jednoduché ovládanie

Nastavenie opierky (6 úrovní)

Vankúš pod hlavu

Priedušná látka (100 % polyester)

Oceľový rám

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Veľkosť v zloženom stave: 60x54,5x8 cm

Maximálna veľkosť po rozložení: 56x54,5x50 cm

Hmotnosť: 1,75 kg

Maximálne zaťaženie: 136 kg



Tento symbol označuje maximálnu hmotnosť používateľa.

NÁVOD NA POUŽITIE

Rozložte oporu a položte ju na posteľ do polohy, ktorá bude podopierať chrbát pacienta.

Nastavte uhol sklonu opierky podľa preferencií pacienta pomocou dostupných možností nastavenia na opore.

Uložte pacienta tak, aby mal pohodlnú oporu chrbta a hlavy.

Poznámka: Uistite sa, že ruky pacienta sú pri zmene sklonu mimo mechanizmov nastavovania.

Poznámka: Skontrolujte, či je blokovací mechanizmus sklonu správne zaistený pred použitím, aby sa zabránilo náhlemu zloženiu.

Poznámka: Pred každým použitím sa uistite, že je výrobok stabilný a bezpečne nastavený.

ČASTI PRODUKTU

Opierka chrbta, návod na použitie

UPOZORNENIE:

V prípade, že sa v súvislosti s výrobkom vyskytne „vážny incident“, ktorý priamo alebo nepriamo viedol, mohol viesť alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) úmrtie pacienta, používateľa alebo inej osoby, alebo
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo inej osoby, alebo
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia,

musí byť „vážny incident“ nahlásený výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

UPOZORNENIE:

V prípade bolesti, alergických reakcií alebo iných znepokojujúcich alebo nejasných príznakov spojených s používaním zdravotníckeho prostriedku sa obráťte na zdravotníckeho pracovníka.

UPOZORNENIE:

Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením.

UPOZORNENIE: Ak sa pacient nemôže pohybovať samostatne, je potrebné pravidelne meniť jeho polohu. V opačnom prípade sa môžu vytvoriť preležaniny.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na čistenie kovových častí použite jemný čistiaci prostriedok na domáce použitie a v prípade potreby bežný dezinfekčný prostriedok.

Nepoužívajte agresívne, korozívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Pravidelne kontrolujte, či výrobku nechýbajú žiadne časti a či sú všetky komponenty v dobrom technickom stave. Ak si všimnete opotrebenie, mechanické poškodenie alebo chýbajúce časti, okamžite prestaňte výrobok používať a kontaktujte servis výrobcu, aby ste predišli riziku nehody alebo ďalšiemu poškodeniu.

Na čistenie látkových častí použite vlhkú handričku.

SKLADOVANIE

Výrobok skladujte na suchom mieste a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.

LIKVIDÁCIA

Po vyradení zdravotníckeho prostriedku z používania ho možno zlikvidovať ako bežný komunálny odpad. Pre správnu likvidáciu sa obráťte na miestny úrad alebo najbližšie zberné miesto odpadu, kde sa dozviete, ako správne zlikvidovať výrobok. Dodržiavaním miestnych predpisov prispievate k ochrane životného prostredia.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

PRVÝ KONTAKT: Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 04.06.2024

v1-04.06.2024