

AT51208

NÁVOD NA POUŽITIE

NADSTAVEC NA WC



Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok, pozorne si prečítajte návod na použitie. Nepoužívajte výrobok pred prečítaním a pochopením tohto návodu. Ak nerozumiete výstrahám, upozorneniam a odporúčaniam, obráťte sa na svojho zdravotníckeho pracovníka alebo predajcu, aby ste predišli poškodeniu výrobku alebo zraneniu osôb.

UPOZORNENIE: Skontrolujte všetky diely, či neboli poškodené pri preprave. Ak takéto poškodenie zistíte, výrobok NEPOUŽÍVAJTE. Ďalšie informácie získate od výrobcu.

ÚČEL

Nadstavce na WC sú určené pre ľudí trpiacich artritídou, ľudí po operácii bedrového kĺbu a iných ľudí, ktorí majú problémy s pohybom, vstávaním a sedením. Nadstavce na WC môžu zvýšiť výšku toalety, čím sa uľahčí sedenie a vstávanie, najmä pre ľudí s problémami s kĺbmi, ako je reuma alebo artritída.

Zníženie rizika pádu: Pre ľudí s problémami s rovnováhou môže stabilný WC nadstavec výrazne znížiť riziko pádu v kúpeľni, ktorá je jednou z najnáchylnejších častí domácnosti na nehody.

KONTRAINDIKÁCIE

- Fyzické alebo mentálne obmedzenia (napr. poruchy zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii.
- Problémy s hygienou: Hoci sú nadstavce na WC navrhnuté na zlepšenie hygieny, niektoré nie sú dostatočne čisté alebo ich používajú viaceré osoby, čo môže viesť k šíreniu baktérií a infekcií. Vždy je dôležité uistiť sa, že nadstavec je riadne vyčistený a vydezinfikovaný.
- Nepohodlie (diskomfort): Niektoré nadstavce môžu byť nepohodlné pre ľudí s určitými zdravotnými problémami, ako sú hemoroidy alebo análne trhliny. V týchto prípadoch môžu tvrdé materiály spôsobiť ďalšie nepohodlie alebo bolesť.
- Znížené zmyslové vnímanie: Ľudia so zníženou zmyslovou kapacitou v dolnej časti tela by si mali dávať pozor na nadstavce, ktoré sú príliš tvrdé alebo príliš studené, čo môže spôsobiť preležaniny alebo iné kožné poranenia.
- Neschopnosť sedieť
- Závažná nerovnováha

FUNKCIE

- Nadstavce na WC sú pohodlné a ergonomické
- Veľká oporná plocha vpredu a vzadu
- Tvarovaný horný povrch nadstavca je prispôsobený tvaru tela.
- Pevná plocha na bezpečnú stabilizáciu
- Mäkká termoplastická guma
- Bočné západky na zavesenie toalety
- Odnímateľný poťah na voliteľné použitie
- S držiakom na bezpečné a stabilné upevnenie na toaletu

MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIE: 180 KG



Tento symbol označuje maximálnu hmotnosť užívateľa!

Veľkosť dĺžka: 39,5 cm, šírka: 36 cm

Hmotnosť: 1,5 kg

OBSAH BALENIA

Nadstavec na WC, návod na použitie

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia (je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

UPOZORNENIE: je zakázané používať výrobok na iný ako určený účel.

UPOZORNENIE:

1. počas používania a montáže a nastavovania mechanizmov môže vzniknúť riziko zachytenia a/alebo stlačenia častí tela používateľa/opatrovateľa v otvoroch/medzerách medzi komponentmi.
2. Po nastavení stabilizujte polohu dotiahnutím matíc/skrutiek.
3. Pred každým použitím výrobku skontrolujte, či sú všetky nastaviteľné časti bezpečne upevnené.
4. Na mokrom alebo klzkom povrchu buďte opatrní.
5. Nevkladajte prsty do otvorov na vypúšťanie vody z nadstavca. Môže to spôsobiť rozdrvenie alebo stlačenie prstov.
6. Nepoužívajte poškodený alebo rozbitý nadstavec na WC.
7. Nadstavec na WC nie je určený na trvalé používanie.

UPOZORNENIE: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedbalým čistením a údržbou alebo v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v tomto návode na použitie.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je táto pomôcka určená (pozri časť o určenom použití pomôcky v tomto návode na použitie). Zariadenie si môže používateľ zakúpiť samostatne alebo na odporúčanie lekára, terapeuta alebo iného odborníka. Bez ohľadu na to, či si pomôcku zakúpite sami alebo na odporúčanie lekára/terapeuta/iného odborníka, musíte vziať do úvahy dostupné veľkosti/potrebné funkcie a varianty pomôcky, indikácie a kontraindikácie používania a informácie poskytnuté výrobcom.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

- (a) stabilizačná záložka
- (b) upevňovacia konzola
- (c) protišmyková ochrana
- (d) motýľová skrutka
- (e) predný a zadný zárez
- (f) kryt
- (g) záves krytu



Najprv nasadíte držadlá so skrutkami do vonkajších montážnych otvorov nadstavca. Rukoväte by mali byť umiestnené vo vzdialenosti väčšej, ako je šírka okraja misky.

Potom zdvihnite záchodové sedadlo a umiestnite nadstavec priamo na misu tak, aby boli montážne úchyty na zadnej strane misy a stabilizačný výstupok na vonkajšej strane prednej strany misy.

Skrutky by sa potom mali uťahovať v smere hodinových ručičiek, kým nepocítite odpor, aby sa nadstavec na mise nepohyboval.



ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Poznámka: Pred každým použitím výrobku vždy skontrolujte, či sú všetky nastaviteľné časti dobre upevnené.

Čistite vlhkou handričkou s použitím neutrálneho čistiaceho prostriedku.

Nepoužívajte vysokotlakové čistiace prostriedky ani agresívne, žieravé čistiace prostriedky.

ÚDRŽBA VÝROBKU:

- Jednoduché čistenie bez vonkajších drsných povrchov
- Nepoužívajte abrazívne alebo drhúce čistiace prostriedky.
- Ak sa vyskytnú akékoľvek závady alebo poškodenia, prestaňte používať výrobok.

Na zabezpečenie dlhodobej a bezpečnej prevádzky výrobku sa odporúča pravidelne kontrolovať všetky skrutky a montážne komponenty. Pred každým použitím výrobku skontrolujte, či sú všetky skrutky správne dotiahnuté a či nie sú viditeľné známky ich uvoľnenia.

Pravidelne kontrolujte, či výrobku nechýbajú žiadne súčasti a či sú všetky komponenty v dobrom stave. Ak spozorujete opotrebenie, mechanické poškodenie alebo chýbajúce časti, okamžite prestaňte výrobok používať a kontaktujte servisné oddelenie výrobcu, aby ste predišli riziku nehody alebo ďalšieho poškodenia.

Dávajte pozor na neobvyklé zvuky alebo vibrácie, ktoré môžu znamenať uvoľnené komponenty alebo iné technické problémy.

Pri výmene skrutiek alebo komponentov nezabudnite používať len originálne diely odporúčané výrobcom.

SKLADOVANIE

Výrobok skladujte v suchej a chladnej miestnosti, mimo vplyvu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania zdravotníckej pomôcky, môže byť zlikvidovaná ako bežný komunálny odpad s výnimkou elektrických výrobkov – postupujte podľa spôsobu likvidácie elektrických a elektronických zariadení. Pre správnu likvidáciu odpadu sa obráťte na miestny úrad alebo na najbližšie zberné miesto odpadu, kde sa dozviете, ako výrobok správne zlikvidovať. Konaním v súlade s miestnymi predpismi pomáhate chrániť životné prostredie.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerazania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

PRVÝ KONTAKT: Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 23.05.2024
v1-23.05.2024