

AT51427

NÁVOD NA POUŽITIE REHABILITAČNÁ KUPOLA



VŠEOBECNÉ UPOZORNENIE

Nepoužívajte výrobok, kým si neprečítate a neporozumiete tomuto návodu. Ak nerozumiete výstrahám, upozorneniam alebo pokynom, obráťte sa na svojho zdravotníckeho pracovníka alebo predajcu, aby nedošlo k poškodeniu výrobku.

KONTRAINDIKÁCIE

fyzické alebo mentálne obmedzenia (napr. poruchy zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii.

OPIS A ÚČEL

Rehabilitačná kupola s expandérmi je zariadenie s veľmi širokou možnosťou cvičenia. Jedna strana sa môže používať ako nafukovacia kupola, ktorá sa pohybuje a ohýba pod tlakom cvičenca, druhá strana sa môže používať ako pevná platforma.

FUNKCIE

Kupola umožňuje všeobecný tréning a možno ju použiť na širokú škálu cvičení, ako je aerobik, fitnes a tréning rovnováhy. Zlepšuje pohybovú koordináciu a pomáha udržiavať rovnováhu.

POUŽITIE

Pri používaní kupoly je možné precvičovať hornú časť tela vďaka priloženým expandérom. Balančná plocha môže mať nastaviteľnú hladinu vzduchu, čo uľahčuje nastavenie náročnosti cvičenia pre začiatočníkov aj pokročilých používateľov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- 2 elastické expandéry, dĺžka: 92 cm
- priemer vyvažovacej plochy: 40 cm
- celkový priemer: 46 cm
- výška: 16 cm (nastaviteľná zhutnením)
- maximálna hmotnosť používateľa: 120 kg



Tento symbol označuje maximálnu hmotnosť užívateľa.

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov spojených v súvislosti s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

POZNÁMKA: Je zakázané používať výrobok inak, ako je určené.

UPOZORNENIE: Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedbalou údržbou, nedostatočným servisom alebo v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Výrobok by sa mal čistiť len vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom. Na čistenie nepoužívajte drsné predmety, rozpúšťadlá ani silné čistiace prostriedky.

SKLADOVANIE

Výrobok by sa mal skladovať na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Zdravotnícky pracovník indikuje použitie pomôcky dospelým a deťom na vlastnú zodpovednosť, pričom zohľadní dostupné varianty/veľkosti/potrebné funkcie/rozмеры a indikácie a zohľadní informácie poskytnuté výrobcom.

SPÔSOB LIKVIDÁCIE VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Po vyradení pomôcky z prevádzky sa zdravotnícka pomôcka môže zlikvidovať ako bežný komunálny odpad.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

 ANSTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 05.12.2022

v1-1 05.12.2022