

AT52104

NÁVOD NA POUŽITIE, PENOVÁ PODLOŽKA NA MATRAC



Ďakujeme za zakúpenie nášho produktu. Prosíme, aby ste si dôkladne prečítali návod na použitie. Výrobok nepoužívajte, kým si tento návod neprečítate a neporozumiete mu. Ak nerozumiete upozorneniam, pokynom alebo odporúčaniam, obráťte sa na odborníka v oblasti zdravotnej starostlivosti alebo na predajcu, aby ste predišli poškodeniu výrobku alebo zraneniu.

UPOZORNENIE: Skontrolujte všetky časti, či nie sú poškodené počas prepravy. V prípade zistenia takýchto poškodení výrobok **NEPOUŽÍVAJTE**. Viac informácií vám poskytne predajca.

POUŽITIE:

poskytuje používateľovi vynikajúcu podporu a pohodlie
podporuje prevenciu a liečbu preležanín
štruktúra matraca s výstupkami na celej ploche stimuluje krvný obeh a zabraňuje dlhodobému tlaku na jednu časť tela

VLASTNOSTI

matrac je vyrobený z netoxickej a antialergickej polyuretánovej peny
určený ako podložka na matrac
ideálny pre domáce aj nemocničné použitie
maximálne zaťaženie 100 kg
rozmery: 200 x 90 x 5 cm



Tento symbol označuje maximálnu hmotnosť používateľa.

KONTRAINDIKÁCIE

fyzické alebo mentálne obmedzenia (napr. zrakové postihnutie), ktoré zabraňujú bezpečnému používaniu produktu.

OBSAH BALENIA:

Podložka na matrac, návod na použitie.

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia,

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením!

UPOZORNENIE

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním údržby, nesprávnym servisom alebo nedodržaním odporúčaní uvedených v tomto návode na použitie.

UPOZORNENIE

Vyhňte sa kontaktu s ohňom.

UPOZORNENIE

Používanie výrobku je zakázané pre deti mladšie ako 3 roky. Mäkká štruktúra peny môže vážne narušiť dýchanie dieťaťa, ak leží v polohe na bruchu.

UPOZORNENIE: Matrac nechráni úplne pred vznikom preležanín u osôb, ktoré zostávajú dlhodobo v ležiacej polohe bez pohybu (napr. ochrnuté osoby, pacienti po mozgovej príhode, osoby v bezvedomí).

SKLADOVANIE

Skladujte na suchom a chladnom mieste, mimo priameho slnečného svetla.

ČISTENIE

Potrebné vybavenie:

Jemný čistiaci prostriedok alebo prostriedok na riad

Teplá voda

Jedlá sóda (voliteľne na dezodorizáciu)

Vysávač (najlepšie s mäkkou kefou)

Rozprašovač

Mäkká handrička alebo špongia

Enzymatický čistič (voliteľne na odstraňovanie škvŕn)

Kroky čistenia:

1. Vysávanie peny:

Odstráňte prach a nečistoty: Použite vysávač s mäkkou kefou, aby ste jemne vysali povrch peny a odstránili prach a nečistoty pred mokrým

čistením.

2. Čistenie s jemným čistiacim prostriedkom:

Zmiešajte čistiaci prostriedok: Zmiešajte niekoľko kvapiek jemného čistiaceho prostriedku s teplou vodou v rozprašovači.

3. Jemne nastriekajte penu: Vyhnite sa premočeniu peny. Ľahko nastriekajte znečistené miesto roztokom.

4. Odsajte škvrny: Použite mäkkú handričku alebo špongiu a jemne osušte oblasť. Netrite, pretože to môže poškodiť štruktúru peny.

5. Opláchnite miesto: Ak je to potrebné, ľahko nastriekajte čistú vodu na odstránenie zvyškov čistiaceho prostriedku.

Odstránenie ťažkých škvŕn:

Biologické škvrny alebo moč: Použite enzymatický čistič. Jemne aplikujte čistiaci prostriedok na škvrnu, nechajte pôsobiť (podľa pokynov na produkte) a potom osušte čistou handričkou.

Mastné škvrny: Použite malé množstvo prostriedku na riad alebo špeciálneho čističa na čalúnenie, vhodného pre penové materiály.



Čistenie (voliteľne):

Jedlú sódu: Posypte vrstvu jedlej sódy na penu a nechajte pôsobiť niekoľko hodín alebo cez noc, aby pohltila zápachy.

Po uplynutí času vysajte jedlú sódu.

Sušenie peny:

Úplne vysušte na vzduchu: Pena je veľmi savá, takže môže trvať určitý čas, kým úplne vyschne. Umiestnite ju na dobre vetrané miesto.

Použite ventilátor na urýchlenie procesu: Nikdy nepoužívajte priame teplo, ako je sušič vlasov, pretože môže poškodiť penu. Najlepšie je použiť studený ventilátor.

Pred opätovným použitím sa uistite, že je pena úplne suchá, aby sa zabránilo tvorbe plesní.



Čomu sa vyhnúť:

Nikdy neponárajte penu do vody, pretože je ťažké ju vysušiť a môže sa poškodiť.

Vyhnite sa používaniu silných chemikálií, ako je bielidlo alebo alkoholové čistiace prostriedky, ktoré môžu oslabiť štruktúru peny.

Žiadne priame teplo: Teplo môže poškodiť štruktúru pamäťovej peny, takže sa vyhnite sušeniu v sušičke alebo používaniu horúceho vzduchu.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania možno zdravotnícky výrobok zlikvidovať ako bežný komunálny odpad. Dbajte na pravidlá recyklácie, chráňte životné prostredie.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby s ochoreniami, dysfunkciami alebo úrazmi, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je tento výrobok určený (pozri časť o účele výrobku v tomto návode na použitie). Výrobok môže byť zakúpený samostatne užívateľom alebo na odporúčanie lekára, terapeuta alebo iného odborníka. Bez ohľadu na spôsob obstarania výrobku je potrebné zohľadniť dostupné veľkosti/požadované funkcie a varianty, indikácie a kontraindikácie používania, ako aj informácie poskytnuté výrobcom.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

 ANTAR Sp. J.
ul. Zawisłańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

PRVÝ KONTAKT: Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16

Dátum vydania návodu: 04.06.2024
v1-04.06.2024

