

AT52202

**NÁVOD NA POUŽITIE, BOČNÁ ZÁBRANA K NEMOCNIČNEJ POSTELI PROTI
VYPADNUTIU**



Ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Prosíme vás, aby ste si pozorne prečítali tento návod na použitie. Výrobok nesmie byť používaný predtým, ako sa s návodom oboznámite a porozumiete mu. Ak nerozumiete upozorneniam, poznámkam alebo odporúčaniam, kontaktujte odborníka v oblasti zdravotnej starostlivosti alebo predajcu, aby ste predišli poškodeniu výrobku alebo zraneniu.

UPOZORNENIE: Skontrolujte všetky časti z hľadiska poškodenia počas prepravy. Ak spozorujete akékoľvek poškodenie, **VÝROBOK NESMIE BYŤ POUŽÍVANÝ**. Viac informácií získate u predajcu.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace ochoreniami, dysfunkciami alebo úrazmi, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je tento výrobok určený (pozri časť o použití výrobku v tomto návode).

Výrobok môže byť zakúpený samostatne používateľom alebo na základe odporúčania lekára, terapeuta či iného odborníka. V oboch prípadoch je potrebné zvážiť dostupné veľkosti, požadované funkcie a varianty výrobku, indikácie a kontraindikácie na použitie, ako aj informácie poskytnuté výrobcom.

POUŽITIE / INDIKÁCIE

Bočné zabezpečenie k nemocničnému lôžku proti vypadnutiu je súčasťou vybavenia nemocničných, rehabilitačných a opatrovateľských postelí a slúži na:

Preveniu náhodného vypadnutia pacienta z postele.

Zvýšenie bezpečnosti osôb so zníženou pohyblivosťou alebo problémami s koordináciou pohybov.

Stabilizáciu pacienta počas spánku alebo odpočinku a zníženie rizika pádu.

Podporu opatrovateľov pri zabezpečovaní pohodlia a bezpečnosti starších, postihnutých alebo zranených osôb.

Pomoc pacientom pri zmene polohy – napríklad pri sadaní alebo vstávaní z postele.

Indikácie:

Pacienti s obmedzenou pohyblivosťou

Starší ľudia

Pacienti po operáciách

Osoby s demenciou alebo poruchami kognitívnych funkcií

Pacienti s epilepsiou

Osoby s poruchami spánku

Pacienti v rehabilitácii

KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo mentálne obmedzenia (napr. zrakové postihnutie), ktoré znemožňujú bezpečné používanie výrobku.

Pacienti so sklonom liezť z postele alebo ju opúšťať bez pomoci – môže dôjsť k úrazu pri pokuse o preskočenie alebo prekonanie zábrany.

Pacienti s poruchami správania alebo úzkosťami – môžu zábranu vnímať negatívne a snažiť sa ju odstrániť.

Pacienti s výraznou psychomotorickou aktivitou – môžu sa snažiť zabezpečenie odstrániť alebo poškodiť.

Pacienti vyžadujúci častý prístup personálu – zábrany môžu sťažovať rýchly prístup pri urgentných situáciách.

Osoby s netypickými telesnými proporciami – hrozí riziko zachytenia končatín medzi prvkami zábrany.

Nevhodné prispôbenie zariadenia – zle namontované alebo nekompatibilné zábrany môžu viesť k nestabilite a riziku zlyhania.

Poruchy pohybu – napríklad spasticita môže spôsobiť zakliesnenie v zábrane.

OBSAH BALENIA

Hlavný rám, rám s úchytom, svorky, popruhy, návod na použitie

VLASTNOSTI A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Jednoduchá montáž

Jednoduché používanie

Rozmery rámu: 53 × 51 cm

Šírka úchytu: 27 cm

Celková výška: 52 cm

Hmotnosť výrobku: 2,25 kg

Materiál: oceľ, pena, textília(polyester)

Maximálna nosnosť používateľa: 100 kg



Tento symbol označuje maximálnu hmotnosť používateľa.

MONTÁŽ

Obrázok 1:

Na ráme (časť B) sa nachádzajú 2 čierne krytky. Odstráňte tieto krytky z rámu.

Obrázok 2:

Po odstránení krytiel nasadte pracku (časť C) na rúrky na oboch stranách rámu. Potom krytky znovu nasadte späť.

Obrázok 3:

Na druhej strane rámu (časť B) pripevnite popruh (časť D) na obe strany pomocou zacvakávacích spon.

Obrázok 4:

Vložte rám s úchytom (časť A) do vodorovného rámu (časť B). Pomocou popruhov môžete podperu pripevniť k matracu alebo k posteli.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE K PRIPEVNENIU OPIERKY


Bočnú opierku je možné pripevniť pomocou popruhov buď k rámu postele, alebo priamo k matracu. Pri upevnení k matracu je potrebná zvýšená opatrnosť.

Upozornenie:

Pacienti so zvýšeným rizikom vzniku preležanín (napr. imobilní, osoby s obmedzenou pohyblivosťou alebo neurologickým ochorením) by nemali ležať priamo na popruhoch.

Na zníženie rizika poškodenia pokožky:

použite dodatočnú odľahčovaciu podložku, alebo pripevnite opierku k rámu postele, nie k matracu. Nedodržanie týchto odporúčaní môže viesť k lokálnemu tlaku a poškodeniu pokožky.

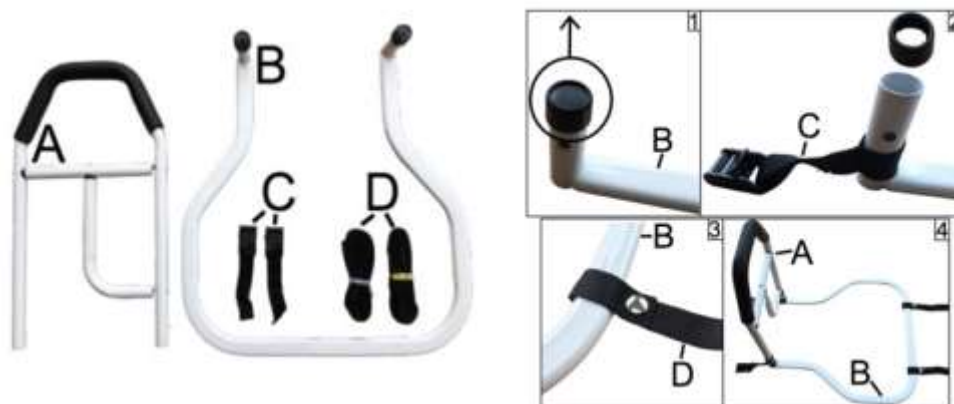

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu „závažnej udalosti“ spojenej s výrobkom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla viesť alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich situácií:

- a) úmrtiu pacienta, používateľa alebo inej osoby,
- b) dočasnému alebo trvalému zhoršeniu zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo inej osoby,
- c) vážnemu ohrozeniu verejného zdravia,

je potrebné túto „závažnú udalosť“ nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko.

Na Slovensku je týmto orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

UPOZORNENIE:

V prípade bolesti, alergických reakcií alebo iných znepokojujúcich, nejasných príznakov súvisiacich s používaním zdravotníckej pomôcky sa obráťte na zdravotníckeho pracovníka.

UPOZORNENIE:

Používanie výrobku iným spôsobom, než na aký je určený, je zakázané.

ČISTENIE

Čistenie a dezinfekcia sa majú vykonávať pravidelne. Používajte jemné mydlové čistiace prostriedky, vyhýbajte sa abrazívnym materiálom. Je možné použiť bežné dezinfekčné metódy. Nepoužívajte parné čističe ani chemikálie obsahujúce agresívne látky.

Starajte sa o svoje zariadenie pravidelnou kontrolou jeho technického stavu. Nesprávne fungujúce časti výrobku môžu viesť k nebezpečným situáciám. Pravidelné kontroly, správne nastavenie a včasná výmena opotrebovaných alebo poškodených častí zabezpečia dlhodobé a bezproblémové používanie.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte ani nemontujte diely od externých dodávateľov!

SKLADOVANIE

Výrobok skladujte na suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.

LIKVIDÁCIA

Po vyradení z používania sa výrobok má zlikvidovať ako bežný komunálny odpad. Dodržiavajte predpisy týkajúce sa triedenia odpadu. Chráňte životné prostredie.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.
ul. Zawisłańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

PRVÝ KONTAKT: Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 04.02.2025

v1-04.02.2025