

AT52309

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA INVALIDNÉHO VOZÍKA



Po vybalení skontrolujte, či sú všetky komponenty bez viditeľných mechanických poškodení, inak kontaktujte výrobcu.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

- 1) Do vozíka nastupujte a z neho vystupujte len s nastavenými a zatiahnutými brzdami;
 - 2) Nepoužívajte brzdy počas jazdy (iba pri státi)!
 - 3) Pri nakláňaní dopredu dbajte na to, aby sa váha vášho tela neposunula príliš dopredu. Ak chcete zvýšiť stabilitu vozíka, pred naklonením dopredu sa uistite, že predné kolesá smerujú dopredu!
 - 4) Nenakláňajte sa príliš dopredu a nenakláňajte sa z vozíka do strán!
 - 5) Invalidný vozík používajte len na povrchoch, kde sú všetky štyri kolesá vozíka v kontakte so zemou a tento kontakt umožňuje kolesám pohon.
 - 6) Pohybujte sa s invalidným vozíkom tak, že sa chytíte konštrukcie rámu. Nikdy vozík neprenášajte za iné časti vozíka.
 - 7) Nepoužívajte, ak je viditeľné alebo citeľné poškodenie, alebo ak stupeň opotrebovania ktorejkoľvek časti vozíka naznačuje potenciálne riziko nehody (opotrebovanie kolies, poškodenie, poškodenie čalúnenia).
 - 8) Pri skladaní/rozkladaní kočíka treba dbať na osobitnú opatrnosť, nedostatočná pozornosť môže viesť k riziku zachytenia prstov pohyblivými časťami kočíka.
 - 9) Pri nastupovaní a vystupovaní z vozíka nestojte na podnožkách, pretože to môže viesť k prevráteniu vozíka;
 - 10) Pri prejazde cez prahy alebo iné prekážky je potrebné dbať na mimoriadnu opatrnosť pri prenášaní celej hmotnosti na zadné kolesá. V prípade akýchkoľvek obáv, či je možné tento manéver bezpečne vykonať, je nevyhnutné požiadať o pomoc druhú osobu.
- UPOZORNENIE:** Nesprávne alebo neopatrné prenesenie záťaže na zadné kolesá môže viesť k prevráteniu vozíka dozadu, čo je veľmi nebezpečná udalosť a môže spôsobiť vážne zranenia! Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či bude možné bezpečne prekonať prekážku, bezpodmienečne požiadajte o pomoc druhú osobu!
- 11) Pri premiestňovaní vozíka dávajte pozor, aby sa vaše prsty nedostali medzi špice. Mohlo by to viesť k poraneniu rúk.
 - 12) Pri jazde v stúpaní dbajte na zvýšenú opatrnosť a nedovoľte, aby invalidný vozík zrýchľoval. Ak zistíte, že je ťažké bezpečne prekonať stúpanie, je nevyhnutné, aby ste požiadali o pomoc inú osobu.
 - 13) Zabráňte kontaktu vozíka s otvoreným ohňom. Ak sa textilné, plastové a gumové časti dostanú do priameho kontaktu s ohňom, môžu sa vznietiť.

ČISTENIE/ÚDRŽBA/SKLADOVANIE

- Pravidelne kontrolujte stav vozíka a údržbu pomocou:

- a) kontrola stavu pneumatík - ak vykazujú silné opotrebenie, mali by sa súčasne vymeniť;
- b) kontrolou utiahnutia skrutiek spojovacích častí;
- c) čistenie vozíka od nečistôt vlhkou handričkou;
- d) čistenie čalúnenia vlhkou handrou, prípadne jemným čistiacim prostriedkom;
- e) na zachovanie výkonu výrobku je mimoriadne dôležité udržiavať všetky časti vozíka čisté a vozík správne skladovať. Skladovanie vozíka v miestnostiach s veľmi vysokou vlhkosťou (práčovne atď.) alebo na čerstvom vzduchu spôsobí rýchlu stratu jeho úžitkových vlastností. Vozík skladujte v suchej a chladnej miestnosti mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
- f) Nevystavujte kočík extrémnym poveternostným podmienkam (dážď, slnko, sneh).
- g) nepoužívajte rozpúšťadlá, prostriedky obsahujúce chlór, ostré kedy a iné čistiace predmety alebo korozívne čistiace prostriedky.

MONTÁŽ/MANIPULÁCIA

1. Po vybalení vyberte vozík a skontrolujte výrobok, či nie je poškodený.
2. Rozložte operadlo, kým sa neozve charakteristické cvaknutie.
3. pomocou dvoch rúk rozložte rám kočíka do strán, stlačte sedadlo nadol, aby sa kočík úplne rozložil.
4. Zahákajte opierky nôh do pripravených otvorov a otočením ich zaistíte na mieste.
5. Nasadte dosku na opierky nôh a naskrutkujte maticu/kľučku.
6. Zadné koleso môžete v prípade potreby voľne odňať pomocou rýchlopúínača.
7. Na zabrzdzenie zatlačte brzdovú páku dopredu.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.

POZNÁMKA:

Všetky vyššie uvedené kroky sa musia vykonať v opačnom poradí.

JAZDA NA INVALIDNOM VOZÍKU/PRIŠTUP K PREKÁŽKAM:

- Pri výbere invalidného vozíka, s cieľom zakúpiť najlepší model, odporúčame vyhľadať lekársku pomoc.
- Ak z akéhokoľvek dôvodu nie ste schopní na invalidnom vozíku prekonať prekážku, mali by ste požiadať o pomoc inú osobu. Pokusy prekonať prekážku samostatne môžu viesť k prevráteniu invalidného vozíka a zraneniu.
- Zjazd z malého prahu - umiestnite sa dopredu, kolmo na os prahu, uistite sa, že opierky nôh neprekrývajú zem a zjazd z prahu. Vyhnite sa nakloneniu dopredu;
- pri strmých prekážkach alebo schodoch vždy požiadajte o pomoc;

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- šírka sedadla (mm): 450 / 430
- výška sedadla (mm): 490
- hĺbka sedadla (mm): 410
- celková dĺžka (mm): 1070
- výška operadla (mm): 370
- celková šírka (mm): 660 / 630
- šírka po sklopení (mm): 335
- priemer predného kolesa ("): 8
- Priemer zadného kolesa ("): 8 24
- maximálne zaťaženie (kg): 136
- veľkosť balenia (mm): 820*355*780
- čistá hmotnosť (kg): 13 / 12,6



TENTO SYMBOL OZNAČUJE MAXIMÁLNU HMOTNOSŤ POUŽÍVATEĽA

UPOZORNENIE:

- kočík má sklápací rám - skladá sa zatiahnutím strednej časti sedadla smerom nahor a rozkladá sa stlačením bočných častí sedadla smerom nadol. Uistite sa, že boky sedadla presne spočívajú v plastových háčikoch. Pri nepresnom rozložení sedadla môže dôjsť k prelomeniu úchytov a poškodeniu vozíka.

UPOZORNENIE:

V prípade "vážneho incidentu" súvisiaceho so zariadením, ktorý priamo alebo nepriamo viedol, mohol viesť alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- (a) úmrtie pacienta, používateľa alebo inej osoby, alebo
- (b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo inej osoby, alebo
- (c) vážne riziko pre verejné zdravie

tento "závažný incident" sa musí oznámiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko.

V prípade Poľska je príslušným orgánom Úrad pre registráciu liekov, zdravotníckych pomôcok a biocídnych výrobkov.

POZNÁMKA:

V prípade bolesti, alergických reakcií alebo iných znepokojujúcich, používateľovi nejasných príznakov súvisiacich s používaním zdravotníckej pomôcky sa poraďte so zdravotníckym pracovníkom.

UPOZORNENIE: Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedbalou údržbou, nedostatočným servisom alebo v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením!

UPOZORNENIE: Počas používania a manipulácie s výrobkom a pri montáži a nastavovaní mechanizmov môže hroziť nebezpečenstvo zachytenia a/alebo stlačenia častí tela používateľa/spoločníka v otvoroch/medzerách medzi komponentmi. Tieto operácie vykonávajte obzvlášť opatrne.

POZNÁMKA: Pri nesprávnom používaní výrobku môže hroziť riziko prevrátenia. Dodržiavajte odporúčania týkajúce sa nastupovania/vystupovania/prevracania. Po dokončení nastavenia stabilizujte polohy opatrným dotiahnutím matíc/šroubov.

ÚČEL

Invalidný vozík je určený na mobilitu zdravotne postihnutej osoby alebo osoby s pohybovými ťažkosťami.

KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo mentálne obmedzenia (napr. poruchy zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Zdravotnícky pracovník na vlastnú zodpovednosť uvedie použitie pomôcky pre dospelých a deti, pričom zohľadní dostupné varianty/veľkosti/potrebné funkcie/rozmery a indikácie, pričom má na pamäti informácie poskytnuté výrobcom.

AKO ZLIKVIDOVAŤ VÝROBK PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Po vyradení zdravotníckej pomôcky z používania ju možno zlikvidovať ako bežný komunálny odpad.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 02.03.2023
v1-02.03.2023