

AT52334

NÁVOD NA POUŽITIE, INVALIDNÝ VOZÍK, ELEKTRICKÝ, S MOŽNOSŤOU



MD

CE

ĎAKUJEME ZA NÁKUP NÁŠHO PRODUKTU.

Prosíme vás, aby ste sa dôkladne oboznámili s návodom na použitie. Výrobok nepoužívajte pred tým, ako si prečítate tento návod a porozumiete jeho obsahu. Ak nerozumiete varovaniam, poznámkam alebo odporúčaniam, obráťte sa na odborníka v oblasti zdravotnej starostlivosti alebo na predajcu, aby ste predišli poškodeniu výrobku alebo úrazu.

UPOZORNENIE:

Skontrolujte všetky časti, či nie sú poškodené počas prepravy. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, **NEPOUŽÍVAJTE** výrobok. Ďalšie informácie získate u predajcu.

CIELOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby, ktoré trpia ochoreniami, dysfunkciami alebo úrazmi, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je tento výrobok určený (pozri časť o určení výrobku v tomto návode na použitie). Výrobok môže byť zakúpený priamo užívateľom alebo na základe odporúčania lekára, terapeuta alebo iného špecialistu.

Či už si výrobok zakúpite sami, alebo na odporúčanie odborníka, je potrebné zohľadniť dostupné veľkosti/požadované funkcie a varianty výrobku, indikácie a kontraindikácie jeho použitia, ako aj informácie poskytnuté výrobcom.

POUŽITIE

Výrobok je určený na premiestňovanie osôb so zdravotným postihnutím, ktoré majú obmedzenú schopnosť pohybu alebo úplne stratili schopnosť chôdze.

Invalidný vozík slúži ako podpora pre chôdzu osôb s obmedzenou mobilitou, predovšetkým v interiéri (ovládaný joystickom alebo opatrovateľom), ale aj v exteriéri (ovládaný opatrovateľom alebo joystickom, s obmedzeniami uvedenými v tomto návode).

Vozík je vhodný na chôdzu, jazdu a tlačenie na tvrdých, rovných povrchoch. V režime chodítka môže užívateľ odpočívať na sedadle.

Invalidný vozík je možné prestavať na chodítko. Používateľ môže sedieť na sedadle a využívať systém elektrickej asistencie, buď pri tlačení s podporou, alebo sa prepravovať sám pomocou joysticku.

INDIKÁCIE

- **Závažné pohybové obmedzenia:** Osoby s vážnymi obmedzeniami svalovej sily, napríklad v dôsledku neurologických ochorení, svalových ochorení alebo bolestivých syndrómov, ktoré znemožňujú alebo výrazne sťažujú samostatný pohyb.
- **Neurodegeneratívne ochorenia:** Osoby s ochoreniami, ako sú roztrúsená skleróza, Parkinsonova choroba, svalová dystrofia alebo ALS, ktoré vedú k postupnej strate kontroly nad svalmi a silou.
- **Únava:** Osoby, pre ktoré je dlhodobý pohyb alebo manuálne ovládanie invalidného vozíka príliš náročné z dôvodu ochorenia alebo zdravotného stavu, čo vedie k rýchlej únave a vyčerpaniu.
- **Vekové obmedzenia:** Starší ľudia, ktorí majú z dôvodu veku obmedzenú mobilitu a silu, môžu využívať elektrický invalidný vozík na zachovanie samostatnosti a schopnosti pohybu.
- **Rehabilitácia a rekonvalescencia:** Osoby počas rehabilitácie po úrazoch alebo operáciách, ktoré dočasne nemôžu chodiť, môžu používať elektrický invalidný vozík ako súčasť liečby a návratu k zdraviu.

KONTRAINDIKÁCIE

- Fyzické alebo mentálne obmedzenia (napr. zrakové postihnutie), ktoré znemožňujú bezpečné používanie výrobku.
- Osoby, ktoré majú problémy s odhadovaním vzdialeností alebo priestoru, môžu mať ťažkosti s bezpečným ovládaním elektrického vozíka.
- Invalidné elektrické vozíky vyžadujú určitú manuálnu zručnosť a koordináciu na ovládanie joysticku alebo iných riadiacich zariadení. Osoby, ktoré tieto zariadenia nedokážu efektívne ovládať, nemusia byť schopné bezpečne používať vozík.
- Napriek tomu, že mnohí ľudia s kognitívnymi poruchami môžu bezpečne používať invalidné vozíky, niektoré závažné poruchy môžu znemožniť bezpečné ovládanie zariadenia.
- Osoby, ktoré nedokážu udržať stabilnú sedáciu polohu, môžu potrebovať dodatočné podporné systémy na bezpečné používanie invalidného elektrického vozíka.
- **Epilepsia** alebo iné stavy, ktoré môžu viesť k náhlemu zhoršeniu vedomia alebo reakcií, môžu predstavovať kontraindikáciu.
- Ak má osoba problémy s motorickou koordináciou alebo nie je schopná samostatne ovládať riadenie vozíka, môže to byť kontraindikácia.
- Osoby s poruchami vedomia, ktoré ovplyvňujú ich schopnosť bezpečne riadiť vozík, by ho nemali používať.
- V niektorých prípadoch môžu závažné problémy so srdcom alebo krvným tlakom obmedziť možnosť bezpečného používania elektrického invalidného vozíka, najmä ak emócie alebo stres môžu vyvolať nežiaduce reakcie.
- Problémy s vnímaním hĺbky, priestoru alebo orientáciou môžu výrazne obmedziť bezpečné používanie elektrického invalidného vozíka.
- Zlá fyzická kondícia alebo nedávne operácie, najmä v oblasti chrbtice alebo dolných končatín, môžu vyžadovať odloženie používania invalidného vozíka, až kým sa zdravotný stav nezlepší.
- **DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE**
 - Používajte výrobok podľa pokynov, aby ste neohrozili svoju bezpečnosť ani bezpečnosť osôb vo svojom okolí.
 - V tomto návode sa spomína elektrický asistenčný systém, ktorý obsahuje joystick na ovládanie a tlačidlo asistencie na riadenie motorov v kolesách.
 - Na nabíjanie vozíka používajte iba dodanú nabíjačku.

- Používajte len originálne príslušenstvo; používanie neautorizovaného príslušenstva môže byť nebezpečné a ruší záruku.
- Na opravy a výmenu dielov používajte iba originálne diely schválené autorizovaným predajcom. Iné diely môžu byť nebezpečné a rušia záruku.
- Poškodenia spôsobené preťažením výrobku alebo nesprávnym skladaním a rozkladaním nielenže rušia záruku, ale môžu tiež spôsobiť nebezpečné situácie.
- Horľavé materiály: vyhnite sa kontaktu s otvoreným ohňom alebo iskrami. Chráňte batériu pred kontaktom s horľavými materiálmi.
- Vozík je určený na podporu/transport jednej osoby naraz.
- Vždy používajte rukoväť v správnej polohe.
- Pravidelne kontrolujte a/alebo nastavujte brzdy, aby ste predišli strate brzdného sily.
- Skontrolujte, či sú všetky zdroje napájania pripojené a či elektrické komponenty vrátane batérie nie sú poškodené pred prvým použitím. Poškodené alebo nesprávne pripojené diely môžu predstavovať hrozbu alebo nebezpečné situácie.
- Ovládanie joystickom funguje dobre na hladkom povrchu, ale nemusí stačiť na efektívne manévrovanie v náročnejších terénnych podmienkach.
- Pri sedení vo vozíku a používaní joysticku na kontrolu elektrickej asistencie vždy nastavte rukoväť do polohy vozíka, s rukoväťami nad rámom, aby ste mohli v prípade potreby siahnuť na ručné brzdy.
- Elektrická podpora ovládaná tlačidlom asistencie môže byť použitá vonku na povrchoch, ktoré sú v tomto návode označené ako bezpečné.
- Pri sedení vo vozíku a používaní elektrickej asistencie joystickom sa pohybujte iba na svahoch so sklonom do 6°.
- Pri vedení vozíka sú sklony nasledovné: 15° pri zostupe, 7° pri stúpaní a 3,5° pri bočných náklonoch.
- Pravidelne kontrolujte stav nabitia batérie na obrazovke joysticku alebo indikátore asistencie, aby ste vedeli, kedy je potrebné ju nabiť.
- Uchovávajte nástroje a iné kovové predmety mimo dosahu batérie – kontakt s pólmi môže spôsobiť skraty alebo zásah elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že ste si pred použitím dobre oboznámili so všetkými funkciami vozíka.
- Uistite sa, že vozík je vypnutý, keď ho nepoužívate.
- Ak vozík nepoužívate dlhší čas, uistite sa, že je batéria pred opätovným použitím nabitá.

UPOZORNENIA

- Použitie joysticku vonku je obmedzené na maximálny bezpečný sklon 6°, maximálnu výšku prekážok 15 mm a maximálnu nerovnosť povrchu 10 mm. Prekročenie týchto limitov môže viesť k nebezpečným situáciám.
- Užívatelia musia mať fyzickú schopnosť vykonávať všetky operácie popísané v tomto návode. Ak to nie je možné, mali by vždy využívať pomoc.
- Nepoužívajte vozík, ak je akákoľvek jeho časť poškodená, prasknutá, zlomená, chýba alebo ak displej zobrazuje chybový kód.
- Pred použitím sa uistite, že všetky komponenty sú správne upevnené.
- Uchovávajte vozík mimo dosahu otvoreného ohňa a iných zdrojov tepla, ako sú cigarety, elektrické alebo plynové ohrievače.
- Používateľ nesmie zostať vo vozíku počas prepravy taxíkom, autobusom, autom alebo inými vozidlami.
- Šírka vozíka môže byť obmedzená pri používaní evakuačných trás.
- Maximálny dojazd pri použití joysticku alebo tlačidla asistencie je 10 kilometrov. Dojazd sa zníži na svahoch, nerovných povrchoch a pri prekonávaní obrubníkov. Dojazd je ovplyvnený aj hmotnosťou užívateľa, typom povrchu, stavom batérie a spôsobom jazdy.
- Vozík nie je určený na použitie na pláži.
- Odporúčame použitie bezpečnostného pásu pri sedení vo vozíku.
- Elektrické zariadenia, ako sú invalidné vozíky, môžu byť náchylné na elektromagnetické rušenie (EMI), ktoré pochádza z vysielateľov, televíznych staníc, rádiových staníc, amatérskych vysielateľov, obojsmerných rádii a mobilných telefónov. Tieto zdroje môžu spôsobiť interferenciu s komponentmi vozíka alebo inými zariadeniami. Rušenie môže spôsobiť neočakávané pohyby vozíka, napríklad uvoľnenie brzd. Ak sa vozík začne pohybovať v dôsledku elektromagnetického rušenia, okamžite ho vypnite a počkajte, kým bude bezpečné ho opäť použiť.

NEVHODNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA

- Pred nástupom na palubu lietadla je potrebné vybrať batériu z vozíka a zabezpečiť ju proti skratovaniu izolovaním pólov (napr. prelepením). Batériu je potrebné zabaliť samostatne do ochranného cestujúcim. Predtým sa skontaktujte s leteckou spoločnosťou a získajte podrobnosti.
- Vozík nie je prispôbený na zdolávanie schodov ani na používanie v nerovných terénoch, ako sú štrk, tráva, piesok, blato alebo lesná pokrývka.
- Nepoužívajte eskalátory, keď sedíte vo vozíku.
- Nepoužívajte ani neparkujte vozík na daždi, snehu alebo v iných vlhkých podmienkach.
- Nepoužívajte vozík v sprche.
- Nepoužívajte vozík na cestách, na ktorých sa používa soľ.
- Nepribližujte sa s vozíkom príliš blízko k vode (napr. k priekopám, rybníkom, riekam, jazerám ani moru).
- Nepoužívajte vozík na povrchoch pokrytých snehom, ľadom, vodou ani olejom.
- Ak sa ocitnete na šmyklavom povrchu, buďte opatrní a ak niektoré z kolies stratí trakciu, okamžite zastavte vozík.
- Nevystavujte vozík teplotám pod -5 °C ani nad 45 °C.

ELEKTROMAGNETICKÉ RUŠENIE

Rušenie z elektronických zariadení môže spôsobiť situácie, keď vozík nereaguje normálne. Zariadenia ako vysielacie stožiare, rádiové stanice, televízne stanice a mobilné telefóny môžu vytvárať magnetické pole, ktoré môže trvalo poškodiť elektrický systém alebo brzdy.

- Nepoužívajte bezdrôtové zariadenia počas používania elektrického asistenčného systému.
- Držte sa ďalej od zdrojov rádiového signálu.
- Okamžite vypnite vozík, ak spozorujete nekontrolované pohyby.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Hmotnosť: 19 kg

Rozmery rozloženého invalidného vozíka (maximálna výška, dĺžka, šírka): 96 x 88 x 67 cm

Minimálna výška: 79 cm

Rozmery zloženého invalidného vozíka (výška, dĺžka, šírka): 79 x 66 x 32 cm

Rozmery sedadla (výška, hĺbka, šírka): 52 x 30 x 42 cm

Predné a zadné kolesá: 8 palcov, plné

Dojazd: ≤ 10 km

Maximálna rýchlosť: 5 km/h

Maximálna hmotnosť užívateľa: 100 kg

Vzdialenosť medzi rukoväťami: 54 cm

Výkon motora: 160 W *2

Batéria: 24 V 12 A lítiová

Nabíjačka a maximálny výstupný prúd: AC100-240V 50-60HZ 2A

Hladina hluku: <65 dB

Brzdová dráha: <100 cm

Brzdy: elektrické a ručné

Rám: hliník

Zadné koleso: hliníková zliatina a guma

Predné koleso: TPR + PP

Košík pod sedadlom: PU

Poduška: PU pena + tkanina 600D oxford

Lakťová opierka: PU

Opierka: PE + pena + elastická tkanina

Podnožka: oceľ + plastová podnožka




Tento symbol označuje maximálnu hmotnosť užívateľa.

Uvedené rozmery sa môžu líšiť v rozsahu ±2 cm.

Dojazd sa môže znížiť, ak je vozík často používaný na svahoch, v náročnom teréne alebo pri prekonávaní obrubníkov. Brzdová dráha na svahoch môže byť výrazne dlhšia ako na rovinnom teréne.

ZOZNAM SÚČASTÍ

Elektrický invalidný vozík, Lakťová opierka, Poduška sedadla, Košík pod sedadlom, Regulátor motora, Opierka, Regulátor asistencie opatrovateľa, Regulátor joysticku, Lítiový akumulátor, Motor kolies (x2), Nastaviteľné podnožky (x2), Návod na použitie.

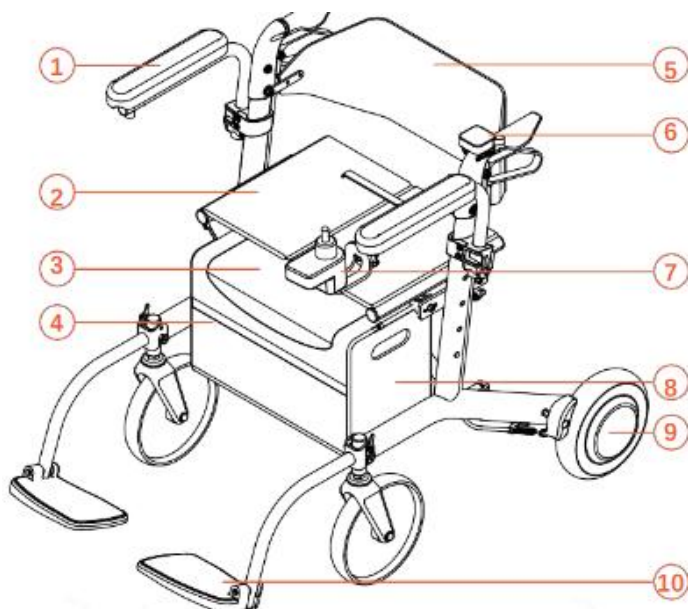

1. Lakťová opierka
2. Poduška sedadla
3. Košík pod sedadlom
4. Regulátor motora
5. Opierka
6. Regulátor asistencie opatrovateľa
7. Regulátor joysticku

- 8. Litiový akumulátor
- 9. Motor kolies (x2)
- 10. Nastaviteľné podnožky (x2)

POUŽÍVANIE JOYSTICKU

Sedíte vo vozíku a môžete aktivovať elektrický systém asistencie stlačením tlačidla „Zapnúť“ na prednom ovládacom paneli.

- 1. Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť
- 2. Úroveň batérie
- 3. Tlačidlo klaksónu
- 4. Tlačidlo zvýšenia rýchlosti
- 5. Úroveň rýchlosti
- 6. Tlačidlo zníženia rýchlosti
- 7. Joystick



Predný ovládač joysticku zobrazuje úroveň batérie od úrovne 1 (menej ako 20 % / 1 svetlo) po úroveň 5 (viac ako 80 % / 5 svetiel) na ľavej strane. Úroveň rýchlosti je zobrazená od úrovne 1 (najpomalšia / 1 svetlo) po úroveň 5 (najrýchlejšia / 5 svetiel) na pravej strane.

ZADNÝ JOYSTICK

- 1. Páka dopredu a dozadu
- 2. Úroveň rýchlosti
- 3. Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť
- 4. Úroveň rýchlosti
- 5. Úroveň batérie



Posunutie páky dopredu znamená pohyb dopredu, posunutie páky dozadu znamená pohyb dozadu. Zadný ovládač joysticku zobrazuje úroveň rýchlosti od úrovne 1 (najpomalšia) po úroveň 5 (najrýchlejšia).

POUŽÍVANIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

Začnite vybratím vozíka z kartónu spolu s náhradnými dielmi a batériou. Odstráňte ochrannú fóliu a postavte vozík do vertikálnej polohy.


Namontujte ovládač joysticku na lakťovú opierku. Nastavte do požadovanej vzdialenosti a utiahnite.



MONTÁŽ ZADNÉHO OVLÁDAČA

Vložte ľavý držiak – Zasuňte ľavý držiak do vnútornej drážky rukoväte. Uistite sa, že správne sedí.
 Otočte ovládač – Opatrne otočte ovládačom opačným smerom, aby sa pravý držiak zasunul do vonkajšej drážky.
 Zatlačte a skontrolujte upevnenie – Keď sú oba držiaky na mieste, skontrolujte, či je ovládač pevne upevnený.

Zadný ovládač možno používať iba vtedy, keď je joystick zapnutý a opatrovateľ tlačí pacienta. Keď je joystick vypnutý, zariadenie pracuje v režime chodítka – osoba môže tlačiť vozík a elektrická brzda prestane fungovať.

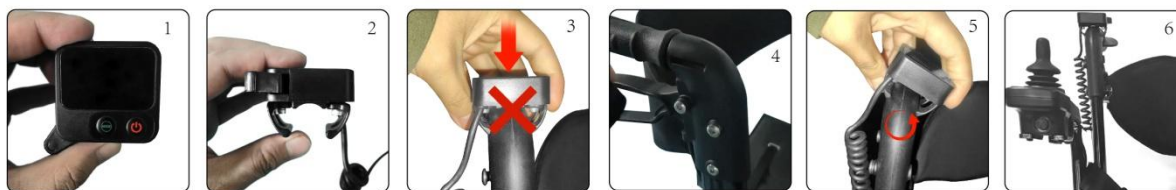

MONTÁŽ OPĚROK NŮH

Na rozloženie opierok nôh otvorte zámok a vytiahnite opierku nahor. Na zloženie zatlačte opierku nadol a zatvorte zámok.



ROZKLADANIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

Zdvihnute uvoľňovaciu bezpečnostnú rukoväť, čím sa odblokuje bezpečnostná západka umiestnená pod sedadlom, a umožní sa rozloženie vozíka. Po zdvihnutí uvoľňovacej rukoväte by sa mal invalidný vozík mierne rozložiť. Môžete uvoľniť rukoväť a úplne rozložiť vozík zatlačením na bočné tyče sedadla. Na overenie, že bezpečnostná západka je zamknutá, zdvihnite vozík; ak sa nezloží, západka je správne zaistená.

Operadlo je možné otočiť tak, aby smerovalo dopredu alebo dozadu.



SKLADANIE INVALIDNÉHO VOZÍKA

Ak chcete vozík zložiť, uchopte bezpečnostnú uvoľňovaciu rukoväť na sedadle a zdvihnite ju. Tým sa uvoľní bezpečnostná západka umiestnená pod sedadlom. Po zdvihnutí sa ramená vozíka môžu priblížiť k sebe do zloženej polohy. Keď je vozík správne a úplne zložený, budete počuť cvaknutie zabezpečenia.

Uistite sa, že vozík je vypnutý počas rozkladania a skladania.




ELEKTRONIKA

- **Pripojenie joysticku k akumulátoru:** Nájdite konektory na joysticku a dôkladne ich pripevnite na miesto.
- **Pripojenie ľavého a pravého motora k pohonu:** Nájdite konektory na zadnom regulátore a kábli pod sedadlom. Kábel označený ako "zadné spojenie" (žltý štítok) pripojte pomocou príslušných konektorov (samec a samica) a zabezpečte ich.
- **Kontrola spojení:** Uistite sa, že spojenia kolies (ľavého a pravého motora) sú dobre zabezpečené a šípky na konektoroch sú správne zarovnané.




- **Opatrnosť pri konektoroch:** Dávajte pozor, aby ste neohli piny v konektoroch, pretože to môže ovplyvniť funkčnosť vozíka.
- **Pripojenie akumulátora:** Pripojte akumulátor pomocou 2-pinového konektora. Akumulátor sa nachádza v kapsičke na ľavej strane vo vnútri úložného vrečka, zatiaľ čo "mozog" vozíka sa nachádza na pravej strane tohto vrečka. Na zadnej strane vrečka na ľavej strane je otvor, ktorým sa vedie kábel na pripojenie akumulátora.
- **Uloženie káblov:** Umiestnite káble do vrečka so suchým zipsom na vonkajšej zadnej časti úložnej tašky.

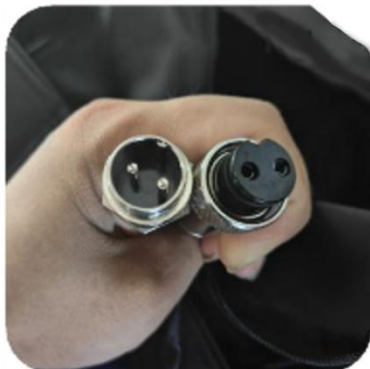

ZDVÍHANIE LAKŤOVEJ OPIERKY

Zdvihnite lakťovú opierku a otočte ju dozadu. Na spustenie opierky ju otočte dopredu a zatlačte nadol.

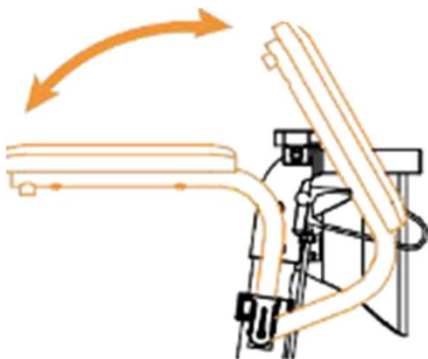

ZDVIHANIE RUKOVÄTI A OPERADLA

Tlačidlo na uvoľnenie rukoväte je umiestnené na oboch stranách vozíka. Stlačte tlačidlo, aby ste mohli zdvihnúť rukoväť z každej strany zvlášť. Rukoväť/operadlo je možné zdvihnúť o 4 úrovne; možno ich nastaviť nahor alebo nadol a zaistiť na mieste.



RUČNÁ BRZDA


Vozík je vybavený ručnými brzdami, ktoré sa dajú použiť počas používania vozíka ako chodítka alebo manuálneho invalidného vozíka. Ručné brzdy sú umiestnené priamo pod rukoväťami na ľavej a pravej strane a možno ich použiť pri chôdzi na udržanie rovnováhy.

- **Blokovanie brzdy:** Brzdy je možné zablokovat' zatlačením páky brzdy až do zablokovania. To sa odporúča pri nasadaní na vozík alebo vystupovaní z neho.



NABÍJANIE AKUMULÁTORA

- Uistite sa, že akumulátor je umiestnený v úložnom vrecku a pripojený ku káblu napájania joysticku.
- Skontrolujte, či sú konektory správne zarovnané a utiahnuté. Nesprávne pripojenie akumulátora alebo nesprávne nastavenie konektorov môže ovplyvniť prevádzku vozíka a spustiť chybový alarm.

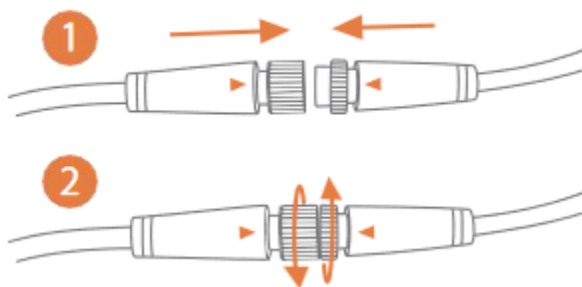

- Akumulátor môžete nabiť pripojením 3-pinovej nabíjačky k joysticku.
- **Upozornenie:** Netlačte násilím na konektory samec-samica. Ohýbanie pinov môže spôsobiť poruchu alebo úplné poškodenie vozíka.

PARAMETRE AKUMULÁTORA

- Vozík využíva lítiový akumulátor 24V6Ah.
- Akumulátor umožňuje prejsť do 10 km pri bežnom používaní.
- **Doba nabíjania:** 4-6 hodín alebo kým sa na nabíjačke nerozsvieti zelené svetlo.
- Po rozsvietení zeleného svetla pokračujte v nabíjaní ešte hodinu, aby sa akumulátor úplne nabil.
- **Dlhodobé skladovanie:**
 - Akumulátor úplne nabite pred uložením.
 - Vyberte akumulátor z vozíka.
 - Uchovávajte akumulátor pri izbovej teplote na suchom mieste.
 - Vyhňte sa extrémnym teplotám a nedovoľte, aby akumulátor alebo nabíjačka zamrzli.
 - Ak je akumulátor zmrazený, nežiadajte o nabíjanie. Pred nabíjaním ho nechajte niekoľko hodín rozmraziť.

OCHRANA PROTI PREŤAŽENIU

Vozík je vybavený systémom ochrany proti preťaženiu, ktorý automaticky vypne prúd z akumulátora, aby ochránil motor a akumulátor pred poškodením. Priemerná životnosť lítiového akumulátora je 400 cyklov nabíjania.

POUŽÍVANIE

Model AT52334 má funkciu elektrického invalidného vozíka aj funkciu rolátora. Keď si používateľ sadne na stoličku a zapne joystick, aktivuje sa režim elektrického vozíka. Elektrický vozík má automatickú brzdnú funkciu. Keď je zapnutý, zabrzdí, keď sa ho používateľ pokúsi tlačiť; tiež zabrzdí na svahu, keď používateľ uvoľní joystick – ide o bezpečnostnú funkciu. Ak chce používateľ používať režim rolátora, stačí joystick vypnúť a môže ho tlačiť ako bežný rolátor.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Vždy nastavte najnižšiu rýchlosť pri jazde z kopca.
- Uistite sa, že batéria je pred začiatkom cesty plne nabitá.
- Nabíjajte elektrický vozík v dobre vetraných priestoroch, aby sa predišlo riziku.
- Vyhňte sa extrémnym teplotám (chlad aj horúčava).
- Vždy sa uistite, že za vami nie sú prekážky pri cúvaní.
- Udržiavajte najnižšiu rýchlosť pri cúvaní.
- Vyhňte sa náhlým pohybom a ostrým zákrutám.
- Viesť vozík bezpečne a predvídavo.

- Ruky majte na lakťových opierkach a nohy na stupačke.
- Pri vstávaní odložte stupačku, aby ste predišli náhodnému šliapnutiu na ňu, čo by mohlo spôsobiť prevrátenie vozíka.
- Vyklonenie sa za lakťovou opierkou, aby ste dosiahli na predmety, môže spôsobiť prevrátenie vozíka – vždy je lepšie vystúpiť z vozíka predtým, ako sa naťahujete za predmetmi.

KÓDY CHÝB A ICH RIEŠENIA

Tento vozík je vybavený automatickým systémom na upozorňovanie na poruchy. Ak dôjde k poruche, na ovládacom paneli sa zobrazí kód chyby a spustí sa zvukový signál. Nižšie uvedená tabuľka popisuje možné poruchy a ich riešenia. Ak problém pretrváva, kontaktujte servis.

- **Porucha ľavého motora:** Skontrolujte spojenie konektora alebo vymeňte zástrčky ľavého a pravého motora. Ak sa chyba objaví na pravom motore, znamená to, že porucha je v ľavom motore. Ak nie je zmena, problém je v regulátore.



- **Porucha ľavej brzdy:** Skontrolujte spojenie konektorov.



- **Porucha pravého motora:** Skontrolujte spojenie konektora alebo vymeňte zástrčky pravého a ľavého motora. Ak sa chyba objaví na ľavom motore, znamená to, že porucha je v pravom motore. Ak nie je zmena, problém je v regulátore.



- **Porucha pravej brzdy:** Skontrolujte spojenie konektorov.



- **Nesúosovosť joysticku (joystick nie je zarovnaný):** Pohnite joystickom, uistite sa, že funguje hladko, a potom zariadenie znovu zapnite.



- **Odpojenie joysticku (joystick vypadol):** Kontaktujte dodávateľa, aby problém vyriešil.



- **Anomálne meranie prúdu:** Kontaktujte dodávateľa, aby problém vyriešil.




- **Poškodenie pohonnej trubice:** Kontaktujte dodávateľa, aby problém vyriešil.



- **Skrat na riadiacej doske:** Kontaktujte dodávateľa, aby problém vyriešil.



- **Strata komunikácie:** Kontaktujte dodávateľa, aby problém vyriešil.

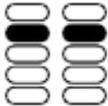

- **Porucha elektromagnetického pohonu:** Kontaktujte dodávateľa, aby problém vyriešil.



- **Nízka úroveň batérie:** Nabite akumulátor.



- **Vysoké napätie batérie:** Kontaktujte dodávateľa alebo nabite batériu po jej vybití.



RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak invalidný vozík nefunguje správne, skontrolujte nasledujúce body:

- Uistite sa, že akumulátor je nabitý.
- Vypnite a znova zapnite vozík.
- Skontrolujte, či sú všetky konektory akumulátora správne pripojené.
- Uistite sa, že páka je v polohe DRIVE (jazda).
- Skontrolujte, či nie je ovládač zablokovaný.

UPOZORNENIE:

V prípade, že s výrobkom dôjde k „vážnemu incidentu“, ktorý priamo alebo nepriamo viedol, mohol viesť alebo môže viesť k niektorému z nižšie uvedených udalostí:

- úmrtiu pacienta, používateľa alebo inej osoby, alebo
- dočasnému alebo trvalému zhoršeniu zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo inej osoby, alebo
- vážnemu ohrozeniu verejného zdravia,

je potrebné tento „vážny incident“ nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

UPOZORNENIE:

V prípade bolesti, alergických reakcií alebo iných znepokojujúcich či nejasných symptómov spojených s používaním zdravotníckeho výrobku sa poraďte so zdravotníckym pracovníkom.

OPĀTOVNÉ POUŽITIE

Vozík je vhodný na opätovné použitie.

Aby sa zabezpečilo bezpečné opätovné použitie, odovzdajte novému používateľovi úplnú technickú dokumentáciu.

Ak vozík požíčavate, uistite sa, že používateľ si prečítal návod pred začatím používania produktu.

Pred odovzdaním vozíka novému používateľovi by mal byť vozík vyčistený, dezinfikovaný a predávajúcim skontrolovaný z hľadiska poškodenia, aby sa zaistila bezpečnosť používania.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pravidelná údržba vozíka je dôležitá pre jeho dlhú životnosť a zachovanie záruky. Aj minimálna starostlivosť pomôže udržať zariadenie v dobrom stave.

Odporúčame kontrolu vozíka dvakrát až trikrát ročne:

- **Rám:** Dotiahnite uvoľnené skrutky, ak je to potrebné.
- **Kolesá:** Uistite sa, že sa voľne otáčajú; v prípade odporu môže byť potrebná výmena ložísk.
- **Lakťová opierka:** Skontrolujte, či nie sú nadmerne opotrebované alebo uvoľnené. Výmenu dielov a závažné opravy by mal vykonávať odborník.

Údržba elektrického vozíka zahŕňa: čistenie vozíka, kontrolu pneumatík a akumulátora a nabíjanie akumulátora. Pre pokročilejšiu údržbu kontaktujte servisné centrum.

Naše odporúčania na údržbu: kontrola elektrického vozíka každých šesť mesiacov a každoročná revízia.

ČISTENIE ELEKTRICKÉHO VOZÍKA

Elektrický vozík čistite pravidelne. Časti, ktoré používateľ často dotýka (napr. sedacia podložka, lakťové opierky, ovládač), utierajte čistou, mierne vlhkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte organické rozpúšťadlá.

Ak vozík používa pacient, čistite ho týždenne. V prípade, že ho používa osoba s infekčným ochorením, dezinfikujte ho vhodnými dezinfekčnými prostriedkami.

V prípade znečistenia povrchov ich utrite čistou vodou alebo jemným čistiacim prostriedkom a osušte suchou handričkou.

Na čistenie nepoužívajte alkohol, benzín, petrolej ani iné žieravé, prchavé chemické rozpúšťadlá, pretože môžu vážne poškodiť vzhľad a vnútornú štruktúru rámu invalidného vozíka.

Nikdy nepoužívajte vysokotlakové čistiace pištole, aby ste predišli poškodeniu vnútorných elektronických súčastí a káblov.

PNEUMATIKY

Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách a ich opotrebenie. Ak sa hĺbka dezénu zníži na 1 mm, pneumatiky treba vymeniť.

AKUMULÁTOR

Uistite sa, že akumulátor je pravidelne nabíjaný do plnej kapacity. Na predĺženie jeho životnosti odporúčame nenabíjať ho, kým sa úplne nevyčerpá.

SKLADOVANIE

- Produkt skladujte na suchom mieste, nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu. Farby častí vozíka môžu pod vplyvom slnečného žiarenia mierne vyblednúť.
- Nevystavujte produkt teplotám pod -5 °C ani nad 45 °C, pretože to môže spôsobiť poškodenie niektorých komponentov a ovplyvniť ich fungovanie.
- Vozík obsahuje elektronické súčasti – vyhnite sa jeho navlhnutiu a nepoužívajte ho vonku počas intenzívnych zrážok.
- Držte produkt mimo dosahu kyselín, zásad a iných korozívnych látok.

LIKVIDÁCIA

Tento produkt obsahuje elektronické súčasti. Po ukončení jeho životnosti ho nevyhadzujte do bežného odpadu. Na správnu likvidáciu produktu ho odovzdajte do príslušného zberného miesta na elektroodpad. Správna likvidácia predchádza potenciálnym škodám na životnom prostredí a zdraví ľudí v súlade s platnými právnymi predpismi o recyklácii elektroodpadu.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

PRVÝ KONTAKT: Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 15.01.2025

v1-15.01.2025