

**AT53073**

**NÁVOD NA POUŽITIE, KOREKTOR DRŽANIA TELA**



## NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento návod na použitie. Nepoužívajte výrobok, kým si neprečítate a nepochopíte tento návod. Ak nerozumiete varovaniam, upozorneniam alebo odporúčaniam, obráťte sa na zdravotníckeho odborníka alebo predajcu, aby ste predišli poškodeniu výrobku alebo zraneniam.

### UPOZORNENIE:

Skontrolujte všetky časti výrobku na prípadné poškodenia vzniknuté počas prepravy. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, NESMIETE výrobok používať. Viac informácií vám poskytne predajca.

### POPIS A VLASTNOSTI

Korektor je vyrobený z priedušného, ľahkého materiálu, ktorý zaisťuje vysoký komfort. Služi na korekciu porúch držania tela a zabraňuje hrbeniu. Pomáha udržiavať správne držanie tela tým, že ťahá ramená dozadu a podporuje správne držanie. Vďaka systému pásov so suchým zipsom sa dá ľahko prispôsobiť individuálnym potrebám používateľa.

### KONTRAINDIKÁCIE

Akútne zápalové stavy kože v oblasti, kde výrobok prichádza do kontaktu s telom (napr. ekzémy, vredy, otvorené rany, zapareniny).

Problémy s krvným obehom – nosenie korektora môže zhoršiť problémy s obehom, najmä u osôb s poruchami žilového alebo lymfatického systému.

Osteoporóza – v pokročilých štádiách osteoporózy, najmä ak je chrbtica oslabená, môže nadmerná stabilizácia viesť k zlomeninám.

Problémy s dýchaním – ak je ortéza príliš tesná alebo obmedzuje pohyb hrudníka, môže spôsobiť dýchacie ťažkosti, čo je nebezpečné najmä pre osoby s astmou, CHOCHP alebo inými ochoreniami dýchacieho systému.

Neurologické problémy – u pacientov s poškodením nervov alebo poruchami citlivosti môže používanie ortézy viesť k zhoršeniu príznakov, napríklad nadmerným tlakom na nervy.

### POUŽITIE

Poruchy držania tela

Bolestivé syndrómy chrbtice

Prevenca zdravej chrbtice

**VEĽKOSŤ:** Univerzálna

Pohodlné prispôsobenie pre dospelých s obvodom pása medzi 75 a 125 cm.

Produkt je navrhnutý s rozsahom výšky od minimálne 40 cm do maximálne 60 cm.

### UPOZORNENIE:

V prípade „vážneho incidentu“ súvisiaceho s výrobkom, ktorý priamo alebo nepriamo spôsobil, mohol spôsobiť alebo môže spôsobiť:

- úmrtie pacienta, používateľa alebo inej osoby, alebo
- dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo inej osoby, alebo
- vážne ohrozenie verejného zdravia,

musí byť tento „vážny incident“ nahlásený výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko.

### UPOZORNENIE:

Ak sa počas používania výrobku vyskytnú bolesti, alergické reakcie alebo iné znepokojujúce príznaky, kontaktujte zdravotníckeho odborníka.

**UPOZORNENIE:** Používanie výrobku iným spôsobom, než na aký je určený, je zakázané.

**UPOZORNENIE:** Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním čistenia a údržby alebo za škody vyplývajúce z nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.

### CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV


Výrobok je určený pre osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, ktorých liečba, rehabilitácia alebo kompenzácia vyžaduje použitie tohto výrobku (pozri časť o účele použitia v tomto návode). Výrobok môže byť zakúpený samostatne alebo na odporúčanie lekára, terapeuta či iného odborníka. V oboch prípadoch je potrebné zväziť dostupné veľkosti, potrebné funkcie, varianty výrobku, indikácie a kontraindikácie a tiež informácie poskytnuté výrobcom.

### POUŽITIE

Priložte ortézu na chrbát a upevnite ju okolo pása pomocou širokého pásu so suchým zipsom.



Potom prevlečte popruhy cez zadnú časť ortézy, prevlečte ich cez špeciálne pásky a upravte ich, aby boli upevnené suchým zipsom na prednej časti pása bez toho, aby spôsobovali nepohodlie.

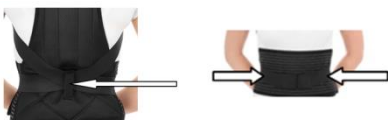

Ak cítite nepohodlie alebo nadmerný tlak, môžete použiť dodatočné vankúšiky na ramená alebo paže.



**ČISTENIE A ÚDRŽBA**

Výrobok odporúčame prať ručne s jemným čistiacim prostriedkom pri teplote do 40 °C. Nesmie sa prať v práčke. Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, bieliadlá ani abrazívne materiály. Sušte na plocho v tieni, vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu. Nesušte v sušičke, nečistite chemicky a nežehlite.

**SKLADOVANIE**

Výrobok skladujte na suchom a chladnom mieste, chránenom pred vlhkosťou a priamym slnečným žiarením.

**LIKVIDÁCIA**

Po vyradení z používania sa výrobok môže likvidovať ako bežný komunálny odpad.

## ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného použitia tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR MEDICAL Sp. z o.o.  
ul. Zawiańska 43  
03-068 Warszawa, Poľsko

### **PRVÝ KONTAKT: Distribútor:**

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,  
E-mail: [anmedplus@anmedplus.sk](mailto:anmedplus@anmedplus.sk); [www.anmedplus.sk](http://www.anmedplus.sk)  
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 04.06.2024  
v1-04.06.2024v2-02.01.2026