

NÁVOD NA POUŽITIE

ORTÉZA ČLENKU A CHODIDLA NA53076, NA53079



Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok, pozorne si prečítajte návod na použitie. Nepoužívajte výrobok pred prečítaním a pochopením tohto návodu. Ak nerozumiete výstrahám, upozorneniam a odporúčaniam, obráťte sa na svojho zdravotníckeho pracovníka alebo predajcu, aby ste predišli poškodeniu výrobku alebo zraneniu osôb.

UPOZORNENIE: Skontrolujte všetky časti výrobku, či sa nepoškodili počas prepravy. Ak takéto poškodenie zistíte, výrobok **NEPOUŽÍVAJTE**. Ďalšie informácie získate od výrobcu.

AT53076

POPIS A VLASTNOSTI

Ortéza je vyrobená z ľahkého neoprénového materiálu, výrobok poskytuje podporu pre ochabnuté chodidlo. Ortézu možno ľahko prispôsobiť individuálnym potrebám. Poskytuje viditeľné zlepšenie chôdze pacienta tým, že poskytuje oporu pri zdvihnutí chodidla. Ortézu možno nosiť aj v obuvi vďaka použitiu dodatočnej plastovej časti namiesto spodnej časti ortézy.

INDIKÁCIE/APLIKÁCIA

- Rehabilitácia po operácii
- Padajúca noha
- Slabá dorzálna flexia

VEĽKOSŤ: UNIVERZÁLNA

AT53079

POPIS A VLASTNOSTI

Ortéza pomáha udržiavať chodidlo v dorzálnnej polohe pri zavesení, čím sa znižuje riziko zakopnutia a pádu. Je obzvlášť užitočná pre ľudí s jednostranným poklesom chodidla alebo poškodením nervov. Ortézu možno pohodlne používať v obuvi. Ortéza pomáha znižovať tlak v okolí členkového kĺbu a kontroluje aj bočný pohyb.

INDIKÁCIE/APLIKÁCIA

- Strata kontroly nad dorziflexormi členkového kĺbu (náraz na pätu/ploché chodidlo).
- Poruchy, ktoré môžu byť spojené so stratou funkcie členkového kĺbu, napr. CVA, hernia disku, postpolio syndróm, svalová dystrofia, poranenie miechy, polyneuropatia.

VEĽKOSŤ (veľkosť topánok):

- S: 34-37 cm
- M: 38-41 cm
- L: 42-45 cm

Upozornenie: tento výrobok je k dispozícii pre ľavú aj pravú nohu.

KONTRAINDIKÁCIE

- Pri čerstvých alebo nestabilizovaných zlomeninách môžu byť potrebné reštriktívnejšie formy imobilizácie.
- Pri silnom opuchu alebo krvných zrazeninách môže použitie ortézy zhoršiť stav zvýšením tlaku na tkanivá, čo môže zhoršiť krvný obeh.
- Otvorené rany alebo infekcie: Ortéza môže brániť prístupu k rane, obmedzovať prítok vzduchu a zvyšovať riziko infekcie.
- U ľudí so zmyslovými poruchami, ako je neuropatia, môže používanie ortézy bez primeranej kontroly viesť k ďalšiemu poškodeniu kože.
- V prípade pokročilého arteriálneho ochorenia môže používanie ortézy obmedziť prítok krvi do nohy, čo môže viesť k závažným komplikáciám, ako je napríklad nekróza.

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia (je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

UPOZORNENIE: je zakázané používať výrobok na iný ako určený účel

UPOZORNENIE: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedbalým čistením a údržbou alebo v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v tejto príručke.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je táto pomôcka určená (pozri časť o určenom použití pomôcky v tomto návode). Zariadenie si môže používateľ zakúpiť sám alebo na základe odporúčania lekára, terapeuta alebo iného odborníka. Bez ohľadu na to, či si pomôcku zakúpite sami alebo na odporúčanie lekára/terapeuta/iného odborníka, musíte vziať do úvahy dostupné veľkosti/potrebné funkcie/varianty pomôcky, indikácie a kontraindikácie používania, ako aj informácie poskytnuté výrobcom.

AKO AT53076 SPRÁVNE POUŽÍVAŤ

1. Dlhšiu časť ortézy umiestnite na lýtko a nastavte tak, aby bola táto časť tela pevne zaistená.
2. Pomocou pásov na suchý zips upevnite ortézu tak, aby sa nezošmykla z nohy alebo aby nebola príliš tesná. Ak pocítite bolesť, upravte tesnosť pomocou pásov na suchý zips.
3. Nasadte kratšiu časť ortézy na chodidlo a upravte ju tak, aby bola táto časť tela stabilne zaistená.
4. Pomocou pásov na suchý zips upevnite ortézu tak, aby sa nezošmykla z nohy alebo aby nebola príliš tesná. Ak pocítite bolesť, upravte utiahnutie pomocou pásov na suchý zips.

AKO AT53079 SPRÁVNE POUŽÍVAŤ

1. Pripevnite plastovú časť ortézy k nohe.
2. nastavte opierku nohy pomocou popruhov so suchým zipsom tak, aby nebola príliš voľná a netlačila nohu príliš tesne.
3. ak pocítite bolesť, upravte silu upnutia pomocou pásov so suchým zipsom.

ĎALŠIE POUŽITIE V OBUVI AT53079

1. Ak chcete ortézu používať s obuvou, odpojte od ortézy časť pripevnenú k chodidlu.
2. Potom k ortéze pripevnite ďalší plochý diel.
3. Ploché príslušenstvo zasuňte medzi jazyk topánky a šnúrky.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Výrobok sa odporúča prať ručne s jemným pracím prostriedkom pri teplote do 40°C. Neperte v práčke. Na čistenie nepoužívajte silné pracie prostriedky, bielidlá ani hrubé predmety. Sušte položené na plochu v tieni, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Nesušte v bubnovej sušičke. Nečistite chemicky. Nežehlite.

	RUČNÉ PRANIE PRI 40 STUPEŇOCH CELZIA
	Nepoužívajte bielidlo
	Nežehlite
	Nesušte v sušičke
	Nečistite chemicky

SKLADOVANIE

Výrobok skladujte v suchej a chladnej miestnosti, mimo vplyvu vlhkosti a priameho slnečného svetla. Nevhodné pre deti mladšie ako tri roky. Uchovávajte mimo dosahu ohňa.



SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania zdravotníckej pomôcky môže byť zlikvidovaná ako bežný komunálny odpad s výnimkou elektrických výrobkov (postupujte podľa spôsobu likvidácie elektrických a elektronických zariadení). Pre správnu likvidáciu odpadu sa obráťte na miestny úrad alebo na najbližšie zberné miesto odpadu, kde sa dozviete, ako výrobok správne zlikvidovať. Konaním v súlade s miestnymi predpismi pomáhate chrániť životné prostredie.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Použitie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 17.05.2024

v1-1 17.05.2024