

AT53077

NÁVOD NA POUŽITIE – KOREKČNÁ BANDÁŽ NA PRSTY



Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok, pozorne si prečítajte návod na použitie. Nepoužívajte výrobok pred prečítaním a pochopením tohto návodu. Ak nerozumiете výstrahám, upozorneniam a odporúčaniam, obráťte sa na svojho zdravotníckeho pracovníka alebo predajcu, aby ste predišli poškodeniu výrobku a zraneniu osôb.

UPOZORNENIE: Skontrolujte všetky časti výrobku, či nedošlo k ich poškodeniu pri preprave. Ak takéto poškodenie spozorujete, výrobok NEPOUŽÍVAJTE. Ďalšie informácie získate od výrobcu.

POUŽITIE VÝROBKU

Korekčná ortéza na prsty je špeciálne navrhnutá ortopedická pomôcka určená na korekciu a stabilizáciu prsta, ktorý sa deformoval do strany (smerom k ostatným prstom). Ortéza je navrhnutá tak, aby bola mäkká a pohodlná aj pri nosení v obuvi. Je vyrobená z vysokokvalitného elastického neoprénu a poskytuje jemné narovnanie palca, ktorý je vo valgoznom postavení.

KONTRAINDIKÁCIE: Fyzické alebo mentálne obmedzenia (napr. poruchy zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s výrobkom.

-Závažné deformácie nohy: Ak je deformácia palca nohy veľmi pokročilá, môže byť ťažké alebo nemožné dosiahnuť účinnú korekciu pomocou ortézy.

-Zápalové ochorenia alebo infekcie: Ak sa na chodidle vyskytujú zápalové ochorenia, napríklad artritída, alebo kožné infekcie, nosenie ortézy môže zhoršiť príznaky a oddialiť proces hojenia.

-Koža náchylná na vznik vredov: Ak je koža na chodidle veľmi citlivá alebo náchylná na vznik vredov, nosenie ortézy môže spôsobiť odreniny alebo nadmerný tlak, čo môže viesť k vážnejšiemu problému.

-Poruchy krvného obehu: Ľudia s poruchami krvného obehu, ako je cukrovka alebo ateroskleróza, môžu byť obmedzení v nosení ortéz kvôli riziku zhoršenia krvného obehu a možnosti vzniku vredov.

-Deformácie nohy vyžadujúce chirurgický zákrok: V prípadoch, keď je deformita prstov veľmi pokročilá a vyžaduje si chirurgický zákrok, môže byť nosenie ortézy neúčinné alebo dokonca škodlivé.

INDIKÁCIE

- Valgozita prstov (hallux valgus)
- Bolesť a nepohodlie spojené s hallux valgus
- Prevencia ďalšej progresie deformity
- Zlepšenie funkcie chodidla
- Rehabilitácia po operácii
- Prevencia ďalších zranení

POUŽITIE

Cieľom používania korekčnej ortézy na prsty je zastaviť progresiu deformity, znížiť bolesť spojenú s valgozitou prstov a obnoviť prirodzenú polohu kĺbu. Ortézu možno nosiť v obuvi, čo umožňuje pacientovi zachovať si aktívny životný štýl a zároveň podporuje proces hojenia.

VELKOSŤ: univerzálna

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia (je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

UPOZORNENIE: V prípade bolesti, alergických reakcií alebo iných rušivých príznakov, ktoré nie sú používateľovi jasné v súvislosti s používaním zdravotníckej pomôcky, sa poraďte so zdravotníckym pracovníkom.

UPOZORNENIE: V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

UPOZORNENIE: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním údržby, nedostatočným servisom alebo nedodržaním odporúčaní obsiahnutých v tomto návode na použitie.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo úrazmi, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je táto pomôcka určená (pozrite časť "INDIKÁCIE" v tomto návode). Zariadenie si môže používateľ zakúpiť sám alebo na základe odporúčania lekára, terapeuta alebo iného odborníka. Bez ohľadu na to, či si pomôcku zakúpite sami alebo na odporúčanie lekára/terapeuta/iného odborníka, musíte vziať do úvahy dostupné veľkosti/potrebné funkcie/rozмеры/varianty pomôcky, indikácie a kontraindikácie používania, ako aj informácie poskytnuté výrobcu.

MONTÁŽ/POUŽITIE VÝROBKU

Pri zavádzaní výrobku postupujte podľa nižšie uvedených krokov.


Upozornenie: Výrobok by sa mal nosiť na suchom, čistom a bosom chodidle.

1. Rozopnite suchý zips na visačke.




UI_AT53077

2. Vložte prst na nohu do pútky tak, aby bol viditeľný priebežník remienka v hornej časti prsta.

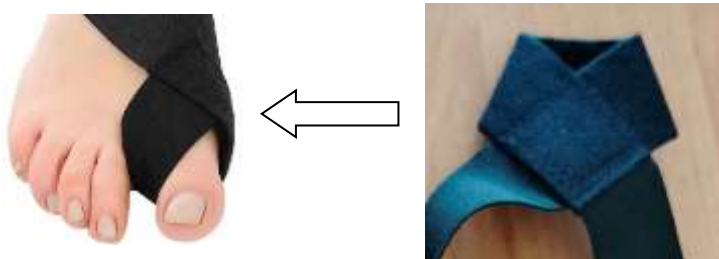

3. Dlhší remienok omotajte cez členok a spojte s kratším remienkom zapnutím suchého zipsu tak, aby opora prstov príliš netlačila na nohu alebo chodidlo.

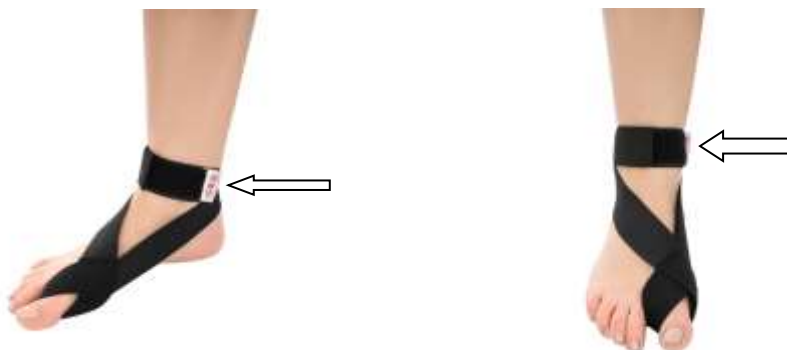

4. Vyskúšajte, či je Vaša chôdza pohodlná. V prípade bolesti alebo nepohodlia skúste individuálne upraviť zapínanie na suchý zips.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Výrobok sa odporúča prať ručne s jemným pracím prostriedkom pri teplote do 40 °C. Neperte v práčke. Na čistenie nepoužívajte silné pracie prostriedky, bieliadlá ani hrubé predmety. Sušte na plocho položené v tieni, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Nesušte v bubnovej sušičke. Nečistite chemicky. Nežehlite.

	POUČENIE PRI AK STUPNÝCH KVALITA
	Nepoužívajte bleidlo
	Nežehlite
	Nesušte v sušičke
	Nečistite chemicky

SKLADOVANIE VÝROBKU

Výrobok skladujte v suchej chladnej miestnosti, mimo vplyvu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania zdravotníckej pomôcky môže byť zlikvidovaná ako bežný komunálny odpad s výnimkou elektrických výrobkov (postupujte podľa spôsobu likvidácie elektrických a elektronických zariadení). Pre správnu likvidáciu odpadu sa obráťte na miestny úrad alebo na najbližšie zberné miesto odpadu, kde sa dozviete, ako výrobok správne zlikvidovať. Konaním v súlade s miestnymi predpismi pomáhate chrániť životné prostredie.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného použitia tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťmi, olejmi alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

PRVÝ KONTAKT: Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16

Dátum vydania návodu: 19.06.2023

v1-19.06.2023

