

NÁVOD NA POUŽITIE

- AT53501** Vložky ortop. kožené pre pozdĺž. a prieč. ploché nohy
- AT53502** Vložky ortop. kožené pre pozdĺž. a prieč. ploché nohy - tlmiace
- AT53503** Vložky ortop. kožené pre pozdĺžne ploché nohy
- AT53504** Vložky ortop. kožené 3/4 dĺžky pre priečne ploché nohy



Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok, pozorne si prečítajte návod na použitie. Nepoužívajte výrobok, kým si neprečítate a neporozumiete tomuto návodu. Ak nerozumiete výstrahám, upozorneniam a odporúčaniam, obráťte sa na svojho zdravotníckeho pracovníka alebo predajcu, aby nedošlo k poškodeniu výrobku.

POZNÁMKA: Skontrolujte všetky časti, či nedošlo k ich poškodeniu počas prepravy. Ak si takéto poškodenie všimnete, výrobok **NEPOUŽÍVAJTE**. Ďalšie informácie získate od výrobcu.

AT53501

Odporúčané pri nepohodlí v členkovom kĺbe a pri valgozite chodidla, priečnej a pozdĺžnej plochej nohe.

Vložky sú vyrobené z penového polypropylénu vhodnej tvrdosti a pružnosti potiahnuté prírodnou kožou vhodnej hrúbky. Vložky sú certifikované ako "Zdravá noha". So stielkou je spojený tvarovaný vystužovací prvok na podporu priečnej a pozdĺžnej klenby chodidla, s otvorom v zadnej časti s latexovou výplňou na zmiernenie tlaku na päťovú kosť. V prednej časti stielky je vytvorená perforácia, ktorá umožňuje pokojnú cirkuláciu vzduchu vo vnútri topánky, čo spôsobuje aj jemnú masáž chodidiel v oblasti hlavičiek prstov. Vložky majú stabilizačný charakter, udržiavajú chodidlo v správnej polohe.

Veľkosti (obuv): 35 - 45

Balenie obsahuje dve vložky, návod na použitie

AT53502

INDIKÁCIE:

Odporúčané pre pozdĺžne a priečne ploché nohy a valgózne postavenie päť a kolien. Tlmia nárazy, zmiernujú bolesti chodidiel stielky nezaberajú veľa miesta v obuvi a zlepšujú pohodlie pri chôdzi.

VLASTNOSTI:

Spodná časť stielok je vyrobená z penového latexu s dostatočnou tvrdosťou a pružnosťou, bez trvalej deformácie. Stielky majú tvarovaný supinačný klin úmerný veľkosti stielky a metatarzálnu pelotu, ktorej veľkosť závisí od dĺžky chodidla (od 1 do 5). Stielky jemne podopierajú pozdĺžnu a priečnu klenbu chodidla. V päťovej časti majú dutinu, ktorá plní funkciu stabilizácie chodidla. V prednej časti stielok sa nachádza perforácia, ktorá umožňuje pokojnú cirkuláciu vzduchu vo vnútri, čo spôsobuje aj jemnú masáž chodidla v oblasti prstov. Vrchná časť stielok je potiahnutá prírodnou kožou vhodnej hrúbky s certifikátom "Zdravé nohy".

Veľkosti (obuv): 35 - 45

Balenie obsahuje dve vložky, návod na použitie

AT53503

INDIKÁCIE:

Odporúčajú sa pri pozdĺžne plochých nohách a valgozite päťovej a kolennej časti. Absorbujú nárazy a zmiernujú bolesť a nepohodlie v chodidlách. Vložky nezaberajú veľa miesta v obuvi a zlepšujú pohodlie pri chôdzi.

VLASTNOSTI:

Spodná časť stielok je vyrobená z penového latexu s dostatočnou tvrdosťou a pružnosťou, bez trvalej deformácie. Vložky majú tvarovaný supinačný klin úmerný veľkosti vložky. Stielky jemne podopierajú pozdĺžnu klenbu chodidla. V päťovej časti majú dutinu, ktorá plní funkciu stabilizácie chodidla. V prednej časti stielok sa nachádza perforácia, ktorá umožňuje pokojnú cirkuláciu vzduchu vo vnútri topánky, čo spôsobuje aj jemnú masáž chodidla v oblasti prstov. Vrchná časť stielok je potiahnutá prírodnou kožou vhodnej hrúbky s certifikátom "Zdravá noha".

Veľkosti (obuv): 35 - 45

Balenie obsahuje dve stielky, návod na použitie

AT53504

INDIKÁCIE:

Odporúčajú sa pre priečne ploché nohy. Zmierňujú bolesť metatarzov a kladivkových prstov a zabraňujú páleniu prstov, najmä v strednej časti. Odporúčajú sa na zníženie priečnej klenby chodidla, najmä pri deformitách palca (hallux valgus). Absorbujú nárazy a zmierňujú bolesť a nepohodlie na strane chodidla. Vložky nezaberajú veľa miesta v obuvi a zlepšujú pohodlie pri chôdzi.

VLASTNOSTI:

Spodná časť stielok je vyrobená z penového latexu s dostatočnou tvrdosťou a pružnosťou, bez trvalej deformácie. Stielky majú metatarzálnu pelotu, úmernú veľkosti chodidla. Podporujú priečnu klenbu chodidla. Vrchná časť stielok je potiahnutá prírodnou kožou primeranej hrúbky s certifikátom "Zdravé nohy". Vložky majú v prednej časti vhodný tvar, aby sa prispôbili akémukoľvek typu obuvi.

Veľkosti (obuv): 35 - 45

Balenie obsahuje dve stielky, návod na použitie.

UPOZORNENIE:

V prípade "vážneho incidentu" súvisiaceho s produktom, ktorý priamo alebo nepriamo viedol, mohol viesť alebo pravdepodobne povedie k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- (a) úmrtie pacienta, používateľa alebo inej osoby, alebo
- (b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo inej osoby, alebo
- (c) vážne riziko pre verejné zdravie

Uvedený "závažný incident" sa musí oznámiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

POZNÁMKY:

V prípade bolesti, alergických reakcií alebo iných rušivých príznakov, ktoré nie sú používateľovi jasné v súvislosti s používaním zdravotníckej pomôcky, sa poraďte so zdravotníckym pracovníkom.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok na iný ako určený účel.

UPOZORNENIE: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedbalým čistením a údržbou alebo vyplývajúce z nedodržania odporúčaní uvedených v tomto návode na použitie.

CIELOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo úrazmi, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je táto pomôcka určená (pozri časť o určenom použití pomôcky v tomto návode na použitie). Zariadenie si môže zakúpiť používateľ samostatne alebo na základe odporúčania lekára, terapeuta alebo iného odborníka. Bez ohľadu na to, či si pomôcku zakúpite sami alebo na odporúčanie lekára/terapeuta/iného odborníka, musíte vziať do úvahy dostupné veľkosti/potrebné funkcie a varianty pomôcky, indikácie a kontraindikácie používania a informácie poskytnuté výrobcom.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Vložky vyberte z obuvi a vyvetrajte ich. Výrobok je možné umývať ručne. Vložky možno utrieť vlhkou handričkou s mydlom alebo sódou bikarbónou, aby sa neutralizoval zápach. Nakoniec by sa mal výrobok nechať uschnúť. Nepoužívajte žiadne drsné čistiace prostriedky, nebielte.

SKLADOVANIE

Výrobok skladujte na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

AKO LIKVIDOVAŤ VÝROBOK

Po vyradení výrobku z prevádzky môžete zdravotnícku pomôcku zlikvidovať ako bežný domový odpad.

INFORMÁCIE

Výrobky AT53501, AT53502, AT53503, AT53504, AT53505, AT53506, AT53507, AT53508, AT53509, AT53510, AT53511, AT53512, AT53513, AT53514 a ďalšie výrobky so symbolom AT535XX (kde X znamená ľubovoľné číslo) - vložky a päťové košíčky značky AN TAR - obsahujú tkanivá živočíšneho pôvodu (zvieraciu kožu).

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného použitia tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.
ul. Zawiślańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16

Dátum vydania návodu: 18.04.2024
v1-18.04.2024

