

NÁVOD NA POUŽITIE

AT53505/6/7/8/9/10/11/12



Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok, pozorne si prečítajte návod na použitie. Nepoužívajte výrobok, kým si neprečítate a neporozumiete tomuto návodu. Ak nerozumiete výstrahám, upozorneniam a odporúčaniam, obráťte sa na svojho zdravotníckeho pracovníka alebo predajcu, aby nedošlo k poškodeniu výrobku.

UPOZORNENIE: Skontrolujte všetky časti, či nedošlo k ich poškodeniu počas prepravy. Ak si takéto poškodenie všimnete, výrobok **NEPOUŽÍVAJTE!** Ďalšie informácie získate od výrobcu.

AT53505/AT53507

ORTOPEDICKÉ PODPÄTENKY NA LATEXOVOM PODSTAVCI PRE MUŽOV/ŽENY

POUŽITIE/INDIKÁCIA

Podložky pod pätu (podpätenky) indikované pri poraneniach členkov, zakriveniach chrbtice a vyrovňovaní dolných končatín.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vrchná časť podpätieniek je potiahnutá prírodnou kožou príslušnej hrúbky certifikovanou spoločnosťou "Healthy Foot". Majú tlmiace vlastnosti. Zabraňujú odieraniu chodidla. Podpätenka má obojstrannú lepiacu pásku.

Veľkosti: univerzálne

AT53509/AT53511

ORTOPEDICKÉ PODPÄTENKY Z OSTRUHOVEJ KOŽE NA LATEXOVOM PODKLADE PRE MUŽOV/ŽENY

POUŽITIE/INDIKÁCIA

Podpätenky zabraňujú bolesti spojenej so zápalom a degeneráciou pätovej kosti. Podpätenky zmierňujú tlak na hrbolček pätovej kosti. Indikované pri pätovej ostrohe a po úrazoch tejto kosti.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vrchná časť podpätieniek je potiahnutá prírodnou kožou príslušnej hrúbky s certifikátom "Zdravá noha". V strednej časti majú vyrezaný otvor, ktorý umožňuje voľné zapadnutie pätovej kosti. Podpätenka má obojstrannú lepiacu pásku.

Veľkosti: univerzálne

AT53506/AT53508

ORTOPEDICKÉ KOŽENÉ PODPÄTENKY NA KORKU PRE MUŽOV/ŽENY

POUŽITIE/INDIKÁCIA

Výrobok dobre tlmí záťaž. Podpätenky dokonale prispôsobujú výšku päty a zabraňujú odieraniu.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vrchná časť podpätieniek je potiahnutá prírodnou kožou primeranej hrúbky s certifikátom "Zdravá noha". Spodná časť podpätienky je z prírodného korku. Podpätenka má obojstrannú lepiacu pásku.

Veľkosti: univerzálne

AT53510/AT53512

ORTOPEDICKÉ KOŽENÉ PODPÄTENKY "OSTROHA" PRE MUŽOV/ŽENY

POUŽITIE/INDIKÁCIA

Podpätenky sú indikované pri pätných ostrohách a po úrazoch tejto kosti.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vrchná časť podpätieniek je potiahnutá prírodnou kožou príslušnej hrúbky s certifikátom "Healthy Foot". Spodná strana podpätienky je z prírodného korku. V strednej časti majú vyrezaný otvor, ktorý umožňuje voľné zapadnutie pätovej kosti. Podpätenky zabraňujú bolesti spojenej so zápalom a degeneráciou pätovej kosti. Podpätenky zmierňujú tlak na hrbolček pätovej kosti. Podpätenka má obojstrannú lepiacu pásku.

Veľkosti: univerzálne

KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo mentálne obmedzenia (napr. poruchy zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii.

OBSAH BALENIA

2 X ortopedická podpätenka, návod na použitie.

UPOZORNENIE

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia (je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

UPOZORNENIE

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

UPOZORNENIE

Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením!

UPOZORNENIE

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním údržby, nedostatočným servisom alebo nedodržaním odporúčaní obsiahnutých v tomto návode na použitie.

CIELOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo úrazmi, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je táto pomôcka určená (pozrite časť „POUŽITIE/INDIKÁCIA“ v tomto návode na použitie). Zariadenie si môže zakúpiť používateľ samostatne alebo na základe odporúčania lekára, terapeuta alebo iného odborníka. Bez ohľadu na to, či si pomôcku zakúpite sami alebo na odporúčanie lekára/terapeuta/iného odborníka, musíte vziať do úvahy dostupné veľkosti/potrebné funkcie a varianty pomôcky, indikácie a kontraindikácie používania a informácie poskytnuté výrobcom.

MONTÁŽ/POUŽITIE VÝROBKU

Podpätenky by sa mali upevniť do obuvi pomocou upevňovacej obojstrannej lepiacej pásky, ktorá je súčasťou výrobku. Uistite sa, že podpätenky nespôsobujú nepohodlie počas chôdze a celkového používania.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Podpätenky vyberte z obuvi a vyvetrajte ich. Výrobok je možné prať v ruke. Podpätenky možno utrieť vlhkou handričkou s mydlom alebo jedlou sódou na neutralizáciu zápachu. Nakoniec by sa mal výrobok nechať uschnúť. Nepoužívajte žiadne drsné čistiace prostriedky, nebielte.

USKLADNENIE VÝROBKU

Výrobok skladujte na suchom a chladnom mieste, mimo vplyvu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania zdravotníckej pomôcky môže byť zlikvidovaná ako bežný komunálny odpad s výnimkou elektrických výrobkov (postupujte podľa spôsobu likvidácie elektrických a elektronických zariadení). Pre správnu likvidáciu odpadu sa obráťte na miestny úrad alebo na najbližšie zberné miesto odpadu, kde sa dozviete, ako výrobok správne zlikvidovať. Konaním v súlade s miestnymi predpismi pomáhate chrániť životné prostredie.

INFORMÁCIE

Výrobky AT53501, AT53502, AT53503, AT53504, AT53505, AT53506, AT53507, AT53508, AT53509, AT53510, AT53511, AT53512, AT53513, AT53514 a ďalšie výrobky so symbolom AT535XX (kde X znamená ľubovoľné číslo) - vložky a podpätenky značky ANTAR - obsahujú tkanivá živočíšneho pôvodu (zvieraciu kožu).

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

 ANTAR Sp. J.
ul. Zawisłańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 18.04.2024

v1-18.04.2024