

NÁVOD NA POUŽITIE

AT53515, AT53516, AT53517, AT53518 ODDEĽOVAČ PRSTOV
AT53519, AT53520 OCHRANA NA HALLUXY



SK

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme za zakúpenie nášho produktu. Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento návod na použitie. Výrobok nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte tento návod. Ak nerozumiete varovaniám, upozorneniam a odporúčaniam, obráťte sa na zdravotníckeho pracovníka alebo predajcu, aby ste predišli poškodeniu výrobku alebo zraneniam.

UPOZORNENIE:

Skontrolujte všetky časti výrobku, a to z hľadiska možných poškodení vzniknutých počas prepravy. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, VÝROBOK NESMIETE používať. Viac informácií získate u predajcu.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Tento výrobok je určený pre osoby s ochoreniami, dysfunkciami alebo zraneniami, ktoré vyžadujú liečbu, rehabilitáciu alebo kompenzáciu (pozrite časť o účele použitia v tomto návode). Výrobok je možné zakúpiť samostatne alebo na odporúčanie lekára, terapeuta alebo iného odborníka. V oboch prípadoch je potrebné zvážiť dostupné veľkosti, potrebné funkcie, varianty výrobku, indikácie a kontraindikácie, ako aj informácie poskytnuté výrobcom.

AT53515/AT53516/AT53517

Mäkké separátory sú ideálne na nosenie v topánkach, vhodné pre pravú aj ľavú stranu, pohodlné na používanie. Sú určené pre palce nôh, zabráňujú tvorbe otlakov, podráždeniu pokožky a zhoršeniu rán.

ČISTENIE A ÚDRŽBA VÝROBKU: Bez zápachu, vhodné na ručné pranie v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom, opakovane použiteľné.

AT53518

Tento separátor prstov sa bezpečne prispôsobí prstom a je vyplnený géovou vrstvou. Poskytuje ochranu pred otlakmi, podráždením a mozolmi na prstoch alebo medzi nimi. Chráni pred nárazmi a pevne prilieha k prstom. Dá sa prispôbiť na požadovanú dĺžku, čím postačuje na 6 až 7 samostatných separátorov. Možno ho prať ručne v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom.

AT53519/AT53520

Ochrana na halluxy bola navrhnutá na prevenciu problémov spojených s vbočeným palcom, účinne eliminuje riziko vzniku otlakov, podráždenia a zranení, čím zabezpečuje celodenné pohodlie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA VÝROBKU: Vložky otočte naruby a umyte ich jemnou mydlovou vodou, jemne pretrite a nechajte vyschnúť. Nebielte.

UPOZORNENIE: Separátor by sa nemal nosiť dlhšie ako 20 hodín denne. Diabetici alebo osoby s poruchami krvného obehu by sa mali pred použitím poradiť s lekárom.

KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo duševné obmedzenia (napr. zrakové postihnutie), ktoré znemožňujú bezpečné zaobchádzanie s výrobkom. Výrobok by sa nemal používať pri otvorených ranách, kožných ochoreniach alebo alergických reakciách.

VEĽKOSŤ: Univerzálna

OBSAH BALENIA: 2 kusy

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE:

Ak sa počas používania výrobku vyskytnú bolesti, alergické reakcie alebo iné znepokojujúce príznaky, obráťte sa na zdravotníckeho pracovníka.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok iným spôsobom, než na aký je určený.

SKLADOVANIE VÝROBKU

Výrobok skladujte na suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU

Po vyradení z používania sa výrobok musí likvidovať ako bežný komunálny odpad. Dodržiavajte pravidlá triedenia odpadu. Chráňte životné prostredie.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.
ul. Zawisłańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

PRVÝ KONTAKT: Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 04.06.2024

v1-04.06.2024