

AT53521

NÁVOD NA POUŽITIE

TEPLÉ PONČO NA INVALIDNÝ VOZÍK



Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok, pozorne si prečítajte návod na použitie. Nepoužívajte výrobok, kým si neprečítate a neporozumiete tomuto návodu. Ak nerozumiete výstrahám, upozorneniam a odporúčaniam, obráťte sa na svojho zdravotníckeho pracovníka alebo predajcu, aby nedošlo k poškodeniu výrobku.

POZNÁMKA: Skontrolujte všetky časti, či nedošlo k ich poškodeniu počas prepravy. Ak si takéto poškodenie všimnete, výrobok **NEPOUŽÍVAJTE**. Ďalšie informácie získate od výrobcu.

APLIKÁCIA

Výrobok je určený pre používateľov invalidných vozíkov, ktorí chcú chrániť svoje telo pred poveternostnými vplyvmi (slnečné žiarenie, vietor). Plášť má hrejivú a ochrannú funkciu.

KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo mentálne obmedzenia (napr. poruchy zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii. Keď sa používateľ v hrejivom odevu necíti pohodlne, keď je odev príliš veľký alebo príliš malý, stiesnený tak, že bráni správnej funkcii, bráni videniu, sluchu a pohybu.

VLASTNOSTI

- kapučňa
- zapínanie na 2 gombíky
- predĺžená predná časť odevu, ktorá chráni nohy
- skrátaná zadná časť odevu
- jednoduché obliekanie a vyzliekanie
- Materiál: 100,00 % polyester
- Typ materiálu: fleece

VEĽKOSŤ

Univerzálna veľkosť
Dĺžka chrbta: Dĺžka: 62 cm

OBSAH BALENIA: Pončo na invalidný vozík, návod na použitie.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením!

UPOZORNENIE: Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedbalým čistením alebo v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.

POUŽÍVANIE

Pončo by sa malo nasadiť cez hlavu, potom sa uistite, že sa žiadna časť materiálu nezvlnila tak, aby spôsobila nepohodlie. Treba dbať na to, aby pončo nebránilo pohodlnému pohybu na invalidnom vozíku, a osobitnú pozornosť treba venovať tomu, aby sa výrobok nedostal do kontaktu s kolesami invalidného vozíka. V prípade potreby sa môže na hlavu umiestniť kapučňa.

ČISTENIE

Výrobok by sa mal prať pri teplote do 40 stupňov C, nesmie sa bieliť ani chlórovať, nesusušiť v bubnovej sušičke, žehliť pri teplote 110 stupňov C, čistiť bez použitia rozpúšťadiel alebo silných pracích prostriedkov.

	RUČNÉ PRANIE PRI 40 STUPŇOCH
	Nepoužívajte bielidlo
	Žehlička pri maximálnej teplote 110 stupňov C
	Nesusušte v sušičke
	Nečistite chemicky

SKLADOVANIE

Výrobok by sa mal skladovať v suchej chladnej miestnosti, mimo dosahu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po vyradení výrobku z prevádzky možno zdravotnícku pomôcku zlikvidovať ako bežný domový odpad.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

 ANMED PLUS
ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16

Dátum vydania návodu: 29.04.2024

v1-29.04.2024

