

NÁVOD NA POUŽITIE
KRESLÁ S FUNKCIOU POMOCI PRI VSTÁVANÍ
AT56250/AT56251



CE

Ďakujeme za zakúpenie nášho produktu. Prosíme o dôkladné oboznámenie sa s návodom na použitie. Výrobok nepoužívajte pred prečítaním a pochopením tohto návodu. Ak nerozumiete upozorneniam, poznámkam alebo odporúčaniam, obráťte sa na zdravotníckeho pracovníka alebo predajcu, aby ste predišli poškodeniu výrobku.

UPOZORNENIE:

Skontrolujte všetky časti výrobku, či nedošlo k poškodeniu počas prepravy. V prípade zistenia takéhoto poškodenia výrobok NESMIE byť používaný. Pre viac informácií kontaktujte výrobcu.

ÚČEL:

Kreslo bolo navrhnuté tak, aby poskytovalo komfort pri sedení, umožňovalo relaxáciu a zároveň pomáhalo a umožňovalo bezpečné vstávanie osobám, ktorým táto činnosť spôsobuje ťažkosti. Podporuje vstávanie osôb po úrazoch, so zdravotnými problémami, starších osôb atď. Kreslo bolo navrhnuté na zabezpečenie pohodlia používateľa.

KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo mentálne obmedzenia (napr. zrakové postihnutie), ktoré znemožňujú bezpečné používanie výrobku.

Poruchy rovnováhy a stability: osoby s problémami s rovnováhou alebo stabilitou môžu mať ťažkosti s bezpečným používaním zdvíhacieho kresla. Náhle pohyby kresla môžu viesť k strate rovnováhy.

Ochorenia kože: osoby s aktívnymi kožnými infekciami alebo otvorenými ranami, najmä v oblastiach kontaktu s kreslom, môžu zaznamenať zhoršenie stavu v dôsledku trenia alebo tlaku.

Poruchy citlivosti: osoby s poruchami citlivosti, najmä v nohách, nemusia správne vnímať nepohodlie alebo bolesť, čo môže viesť k nepostrehnutiu poranení spôsobených dlhodobým tlakom.

Závažné poruchy krvného obehu: osoby s vážnymi problémami krvného obehu v dolných končatinách môžu pociťovať nepohodlie alebo zhoršenie zdravotného stavu pri používaní kresla, ktoré zvyšuje tlak na dolné končatiny počas zdvíhania a spúšťania.

Bezpečnostné riziká: zdvíhacie kreslá sú často vybavené elektrickými mechanizmami, ktoré nemusia byť vhodné pre osoby s poruchami vnímania alebo zmäteným správaním (napr. pri demencii), keďže môžu neúmyselne ovládať mechanizmus, čo môže viesť k pádom alebo úrazom.

ŠPECIFIKÁCIA AT56250

Maximálna hmotnosť používateľa: 170 kg

Šírka sedadla: 54 cm

Výška sedadla: 51 cm

Hĺbka sedadla: 50 cm

Šírka podrúčok: 81 cm

Celková hĺbka: 87 cm

Výška podrúčok: 63 cm

Šírka operadla: 66 cm

Výška operadla: 71 cm

Celková výška: 109 cm

Operadlo s výplňou z mikrovlákna, hustota 30 kg/m³

Sedadlo a podrúčky s plnou penou, hustota 30 kg/m³

Hlavný motor: 6000 N

Motor operadla: 6000 N

Rýchlosť motora: 6 mm/s

Vstup: 100–240 V, 50/60 Hz, 1,3 A

Výstup: 29,0 V – 1,8 A 52,2 W

100 % polyester

Hmotnosť: 54 kg

Uhol rozloženia: 180°

ŠPECIFIKÁCIA AT56251

Maximálna hmotnosť používateľa: 170 kg

Šírka sedadla: 57 cm

Výška sedadla: 50 cm

Hĺbka sedadla: 56 cm

Celková šírka: 86 cm

Celková výška: 107 cm

Celková hĺbka: 92 cm

Hlavný motor: 6000 N

Motor operadla: 6000 N

Rýchlosť motora: 6 mm/s

Vstup: 100–240 V, 50/60 Hz, 1,3 A

Výstup: 29,0 V – 1,8 A 52,2 W

100 % polyester

Hmotnosť: 54 kg

Uhol rozloženia: 180°

UPOZORNENIA

Kreslo musí byť umiestnené na rovnom povrchu.

NEPOUŽÍVAJTE kreslo vo vlhkom alebo prašnom prostredí, môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia. Kreslo musí byť v suchom prostredí.

NEPOUŽÍVAJTE kreslo pri teplote vyššej ako 40 °C.

NEVYSTAVUJTE kreslo pôsobeniu radiátorov, pecí ani priamemu slnečnému žiareniu.

NEPOUŽÍVAJTE kreslo vonku – iba na vnútorné použitie. Chráňte pred dažďom, snehom, ľadom, soľou a stojacou vodou.

Ak sa kreslo nepoužíva, odpojte napájací kábel zo siete, aby ste predišli prehriatiu.

NEOPIERAJTE ani NEUKLADAJTE ťažké predmety na podrúčky, podnožku alebo operadlo.

NESKÁČTE ani sa nehrajte na kresle.

NESADAJTE ani NESTOJTE na podnožke.

NESPITE na kresle počas jeho prevádzky.

Deti musia byť pri používaní kresla pod dohľadom dospeljej osoby.

Zvieratá držte mimo dosahu počas pohybu kresla.

Skontrolujte, či napätie zodpovedá špecifikácii zariadenia.

Elektrické pripojenie musí byť vykonané podľa miestnych predpisov.

NEPRIPÁJAJTE ani NEODPÁJAJTE zástrčku mokrými rukami.

Zástrčku vyťahujte vždy za konektor, nie za kábel.

NEUMIESTŇUJTE napájací kábel pod kreslo – môže dôjsť k jeho poškodeniu a k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

NEDOTÝKAJTE SA zástrčky bezprostredne po použití – môže byť horúca.

NEOVLÁDAJTE diaľkové ovládanie mokrými rukami ani ostrými alebo ťažkými predmetmi.

NEVKLADAJTE prsty ani ruky medzi sedadlo a podnožku počas pohybu kresla.

UPOZORNENIE:

Pri použití v chladnom prostredí nezvyšujte teplotu náhle. Odporúča sa postupné zahrievanie. Po presune zo studeného do teplého prostredia počkajte približne 1 hodinu pred použitím.

UPOZORNENIE:

V nasledujúcich prípadoch okamžite vypnite napájanie a odpojte zariadenie zo siete a kontaktujte servis:

ak dôjde k zaliatiu vodou

pri poškodení čalúnenia a odkrytí mechanizmu

pri akomkoľvek abnormálnom fungovaní

pri výpadku napájania

pri silnej búrke


UPOZORNENIE: Výrobok nepoužívajte inak, než je určené.

UPOZORNENIE: Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov na údržbu a používanie.

MONTÁŽ

KROK 1: NASUŇTE OPIERKU NA KOLÍKY.

KROK 2: PRIPEVNITE TEXTILNÚ ČASŤ POMOCOU SUCHÉHO ZIPSU K ZÁKLADNI SEDADLA.

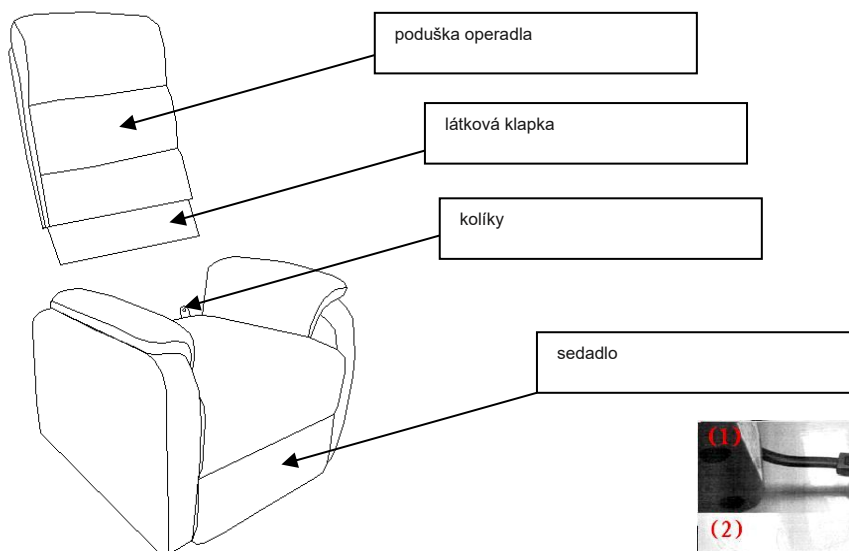


(1) Konektor motora a kabeláže.

(2) Konektor kabeláže a adaptéra.

(3) Konektor kabeláže adaptéra a zástrčky.

(4) Konektor motora a ručného ovládania.

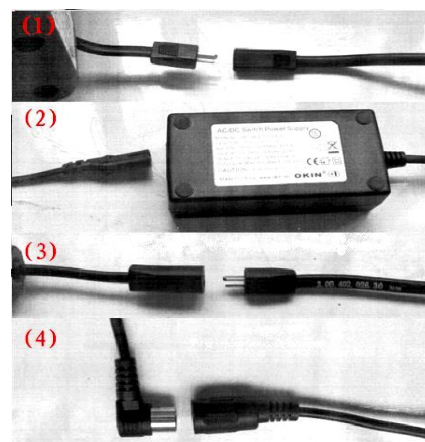


ROZKLADANIE

Zopakujte vyššie uvedené kroky v opačnom poradí.

POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Ručné ovládanie aktivuje motory v kresle, ktoré umožňujú jeho nastavenie a polohovanie.

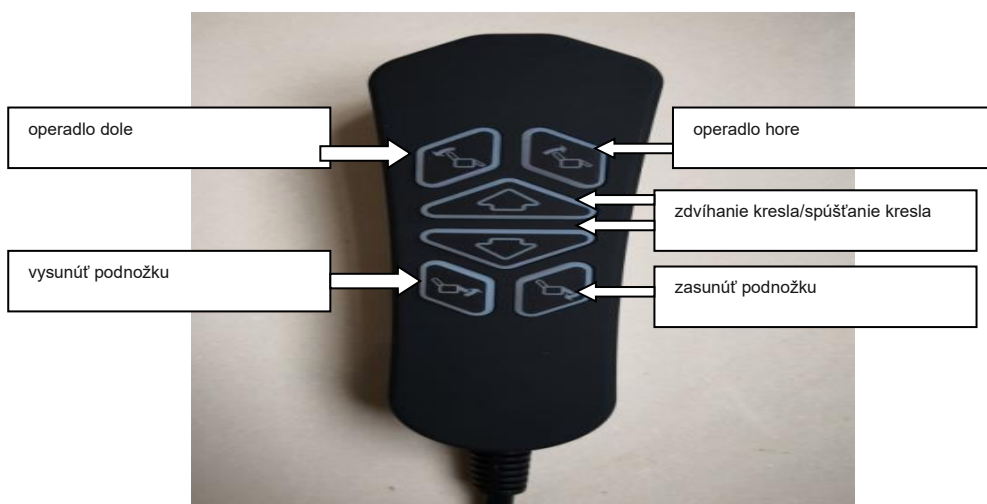

RUČNÉ OVLÁDANIE MASÁŽE (AT56251)

POPIS FUNKCIÍ TLAČIDIEL

POWER: tlačidlo zapnutia produktu

HEAT: tlačidlo zapnutia funkcie vyhrievania. Teplota vyhrievania je v rozsahu 50–60 °C

INTENSITY: tlačidlo voľby intenzity masáže (silná/slabá)

MODE: tlačidlo voľby režimu masáže (k dispozícii je päť vibračných režimov)

BACK: tlačidlo na ovládanie masáže chrbta

LUMBAR: tlačidlo na ovládanie masáže driekovej oblasti

THIGH: tlačidlo na ovládanie masáže stehien

LEG: tlačidlo na ovládanie masáže lýtok

TIMER: tlačidlo voľby času masáže (15 minút, 30 minút, 60 minút). Predvolený čas je 30 minút

NÁVOD NA POUŽÍVANIE PRODUKTU

Pripojte všetky konektory produktu a zapnite napájanie

Stlačte tlačidlo napájania – produkt je pripravený na použitie. Predvolená intenzita masáže je silná, režim vibrácií je automatický a čas masáže je 30 minút. Intenzitu, režim aj čas je možné individuálne nastaviť



ČISTENIE A ÚDRŽBA Pravidelne utierajte prach a nečistoty. Udržiavajte kreslo čisté a mimo prostredia s vysokou vlhkosťou.

Ak sa kreslo dlhší čas nepoužíva, prikryte ho čistou látkou, aby ste ho ochránili pred prachom. **UPOZORNENIE:** Pred čistením sa uistite, že je hlavný vypínač vypnutý a zástrčka je vytiahnutá zo zásuvky. Na čistenie plastových častí, rúrok a čalúnenia použite jemné syntetické mydlo. Zvyšky mydla opatrne zotrite suchou handričkou. Na odstránenie suchej škvry použite mäkkú handričku namočenú v teplej mydlovej vode, vyžmýkajte ju a priložte na škvrru. **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte čistiace prostriedky ako benzén, riedidlá ani iné agresívne látky, ktoré môžu spôsobiť vyblednutie farby alebo poškodenie čalúnenia. Neodstraňujte čalúnenie na pranie. Žehlenie čalúnenia je prísne zakázané. Tkanina nesmie byť v priamom kontakte so zdrojom tepla (napr. radiátor), môže to spôsobiť zranenie alebo požiar.

SKLADOVANIE Výrobok skladujte v suchom a chladnom prostredí, mimo vlhkosti a priameho slnečného žiarenia. Kreslo neskladujte na priamom slnku ani v prostredí s vysokou teplotou, môže dôjsť k vyblednutiu tkaniny.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU Tento výrobok obsahuje elektronické komponenty. Po ukončení jeho životnosti ho nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu odovzdajte výrobok na príslušné zberné miesto elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia pomáha predchádzať negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie v súlade s platnými právnymi predpismi o recyklácii elektrických a elektronických zariadení.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:
Sériové číslo:
Pečiatka predajného miesta
a čitateľný podpis predajcu:

Dovozca – spoločnosť Antar MEDICAL Sp. z o.o. týmto zaručuje, že predávaný výrobok je bez väd. V prípade reklamácie si spoločnosť Antar vyhradzuje právo rozhodnúť medzi opravou alebo výmenou chybných častí, za predpokladu splnenia nižšie uvedených podmienok.

Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky a zahŕňa tieto časti kresla:

ovládač, čalúnenie, mechanické časti, drevené časti, elektrické komponenty.

Táto záruka platí len pri bežnom používaní výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na:

opotrebenie častí, najmä látok a poťahov

nesprávne používanie, nedostatočnú údržbu alebo nesprávnu manipuláciu, poškodenie počas prepravy alebo používania, úpravy alebo opravy vykonané neoprávnenými osobami

poškodenie elektrických komponentov nárazom, otrasmi alebo iným mechanickým poškodením

poškodené káble/zástrčky (pretrhnutý alebo prerazený kábel napr. pri presúvaní kresla, znečistený – nahromadený prach, alebo nechránený kábel napr. poškodený domácim zvieratkom)

vystavenie elektrických častí kvapalinám alebo prepätiu (napr. zásah bleskom)

nedodržanie primeranej vzdialenosti od steny

pád používateľa na kreslo

používanie kresla nad maximálne povolené zaťaženie

náklady na zbytočné servisné zásahy (napr. nesprávne zapojenie kábla/zástrčky alebo vyššie uvedené situácie)

Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním, nehodami, zanedbaním alebo nedostatočnou starostlivosťou pri čistení a údržbe. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenia ako škrabance, trhliny, nadmerné alebo abrazívne opotrebenie ani na škody spôsobené neoprávnenými opravami alebo zásahmi do výrobku.

Pred začatím používania je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a dôsledne ho dodržiavať. Používanie výrobku v rozpore s jeho určením alebo odporúčaniami vedie k neodvolateľnej strate záruky.

TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ LEN SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (POKLADNIČNÝ BLOK, ÚČTENKA, FAKTÚRA). PROSÍME O JEHO PRILOŽENIE PRI KAŽDEJ REKLAMÁCI.

Reklamácie bez dokladu o kúpe a bez záručného listu s uvedeným sériovým číslom nebudú uznané.

DOVOZCA:

ANTAR MEDICAL Sp. z o.o.

03-068 Varšava, ul. Zawiańska 43

Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30

www.antar.net

e-mail: antar@antar.net



ANHUI LRE FURNITURE CO., LTD

TEL/WHATSAPP: 86 13957315634

WECHAT: 86 13957315634

EMAIL: info@china-massagechair.com

WEB: www.china-massagechair.com

PRVÝ KONTAKT:

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o.,

Nádražná 329,

015 01 Rajec,

E-mail: anmedplus@anmedplus.sk;

www.anmedplus.sk

Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 13.05.2024

v1-13.05.2024