

NÁVOD NA POUŽITIE  
MASÁŽNE KRESLO  
AT56252



Ďakujeme za zakúpenie nášho produktu. Prosíme o dôkladné oboznámenie sa s návodom na použitie. Výrobok nepoužívajte pred prečítaním a pochopením tohto návodu. Ak nerozumiete upozorneniam, varovaniam alebo odporúčaniam, obráťte sa na zdravotníckeho pracovníka alebo predajcu, aby ste predišli poškodeniu výrobku.

#### UPOZORNENIE:

Skontrolujte všetky časti výrobku, či nedošlo k poškodeniu počas prepravy. V prípade zistenia takéhoto poškodenia výrobok NESMIE byť používaný. Pre viac informácií kontaktujte výrobcu.

#### ÚČEL

Kreslo bolo navrhnuté tak, aby poskytovalo komfort pri sedení, umožňovalo relaxáciu a zároveň pomáhalo a umožňovalo bezpečné vstávanie osobám, ktorým táto činnosť robí problémy. Podporuje vstávanie osôb po úrazoch, so zdravotnými problémami, seniorov atď. Kreslo bolo vytvorené na zabezpečenie pohodlia používateľa.

#### KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo mentálne obmedzenia (napr. zrakové postihnutie), ktoré znemožňujú bezpečné používanie výrobku.

Poruchy rovnováhy a stability: osoby s problémami s rovnováhou alebo stabilitou môžu mať ťažkosti s bezpečným používaním zdvíhacieho kresla. Náhle pohyby kresla môžu viesť k strate rovnováhy.

Kožné ochorenia: osoby s aktívnymi infekciami kože alebo otvorenými ranami, najmä v miestach kontaktu s kreslom, môžu zaznamenať zhoršenie stavu v dôsledku trenia alebo tlaku.

Poruchy citlivosti: osoby s poruchami citlivosti, najmä v dolných končatinách, nemusia správne vnímať nepohodlie alebo bolesť, čo môže viesť k prehliadnutiu poranení spôsobených dlhodobým tlakom.

Závažné problémy s krvným obehom: osoby s vážnymi poruchami krvného obehu v dolných končatinách môžu pociťovať nepohodlie alebo zhoršenie zdravotného stavu pri používaní zdvíhacieho kresla.

Bezpečnostné riziká: kreslá sú vybavené elektrickými mechanizmami, ktoré nemusia byť vhodné pre osoby s poruchami vnímania alebo zmäteným správaním (napr. pri demencii).

#### ŠPECIFIKÁCIA AT56252

Šírka sedadla: 52,5 cm

Hĺbka sedadla: 48,5 cm

Výška sedadla: 49 cm

Výška opierok rúk: 63 cm

Šírka operadla: 71 cm

Výška operadla: 73 cm

Celková šírka (s opierkami): 78,5 cm

Celková výška: 114 cm

Celková hĺbka: 90 cm

Maximálne zaťaženie: 170 kg

Poťah: 100 % polyester

Výplň operadla: mikrovlákno, hustota 30 kg/m<sup>3</sup>

Sedadlo a opierky rúk: plná pena, hustota 30 kg/m<sup>3</sup>

Hlavný motor: 6000 N

Motor operadla: 6000 N

Rýchlosť motora: 6 mm/s

Vstupné napájanie: 100–240 V, 50/60 Hz, 4,5 A

Výstupné napájanie: 29,0 V – 3,0 A, 87,0 W

Napájanie: 24 V DC

Hmotnosť: 52,5 kg

Uhol rozloženia: 180°

#### MATERIÁLY

Poťahová tkanina: 100 % polyester

Výplň operadla: mikrovlákno, hustota 30 kg/m<sup>3</sup>

Sedadlo a opierky rúk: plná pena, hustota 30 kg/m<sup>3</sup>

#### UPOZORNENIA

Kreslo musí byť umiestnené na rovnej podlahe.

NEPOUŽÍVAJTE kreslo vo vlhkom alebo prašnom prostredí – hrozí úraz elektrickým prúdom alebo porucha zariadenia.

NEPOUŽÍVAJTE kreslo pri teplote nad 40 °C.

NEVYSTAVUJTE kreslo teplu, radiátorom ani priamemu slnečnému žiareniu.

NEPOUŽÍVAJTE kreslo vonku – len do interiéru.

Ak sa kreslo nepoužíva, odpojte napájanie.

NEPOKLADAJTE ťažké predmety na kreslo.

NESKÁČTE na kresle.

NESEĎTE ani NESTOJTE na podnožke.

NESPITE na kresle počas jeho činnosti.

Deti musia byť pod dohľadom.

Zvieratá držte mimo dosahu.

NEPRIPÁJAJTE zariadenie mokkými rukami.

NEVKLADAJTE ruky medzi pohyblivé časti.

#### UPOZORNENIE:

Pri presune zo studeného do teplého prostredia počkajte približne 1 hodinu.

**UPOZORNENIE:**

Okamžite odpojte zariadenie a kontaktujte servis, ak:

bolo zaliate vodou

je poškodené čalúnenie

zariadenie nefunguje správne

došlo k výpadku napájania

počas búrky

**UPOZORNENIE:** Výrobok používajte iba v súlade s jeho určením.

**UPOZORNENIE:** Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním.

**NÁVOD NA POUŽÍVANIE**






Funkcie produktu:

Dva nezávislé motory pre hnetaciu masáž – krk a chrbát

Dva samostatné motorové systémy – ovládané nezávisle

Vibračné motory – viac režimov

Ovládanie:

-  **AUTO** TLAČIDLO NAPÁJANIA: zapne zariadenie a aktivuje základný režim
-  **SHAKE** TLAČIDLO VIBRÁCIÍ: mení režim vibrácií, posledný režim vypína vibrácie
-  **NECK** MASÁŽ KRKU: zapnutie/vypnutie funkcie
-  **BACK** MASÁŽ CHRBTU: zapnutie/vypnutie funkcie
-  **BACK UP** **BACK DOWN** PRVÝ MOTOR (ZDVIH/NÁKLON): ovládanie polohy kresla
-  **FOWARD** **BACKWARD** DRUHÝ MOTOR (ZDVIH/NÁKLON): ovládanie polohy kresla

**UPOZORNENIE:**

Pri sklopenom operadle **NEZAPÍNAJTE** hnetaciu masáž – môže dôjsť k poškodeniu motorov.


Pred použitím tejto funkcie **ODSTRÁŇTE** podušku operadla.




## MONTÁŽ

KROK 1: Nasaďte podušku operadla na kolíky.

KROK 2: Pripevnite látkovú klapku pomocou suchých zipsov k základni sedadla.

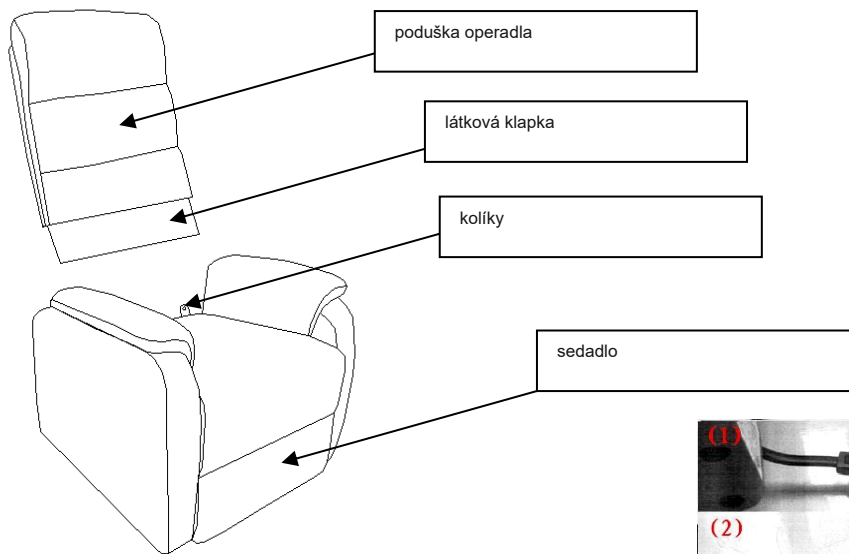

- (1) Konektor motora a kabeláže.
- (2) Konektor kabeláže a adaptéra.
- (3) Konektor kabeláže adaptéra a zástrčky.
- (4) Konektor motora a ručného ovládania.

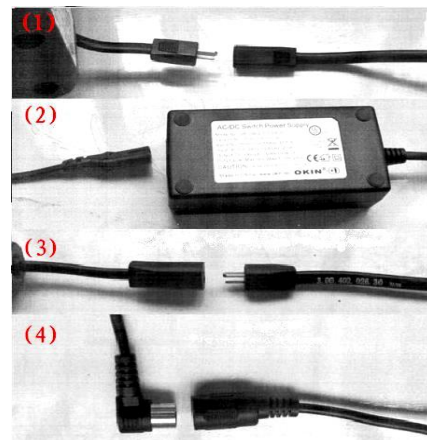

## ROZLOŽENIE

Zopakujte vyššie uvedené kroky v opačnom poradí.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pravidelne utierajte prach a nečistoty. Udržiavajte kreslo čisté a mimo prostredia s vysokou vlhkosťou.

Ak sa kreslo dlhší čas nepoužíva, prikryte ho čistou látkou, aby ste ho ochránili pred prachom.

**UPOZORNENIE:** Pred čistením sa uistite, že je hlavný vypínač vypnutý a zástrčka AC je vytiahnutá zo zásuvky.

Na čistenie plastových častí, rúrok a čalúnenia použite jemné syntetické mydlo. Zvyšky mydla opatrne utrite suchou handričkou.

Na odstránenie suchej škvŕny použite mäkkú handričku namočenú v teplej mydlovej vode, vyžmýkajte ju a priložte na škvŕnu.

**UPOZORNENIE:** Nepoužívajte čistiace prostriedky ako benzén alebo riedidlá ani iné agresívne látky, ktoré môžu spôsobiť vyblednutie farby alebo poškodenie čalúnenia.

Neodstraňujte čalúnenie na pranie. Žehlenie čalúnenia je prísne zakázané.

Tkanina nesmie byť v priamom kontakte so zdrojom tepla (napr. radiátor), môže to spôsobiť zranenie alebo požiar.

## SKLADOVANIE

Výrobok skladujte v suchom a chladnom prostredí, mimo vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

Kreslo neskladujte na priamom slnku ani v prostredí s vysokou teplotou, môže dôjsť k vyblednutiu tkaniny.

## LIKVIDÁCIA VÝROBKU

Tento výrobok obsahuje elektronické komponenty. Po ukončení jeho životnosti ho nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu.

Na správnu likvidáciu odovzdajte výrobok na príslušné zberné miesto elektrických a elektronických zariadení.

Správna likvidácia pomáha predchádzať negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie v súlade s platnými právnymi predpismi o recyklácii elektrických a elektronických zariadení.

## ZÁRUČNÝ LIST

Model: .....  
Sériové číslo: .....  
Pečiatka predajného miesta  
a čitateľný podpis predajcu: .....

Dovozca – spoločnosť Antar MEDICAL Sp. z o.o. týmto zaručuje, že predávaný výrobok je bez väd. V prípade reklamácie si spoločnosť Antar vyhradzuje právo rozhodnúť medzi opravou alebo výmenou chybných častí, za predpokladu splnenia nižšie uvedených podmienok.

Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky a zahŕňa tieto časti kresla:

ovládač, čalúnenie, mechanické časti, drevené časti, elektrické komponenty.

Táto záruka platí len pri bežnom používaní výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na:

opotrebenie častí, najmä látok a poťahov

nesprávne používanie, nedostatočnú údržbu alebo nesprávnu manipuláciu, poškodenie počas prepravy alebo používania, úpravy alebo opravy vykonané neoprávnenými osobami

poškodenie elektrických komponentov nárazom, otrasmi alebo iným mechanickým poškodením

poškodené káble/zástrčky (pretrhnutý alebo prerazený kábel napr. pri presúvaní kresla, znečistený – nahromadený prach, alebo nechránený kábel napr. poškodený domácim zvierateľom)

vystavenie elektrických častí kvapalinám alebo prepätiu (napr. zásah bleskom)

nedodržanie primeranej vzdialenosti od steny

pád používateľa na kreslo

používanie kresla nad maximálne povolené zaťaženie

náklady na zbytočné servisné zásahy (napr. nesprávne zapojenie kábla/zástrčky alebo vyššie uvedené situácie)

Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním, nehodami, zanedbaním alebo nedostatočnou starostlivosťou pri čistení a údržbe. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenia ako škrabance, trhliny, nadmerné alebo abrazívne opotrebenie ani na škody spôsobené neoprávnenými opravami alebo zásahmi do výrobku.

Pred začatím používania je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a dôsledne ho dodržiavať. Používanie výrobku v rozpore s jeho určením alebo odporúčaniami vedie k neodvolateľnej strate záruky.

TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ LEN SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (POKLADNIČNÝ BLOK, ÚČTENKA, FAKTÚRA). PROSÍME O JEHO PRILOŽENIE PRI KAŽDEJ REKLAMÁCI.

Reklamácie bez dokladu o kúpe a bez záručného listu s uvedeným sériovým číslom nebudú uznané.

### DOVOZCA:

ANTAR MEDICAL Sp. z o.o.

03-068 Varšava, ul. Zawiślańska 43

Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30

[www.antar.net](http://www.antar.net)

e-mail: antar@antar.net



ANHUI LRE FURNITURE CO., LTD

TEL/WHATSAPP: 86 13957315634

WECHAT: 86 13957315634

EMAIL: info@china-massagechair.com

WEB: [www.china-massagechair.com](http://www.china-massagechair.com)



### **PRVÝ KONTAKT: Distribútor:**

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,

E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; [www.anmedplus.sk](http://www.anmedplus.sk)

Tel./fax: 041/542 49 16

Dátum vydania návodu: 13.05.2024

v1-13.05.2024