

Palica vychádzková

Záručný list:

Návod na použitie:

Zloženie vychádzkovej palice sa vykoná vyťahnutím dielov palice od seba (sú spojené gumovým perom) a naskladaním dielov vedľa seba.

Palicu uložte do puzdra.

Vychádzkovú palicu je možné výškovo nastaviť podľa potreby užívateľa: zatlačte poistný kolík, palicu nastavíte do potrebnej výšky tak, aby sa poistný kolík opäť vysunul a zaistil tak palicu proti nežiaducemu zloženiu.

POZOR: Po úprave výšky palice musí byť poistný kolík poriadne zasunutý.

Dbajte na včasnú výmenu gumenej koncovky palice, aby nedošlo k poškodeniu kovovej časti.

Maximálna nosnosť palice je 100 kg.

Hlavná funkcia: Zaistená podora pri chôdzi

Postup pri čistení:

Utrite vlhkou handrou a riadne osušte. Nepoužívajte chemické prípravky k čisteniu. Nevystavujte dlhodobo intenzívnemu slnečnému žiareniu alebo inému tepelnému zdroju ani pri sušení palice.

Výrobca:

ANTAR Sp. J.

ul. Zawisłańska 43

03-068 Warszawa

Výhradný dovozca:

ANMED PLUS s.r.o.

Nádražná 329, 01501 Rajec.

Tel/fax: 041 542 49 16.

www.anmedplus.sk

VÝROBOK:

TYP:

ČÍSLO VÝROBKU:

ANMED PLUS s.r.o.Nádražná 329, 01501 Rajec

Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie palice spôsobené jej obvyklým užívaním. Reklamácia sa uznáva len na základe predloženého riadne vyplneného záručného listu a reklamovaného výrobku.

ZNAČKA KONTROLY:

Dátum predaja:

Pečiatka predajne:

