




**NÁVOD NA POUŽÍVANIE A MONTÁŽ KÚPEĽŇOVÝCH
SEDADIEL PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM:**

SPU-370

SNW-500

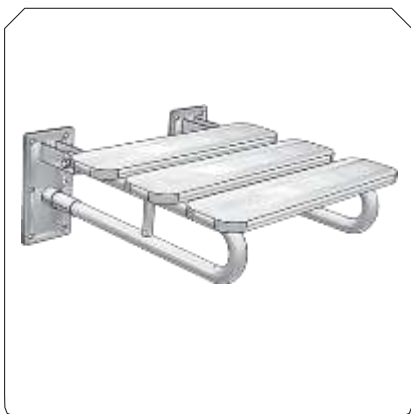

SPU-370



SNW-500

Sedadlá do kúpeľne pomáhajú ľuďom so zníženou pohyblivosťou udržiavať každodennú osobnú hygienu a prispievajú k výraznému zvýšeniu bezpečnosti pri pohybe v sprche alebo vo vani.


SPÔSOB INŠTALÁCIE

I. KÚPEĽNÉ SEDADLO PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH DO SPRCHY SPU-370



1. Odporúča sa, aby bolo sedadlo nainštalované vo vodorovnej polohe.
2. Vyvrtávanie otvorov pre telesá konektorov s priemerom zodpovedajúcim priemeru telesa konektora, ktorých umiestnenie v stene bude zodpovedať umiestneniu otvorov v základni sprchového sedadla. Hĺbka otvoru v základni by sa mala rovnať hĺbke osadenia konektora plus 10 mm.
3. Vyčistite otvor od prachu.
4. Vložte telo konektora do vyvrtaných otvorov.
5. Medzi podklad a základňu sprchového sedadla umiestnite plastové podložky.
6. Naskrutkujte ocelové skrutky do telies konektorov po celej ich dĺžke. Pre skrutky do d a v a n é s konzolou použite podklad z plnej keramickej tehly a silikátového alebo obyčajného betónu. Treba dbať na to, aby sa otvor neprepadol. Neodporúča sa inštalovať sedadlo na podklad zo sadrokartónu.
7. Na hlavy ocelových skrutiek nasadte dokončovacie zátky.
8. Po vyradení z prevádzky sa s výrobkom môže nakladať ako s komunálnym odpadom.

II. KÚPEĽNÉ SEDADLO PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH NA VAŇU SNW-500

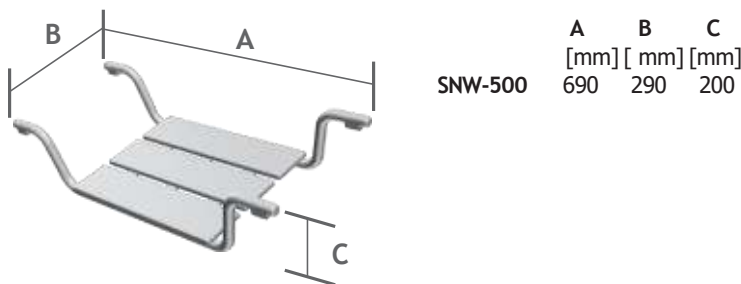

1. Odporúča sa upevniť sedadlo vo vodorovnej polohe na vani tak, aby sa ramená sedadla opierali o okraje vane.
2. Po vyradení z prevádzky sa s výrobkom môže nakladať ako s komunálnym odpadom.

ÚDRŽBA

Pri používaní sprchového sedadla pravidelne kontrolujte uvoľnenie upevňovacích kolíkov. Ak sa zistí akákoľvek vôľa, treba skontrolovať príčinu a utiahnuť skrutky alebo ich vymeniť za nové vrátane spojovacích telies. Po vyradení z prevádzky sa s výrobkom môže nakladať ako s komunálnym odpadom.

DEZINFEKCIA

Kúpeľňové sedadlo je výrobok na opakované použitie. V záujme zachovania dobrej hygieny by sa mal výrobok po každom použití postriekať aerosólovým prípravkom, produktom vyrobeným na báze chlórnanu sodného, a nechať pôsobiť 15 minút. Potom ho dôkladne opláchnite tečúcou vodou.

UPOZORNENIA

1. Po inštalácii sprchového sedadla sa uistite, že je bezpečne pripevnené k zemi a nehrozí jeho pád. Ak je sedadlo príliš zle upevnené, hrozí riziko pádu a zranenia používateľa.
2. Je zakázané inštalovať sprchové sedadlo na slabé steny, napr. sadrokartónové dosky, pretože stena sa môže počas používania zrútiť a používateľ môže utrpieť vážne zranenia.



TENTO SYMBOL OZNAČUJE MAXIMÁLNU HMOTNOSŤ

POUŽÍVATEĽA

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia,

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv. POZNÁMKY: Ak sa u vás vyskytnú bolesti, alergické reakcie alebo iné nepríjemné, nejasné príznaky súvisiace s používaním zdravotníckej pomôcky, poraďte sa so zdravotníckym pracovníkom.

SPÔSOB LIKVIDÁCIE VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Po vyradení pomôcky z prevádzky možno zdravotnícku pomôcku zlikvidovať ako bežný komunálny odpad.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerazania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROŠÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.

ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16

Dátum vydania návodu: 28. júna 2022
v1-1 28/06/2022

